


# 咬合接触状態<sup>\*</sup>を 色の濃淡で再現。

「厚み」で変化する識別しやすい青色<sup>ブルー</sup>

100 $\mu$ m以下の厚みによって青色の色味(透明性)が変化し咬合接触状態<sup>\*</sup>の確認ができます。

<sup>\*</sup>咬合接触状態(咬合接触点と咬合接触面積)

厚みの違いによる色の目やす

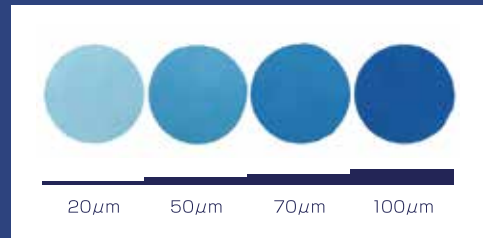

<sup>\*</sup>シャーカステン上での比較 <sup>\*</sup>色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

## 適度な流動性とシャープな硬化

歯列に盛る時には垂れにくく、噛み合わせ時には抵抗が少ない適度な流動性。また、充分な操作余裕時間を持ちながらもシャープに硬化します。硬化後にはトリミングもしやすい硬さになります。



# BLUE SILICONE LOW FLOW



咬合接触検査材

## ジーシー ブルーシリコン ローフロー

包装●

1箱:カートリッジ56g(48mL) 2本、ミキシングチップIS(ピンク) 6本

一般医療機器 23B2X00038000044

# 咬合接触状態の視認性

ブルーシリコーン ローフローでは咬合接触点と咬合接触面積の両方を色の濃淡で確認することができ、より精度の高い咬合接触状態を確認することができます。  
さらにブルーシリコーン ローフローを「バイトアイ」(別売)で撮影・解析でき、それらの画像とデータも保存できます。



ポーセレンや湿潤状態の天然歯に対しては咬合紙のインクがつきにくく、咬合接触点の把握が難しい場合があります。

ブルーシリコーンローフローは、色の濃淡で厚みを確認できるので、ポーセレンなど材質に関係なく咬合接触状態(咬合接触点、咬合接触面積)の把握ができます。

## 少ない寸法変化

付加型シリコーンを採用することで硬化時の収縮が小さいのはもちろん、寸法変化も少なく、咬合接触状態の経過観察のための長期保管も可能です。



関連製品



カートリッジディスペンサーⅡ  
包装●1画:1個  
一般医療機器 23B2X00038000019



ミキシングチップⅡ S(ピンク)  
包装●1画:60本  
一般医療機器 23B2X00038000020



ミキシングチップフラットノズル  
包装●1画:50個  
一般医療機器 23B2X00038000039  
※ミキシングチップⅡS(ピンク)に装着できます。



適合試験材、咬合接触検査材  
**ジーシー ブルーシリコーン**  
包装●1画:カートリッジ56g(48mL)2本、ミキシングチップⅡS(ピンク)6本  
一般医療機器 23B2X00038000042

咬合接触検査用ワックス  
**ジーシー バイトアイワックス**  
色調●紫色  
サイズ●2種=Mサイズ(縦71mm×幅70mm)、Lサイズ(縦71mm×幅70mm)  
厚さ●1mm  
包装●各1画:(40枚)  
一般医療機器 27B2X00006000065  
製造販売元 大成歯科工業株式会社

歯接触分析装置「バイトアイ」(別売)で解析  
(撮影・データ解析・画面表示)

※ジーシー バイトアイにコンピュータは付属しません。

Area	100	Point	30
I	76.5	I	27
L	46.0	L	12
R	30.5 (mm <sup>2</sup> )	R	15 (Numbers)

「咬合接触面積」を数値とグラフで表示  
「咬合接触点数」を数値とグラフで表示

歯接触分析装置  
**ジーシー バイトアイ**  
「ブルーシリコーン ローフロー」「ブルーシリコーン」「バイトアイワックス」専用の歯接触分析装置

包装●バイトアイスキャナ(本体)、USBケーブル1本、電源ケーブル1本、ACアダプタ1個、バイトアイアナライザ(ソフトウェア)インストールCD1枚、テールシート(10枚)  
バイトアイアナライザ(ソフトウェア)動作環境●OS:Windows 7 / 8 / 8.1 / 10(各OS 32/64bit版)  
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000284  
製造販売元 株式会社ジーシー

	ジーシー ブルーシリコーン ローフロー	ジーシー ブルーシリコーン
用途	咬合接触検査	適合試験 咬合接触検査
操作余裕時間 (23℃)	約45秒	約60秒
口腔内保持時間	約60秒	約60秒
盛りやすさ 使用量:3mL		
流れやすさ (加圧時) 緩和開始から30秒後の荷重比較 使用量:0.5mL 荷重:14.7N		
	35mm	37mm

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2021年8月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。  
※会社名・製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー  
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!  
推奨OS/バージョンはiOS:12.4以上、Android:8.0以上です。