

ジーシー ディスポーザブル トリプルトレー

印象採得用トレー



前歯から臼歯までのクラウン・ブリッジ症例で、
「印象採得」「対合歯部の印象」「咬合採得」を同時に採得

印象・咬合採得を一度にできる、咬合印象法により訪問診療などでも対応

金属フレームで補強することにより変形しにくくなり、さらに後縁部を薄くすることで咬合時に邪魔になりにくいため適用範囲が広い



臼歯部のみでなく前歯部まで印象採得できるため技工作業も行いやすい

柄が前方に設置されているため、トレーを口腔内に挿入する際に位置がわかりやすい
※柄は咬合平面上となるように把持します。

日本人の顎形態を考慮したディスポーザブルトレー



形態●片顎用
材質●トレー本体:ABS樹脂、メッシュ:不織布、連結部:ステンレス鋼
包装●1函:12個 (衛生的な個別包装)

歯科印象採得用トレー
一般医療機器 27B2X00268000033

2020年度 診療報酬改定により、
在宅歯科訪問時の臼歯単独冠へのシリコンゴム印象材を用いた咬合印象法が新設されました。

歯科診療報酬点数 咬合印象:140点 [算定要件]


咬合印象とは、在宅等において療養を行っている通院困難な患者に対し、臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)に対して、歯科用シリコン印象材を用いて咬合印象を行った場合をいう。なお、当該処置を行った場合、咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できない。

■基本的手技

- 1) 支台歯形成、歯肉圧排など印象採得の準備
- 2) 咬合印象用トレーの試適と閉口位の確認



3) 印象採得と咬頭嵌合位での閉口保持

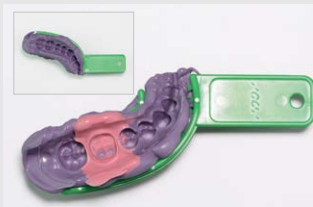

4) 印象材硬化後に咬合印象用トレーと印象体を口腔内から撤去

- 5) 支台歯の印象面に模型材を注入
- 6) 対合歯側の印象面に模型材を注入※5)の硬化後に実施
- 7) 咬合器への模型装着
- 8) 咬合印象用トレーを模型から撤去
- 9) 歯型分割、トリミング
- 10) 歯冠修復物の製作
- 11) 歯冠修復物の口腔内調整と装着

公益社団法人 日本補綴歯科学会 基本的手技:シリコンゴム印象材による咬合印象法に関する基本的な考え方(保険診療に係わる適用として)(令和2年3月)より抜粋

関連製品	<p>親水性ピコシリコン印象材 ジーシー エクザミックスファイン</p> <p>〈レギュラータイプ〉カートリッジ 包装●1函:カートリッジ64g(48mL)2個、ミキシングチップII Lx6本</p> <p>歯科用シリコン印象材 ジーシー エクザミックスファイン レギュラータイプ 管理医療機器 221AABZX00040A01</p>	<p>超親水性ハイブリッドシリコン印象材 ジーシー フェュージョンII</p> <p>〈モノフェイスタイプ〉カートリッジ 包装● 1函:2カートリッジ64g(48mL)×2本、ミキシングチップII Lx6本 1函:10カートリッジ64g(48mL)×10本、ミキシングチップII Lx30本</p> <p>歯科用シリコン印象材 ジーシー フェュージョンII モノフェイスタイプ 管理医療機器 220AABZX00014000</p>
	<p>〈インジェクションタイプ〉カートリッジ 包装●1函:カートリッジ64g(48mL)2個、ミキシングチップII Sx8本</p> <p>歯科用シリコン印象材 ジーシー エクザミックスファイン インジェクションタイプ 管理医療機器 221AABZX00039A01</p>	<p>〈ウォッシュタイプ〉カートリッジ 包装● 1函:2カートリッジ62g(48mL)×2本、ミキシングチップII SSx8本 1函:10カートリッジ62g(48mL)×10本、ミキシングチップII SSx40本</p> <p>製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 管理医療機器 220AABZX00013000 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地</p>

*掲載情報は、2020年7月現在のものです。
*製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
*色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **プレミアムプラスジャパン株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く) 営業所
http://www.gcdental.co.jp ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRコードでOK!
推奨OSバージョンはiOS:11.0以上、Android:8.0以上です。