

パウダータイプ/クリームタイプの義歯安定剤

# 歯科用 ポリグリップ

義歯の維持能力を向上させ、  
食事などの日常生活がより快適に。

金属床  
にもOK!!



パウダー  
タイプ

ふりかけるだけの簡単なパウダータイプで  
薄く塗布できるため違和感が少ない

管理医療機器 21700BZY00602A01  
販売名 ポリグリップパウダーFb

品名	歯科用 ポリグリップ パウダー 無添加
内容量	50g

**成分** ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩・カルボキシメチルセルロース



クリーム  
タイプ

義歯をピタッと口腔粘膜に粘着し  
長時間にわたって安定性が持続

管理医療機器 20900BZY00112A01  
販売名 新ポリグリップSb

品名	歯科用 新ポリグリップ 無添加
内容量	75g


**成分** ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩・カルボキシメチルセルロース・軽質流動パラフィン・白色ワセリン

- 水溶性なので口腔内では硬化しにくく、歯肉を傷つける心配はほとんどありません。
- ポリグリップは口腔内のpHを考慮し、パウダータイプ/クリームタイプともに中性です。
- 在宅診療や咬合採得時など、一時的に義歯を安定させたい時にも有効です。
- 色素・香料を含まず酸味もほとんどないため、食べ物の味を変えにくい製品です。

デンチャー装着者のうち86%の方が、  
デンチャーの下に食べ物が挟まることに不満を感じているという事実に驚かれるかもしれません<sup>1</sup>。

ポリグリップ\*は  
食べ物の挟まる量を  
**74%**  
低減させます。

適合の良いデンチャーにポリグリップ\*を使うことで  
安定剤を使わない場合と比べて、食べ物の挟まりが低減します<sup>2</sup>。(P<0.0001)

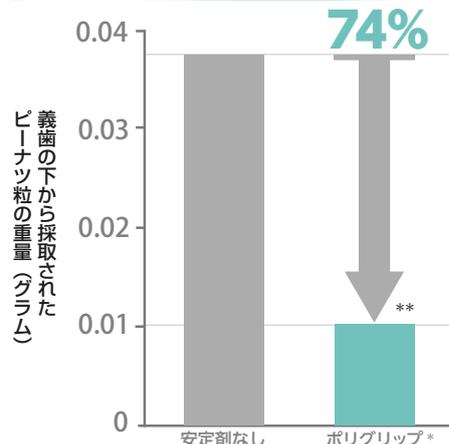

無作為化盲検スリーウェイクロスオーバー試験で、義歯安定剤を使った場合と使わなかった場合を比較評価しました。適切に製作され、適合の良いフルデンチャーを使用している方々に、挽き割りピーナツ32グラムを咀嚼嚥下してもらったあと、デンチャーの下から食べかすを採取して計算することで、食べ物の挟まる量を定量評価しました。

\*\*P<0.0001

\*試験に用いた商品は新ポリグリップ 無添加です。

References

1. Data on file, GSK.Canadian Quality of Life Study, 2005

2. Gendreau L, et al. Denture adhesive reduces food entrapment under removable full dentures. Poster presented at the IADR 2011, poster 1052



## メカニズム

ポリグリップが唾液等に触れると水分を吸収し粘着性を示します。

## 性質

**水溶性**  
唾液や食物などの水分に触れると(写真)のような糊状になり粘着性が出ます。最終的にはほとんど溶けてなくなります。



## 特徴

- パウダータイプなのでムラなく均一に塗布しやすい。
- 油分を含まないため、使用後の清掃が容易。

- クリームタイプなので均一にのび、塗りやすい。
- 粘着作用により隙間をふさぎ、食片圧入を軽減。

## 持続期間

約半日<sup>※</sup> ※ 持続時間には個人差があります。

約1日<sup>※</sup> ※ 持続時間には個人差があります。

## 使用方法

### 使用上の注意

ポリグリップをつけたまま義歯を放置し乾燥させると、固まって取りにくくなります。その場合、しばらく水に浸すとポリグリップが溶け出して取りやすくなります。

- ① 義歯をよく洗い、少し湿った状態にします。  
  
少し湿った状態にする
- ② 義歯の粘膜面側に、ポリグリップパウダーをムラなくふりかけます。義歯を軽くたたいて余分なパウダーを振り落とします。  
  
適量をふりかける
- ③ 義歯を装着する前に、口腔内を水ですすいでください。
- ④ 義歯を装着し、1分間ほど軽く押さえてください。  
  
余分な粉末はふり落とす

- ① 義歯をよく洗い、水分を完全に取ります。  
  
塗布したところ(上顎の場合)
- ② 義歯の粘膜面側にポリグリップを塗布します。使用は1日1回、総量は3.0cm以内にしてください。  
  
(下顎の場合)
- ③ 義歯を装着する前に、口腔内を水ですすいでください。
- ④ 義歯を装着し、1分間ほど軽く押さえてください。  
  
(部分床義歯の場合)

## 清掃方法

ポリグリップが口腔内に残っている場合は乾いたガーゼ等で清拭します。義歯に残っている場合は拭き取り後、流水下でブラッシングします。ポリグリップが溶けてなくなっても同様にブラッシング洗浄します。義歯に残ったポリグリップのヌメリの除去にはポリデント フレッシュクレンジス がおすすめです。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の説明文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社**

東京都文京区本郷3丁目2番14号 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286