

オサダが口腔外科の新しい扉を開く

# osada SURGERY FALCON

電動式骨手術器械

オサダ サージェリー ファルコン



# osada SURGERY FALCON

## 患者様に優しい セーフティリートメント

- 超音波による振動で軟組織、血管を巻き込まずに安全で正確な骨切削を行います。
- 軟組織の切開部が少なくすむ為、患者様への負担が少なく、回復の早い治療が行えます。

## ドクターも納得の ワイドサポート

- 豊富なチップでサイナスリフト、ソケットリフト、ベニアグラフト、抜歯の補助等幅広い症例に対応できます。
- パワーは従来品より50%アップ、また15段階の細かい設定が可能です。

## ドクターに優しい イージーコントロール

- 直感的に操作ができるタッチパネルにより簡単に各種設定が可能です。
- 術式や症例に合わせて、パワーと注水量のメモリーが6パターン設定可能です。




# 納得のパワーと豊富なチップで安全な口腔外科手術を！

## 表示パネル

直感的に操作が行えるタッチパネルで、メモリーや注水量の設定ができます。フラットなパネルで、清掃も簡単です。



●術に合わせてパワー・注水量を6パターン設定することができます。

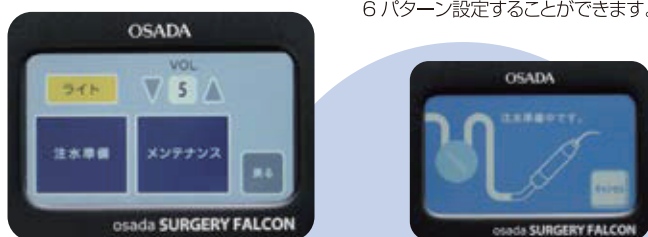

- 注水準備ボタンを押すと、ハンドピース先端まで注水され、すぐに使用できる状態になります。
- メンテナンスボタンを押すと、ホース内の水を排水でき、水回路の洗浄と水抜きがスムーズに行えます。

## ハンドピース

LEDライト装着でバランスの良いハンドピースは、ストレスなく快適に治療を行います。




## 滅菌

ハンドピースやホース・チップ類を滅菌ケースに入れてオートクレーブ滅菌できます。



### ■オプション

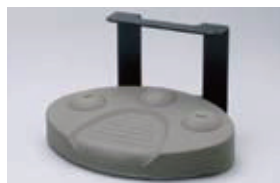

**フットコントローラー**  
足下でメモリー、パワー、注水量の調整が行えて衛生的にご使用いただけます。(防水)

### ■選択仕様



外部注水タイプ

## 症例

### 〈サイナスリフト〉

症例提供：医療法人 UC 会  
銀座UCデンタルインプラントセンター  
菅井敏郎先生



ST84S 開窓するためのガイドをつける



ST91 開窓



ST82 開窓辺縁の上顎洞粘膜剥離



ST99 上顎洞粘膜剥離



上顎洞粘膜挙上完了

# オサダサージェリーファルコン チップラインナップ

骨 切 削	商品名
	商品コード パワー設定
	ST70 51921 7~10
	ST71 51922 7~10
	ST70Z 52569 7~10
	ST91 52578 7~15
	ST92 52579 7~15
	ST93 52580 7~15
	ST94 52581 7~15
	ST95 52582 7~15
	ST106 53249 7~15
	ST107 53250 7~15
	ST125 54691 7~15

穴 開 け	商品名
	商品コード パワー設定
	ST83 52571 7~10
	ST83S 52573 7~10
	ST84 52574 7~10
	ST84S 52575 7~10
	ST97 52585 7~10
	ST98 52586 7~10
	ST108 53251 7~10

骨 整 形	商品名
	商品コード パワー設定
	ST72 51923 7~10
	ST96 52583 7~10
	ST74 51925 7~10
	ST75 51926 7~10
	ST86 52576 7~10
	ST87 52577 7~10

粘 膜 剥 離	商品名
	商品コード パワー設定
	ST82 52570 7~10
	ST73 51924 7~10
	ST99 52587 7~10
	ST100 52588 7~10

  は骨切削セット  
  はサインスリフトセット

## ■オサダサージェリーファルコン仕様

電 源	電源電圧	交流 100V
	電源周波数	50/60Hz
	電源入力	1.0A
質 量	本体：3.1Kg、ハンドピース：50g、ホース：88g	
寸 法	本体：W216×D269×H474mm(ハンガー含む) ハンドピース：φ19×110mm ホース：1.9mm	
発振方式	圧電式	
発振周波数	30±2KHz	
パワー設定	1-15(15段階)	
水 量	10-80ml/min(10段階)	
ライト	1500±500Lx	
標準装備	本体・ホース・ハンドピース・ハンドピースホルダー・チップセット(内容は下記)・チップケース・フットスイッチ・ハンガー・チップ着脱工具・滅菌ケース・ボトルB 各1個 ●チップセット1または2をお選び下さい 1：骨切削セット(5本) ST72、ST94×2本、ST125×2本 2：サインスリフトセット(5本) ST73、ST83、ST83S、ST84、ST91	
認証番号	223ALBZX00031000	

商品コード	商品名	形 式
3261	オサダサージェリーファルコン	OSF-1

販売元 長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5  
TEL:03(3492)7651 FAX:03(3492)7506

製造販売元 長田電機工業株式会社

<https://osada-group.jp>

※印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。※この広告掲載商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。

※ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

No.2123



長田電機工業(株)

ISO9001 ISO13485  
長田電機工業(株) 名古屋工場

ISO14001  
JAERO211  
長田電機工業(株) 名古屋工場