

関連商品のご案内



歯科用マウスピース・マウスガードの世界的ブランド

新型いびき防止装置製作用パーツ

サイレンサー-SL

ダブルS状スロットコネクタを採用した
新型サイレンサー製作用パーツ



歯科咬合採得用材料 サイレンサー-SL

名称	包装内容	包装単位	製品番号
サイレンサー-SL パーツカード	ゲージ・付属パーツ	1シート	J81688
サイレンサー-SL パーツカード 10シートセット	ゲージ・付属パーツ	10シート	J81689
サイレンサー-SL ゲージ	ゲージ	5個	J81690
サイレンサー-SL コネクター	コネクター	1枚	J81696

一般的名称: 歯科咬合採得用材料 医療機器届出番号: 14B1X00011000572

1 Functionable

性能の向上

アンカーがコネクタ内を自由にスライドするため、
開閉時の水平的運動性能が向上

2 User-friendliness

シンプルな操作性

上下顎の位置関係の記録から装置の製作パーツまで
取り揃えたオールインワンシステム

3 Comfortable & Durable

快適性と耐久性

コネクタに加わる過度な負担を回避し装置の耐久性を向上

Step by Step 製作手順



Step1

ゲージを用いて下顎前突位
を設定します。




Step2

メジャープレートを用い
て、上下顎アンカーの位置
を設定します。



Step3

エルコガムを用いて、アン
カーをポジショニングします。

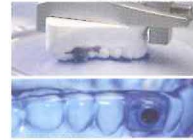

Step4

成形器にて上下顎シート
を成形します。



Step5

シートを切削し、リスコを
用いて研磨を行います。



Step6

アンカーにダブルS状
スロットコネクタを取り
付けます。

関連製品



エルコロック プロ
3.0mm(10枚入り)
医療機器届出番号: 14B1X00011000497
歯科咬合スプリント用材料
ハードシート、ソフトシートの
2層構造シート
J80593



エルコガム(400g入)
粘土状のブロックアウト材
J80364



リスコス(10枚入)
医療機器届出番号: 14B1X00011000511
歯科用研磨材料
シート用研磨ホイール
J80043



リスコID(6枚入)
医療機器届出番号: 14B1X00011000499
歯科用研磨材料
シート用研磨ホイール
J80053



エルコロック プロ
3.0mm(10枚入り)
医療機器届出番号: 14B1X00011000497
歯科咬合スプリント用材料
ハードシート、ソフトシートの
2層構造シート(ブルー色)
J81693



HSSドリル
医療機器届出番号: 14B1X00011000576
歯科技工用スチール切削器具
ハードシート切削用カッター(細部用)
1.0mm(3本入り)
J80052
1.4mm(1本入り)
J81697



リスコ(アソート)
医療機器届出番号: 14B1X00011000510
歯科用研磨材料
特殊海綿状の研磨ホイール
コアース2枚、メディアム4枚、ファイブ4枚入り
J80361

●ご注文、デモンストレーションのご依頼は下記販売店までご連絡ください。

SmartPractice

株式会社スマートプラクティスジャパン

〔お問合せ先〕株式会社スマートプラクティスジャパン 営業部

本社 / 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階
TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737
西日本営業所 / 〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-11-26 Auroraビル710
TEL.06-6309-4000 FAX.06-6309-4002

〔製造販売元〕株式会社スマートプラクティスジャパン

〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13

エルコデント専用ホームページ▶ <http://erkodent.jp/>

製品情報など最新のニュースを随時更新!

製品ご購入の先生方は会員登録をお願いします。メンテナンスなどのアフターサービスをスムーズにお受けいただくことができます。