

● シンプロ内容

シンプロ本体
+
シンプロ用ピーカー

クリーニングピン

ピンセット

マグネット

ニコクリーン
洗浄用カップ

●製品仕様

出力	100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	90 VA
回転数	1200RPM 1600RPM 2000RPM
寸法(WxDxH)	140 x 300 x 230 mm
重量	約3 kg

シンプロ
注文No. 6500-0000

※本体は3年保証です(洗浄槽は除く)。

シンプロ本体/シンプロ用ピーカー(洗浄槽・フタ付)/
ニコクリーン洗浄用カップ(フタ付)/クリーニングピン(75g)/
ピンセット/マグネット/電源ケーブル/取扱説明書

● 別売品

専用洗浄液

シーメスDC
2L×1本



シンプロ専用洗浄液
です。
1回の洗浄で200mL
必要です。

[成分]

水、有機酸、無機酸、非イオン界面活性剤、その他

ニコクリーン
2L×2本

注文No. 6500-0610



頑固なニコチン除去用です。
ニコクリーン洗浄用カップに
義歯とニコクリーンを入れて、
5~10分浸漬させます。浸漬
後、流水下で義歯ブラシでブ
ラッシングしながら落とします。
シンプロでは使用しないでく
ださい。

[成分]

水、エタノールアミン、ダウノルドPM、その他

●シンプロ用ディスインフェク
トルピーカー
注文No. 6500-0450

●ニコクリーン洗浄用カップ
(フタ付)
注文No. 1850-0007

●クリーニングピン(75g)
注文No. 6500-0550

●マグネット
注文No. 90003-4039

●ピンセット
注文No. 90003-4029

注意 ●本製品には強力な磁力を持つマグネットが含まれます。●ペースメーカーをご使用の方がいらっしゃる場合、本製品を50cm以上離してご利用ください。●本製品の周囲にパソコン等の記憶媒体、クレジットカード、時計を置かないでください。●特殊形状や素材(クラウンの薄いマージン部、メッキ部分、フリクションピンなど)は洗浄中に破損するおそれがあります。そうした箇所の損傷を防ぐために、あらかじめワックスやシリコンなどで保護してください。●本製品は義歯および歯列矯正用スプリント専用の洗浄機器です。なお、殺菌機能は備わっておりません。

● 関連製品

ザ・デンチャーズ

The Dentures®

義歯ブラシ

握りやすいハンドル形状のため、
使いやすく簡単に磨くことが出来ます。
2種類のナイロン毛
(透明・茶色)があり、
汚れにあわせて使い分けできます。



〈仕様〉ハンドル:ポリプロピレン製
毛:ナイロン
耐熱温度:80℃

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。



販売元
株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は



Professional Care

プロフェッショナルケア

全自動義歯洗浄器 SYMPRO

シンプロ




シンプロは35°に傾いた洗浄槽と
クリーニングピンおよび専用洗浄液で
頑固に付着した歯石やプラークを
機械的、化学的に除去し洗浄します。

确实

優れた洗浄効果
斜めドラム式とクリーニングピン

●35°斜めドラム式洗浄槽

家庭用洗濯機で採用されているように、斜めドラム式洗浄槽のものが、より洗浄効果がある事が知られています。また、実験により、35°の角度では、ピンが最も効率的に液体の中を動き回ることがわかりました。また、30秒ごとの反転機能により、洗浄槽内を義歯が反転移動するので、歯間などの狭小部分も確実に洗浄ができます。

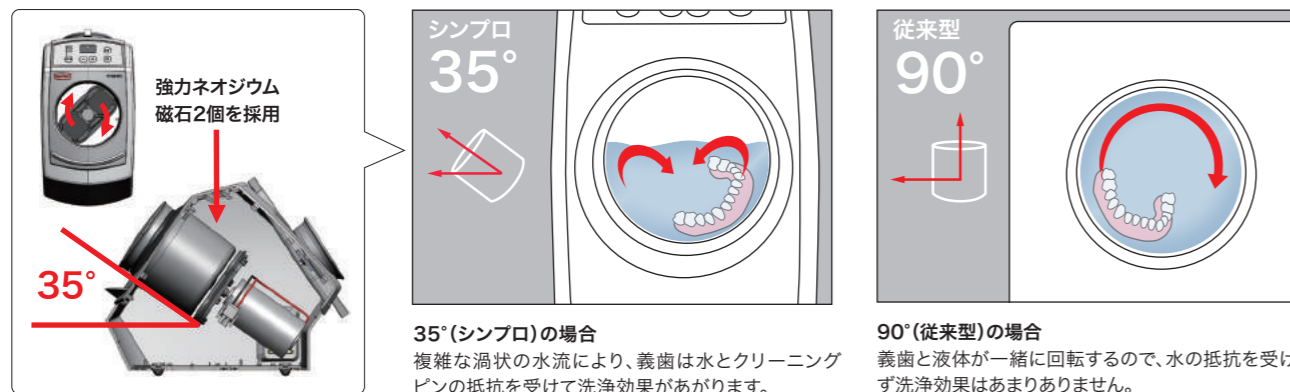

●スチール製クリーニングピン

90°にカットされた均一な形状の薄型ピンで、面取り加工されており、義歯にキズをつけません。ピンが回転することで、洗浄液の温度が約45℃に温められ、さらに洗浄効果を高めます。



簡単

誰でも簡単操作
セットして
スタートキーを押すだけ

回転数と用途の目安
●1200RPM:部分床義歯やデリケートな部位
●1600RPM:貴金属を使用した義歯や矯正装置
●2000RPM:総義歯、金属床やスプリント

●操作手順



清潔

口腔環境の改善
患者さんの満足度アップ

●洗浄例



Q&A

- Q 一度に何床洗浄できますか?**
A ひとりの患者の上下顎2床までです。別々の患者の義歯を一緒に洗浄することは、感染予防の点から毎回新しい洗浄液を使用してください。
- Q デリケートな箇所などが洗浄中に破損するおそれがありますか?**
A コーヌスやアタッチメント等特殊な部分は、あらかじめワックスやシリコン等で保護してください。
- Q 標準の洗浄時間は何分ですか?**
A 約20分ですが、洗浄時間は洗浄する義歯の素材や汚れ具合によって変化します。何度か洗浄を行い、その都度汚れの落ち具合をチェックしてください。回数を重ねるうちに、適切な洗浄時間の判断が可能になります。
- Q 裏装材付の義歯は洗浄できますか?**
A 洗浄できます。
- Q クリーニングピン・ピーカーおよびピーカーのフタの消毒方法**
A 感染症の疑いがある患者の義歯を洗浄した場合は、殺菌消毒剤(グルタラル製剤)を使用してください。
- Q 洗浄液(ユニバーサル)の廃棄方法は?**
A ピーカーの底部にマグネットを当て、大量の水道水でうすめながら廃棄してください。マグネットを当てませんと、クリーニングピンがピーカーから出てしまいます。