

製品



SDR

製品番号：60603002
 内容：コンピューラ 15 個
 価格：4,260 円

SDR エコパック

製品番号：60603003
 内容：コンピューラ 50 個
 価格：11,270 円



SDR コンピューラチップサイズ

ゲージ：20
 内径：0.6mm
 外径：0.9mm
 長さ：11mm



コンピューラガン

製品番号：60665900
 価格：2,760 円

関連製品



歯科用充填・修復材補助器具
V4 システム
 V4 リングスターターパック



コンポジットレジン
TPH スペクトラム
 コンピューラ単品 10 個入
 コンピューラ単品 20 個入



歯科用重合用光照射器
スマートライト FOCUS

販売名：V4 システム
 一般名称：歯科用充填・修復材補助器具
 医療機器届出番号：13B1X10236Y03920
 クラス分類：クラスI (一般医療機器)

販売名：TPH スペクトラム
 一般名称：歯科用充填用コンポジットレジン
 医療機器届出番号：20800BZY00324000
 クラス分類：クラスII (管理医療機器)

販売名：スマートライト FOCUS
 一般名称：歯科用充填・修復材補助器具
 医療機器届出番号：13B1X10236Y03870
 クラス分類：クラスI (一般医療機器) 特定保守管理医療機器

販売名：エスディーアール 一般名称：歯科用充填用コンポジットレジン 医療機器届出番号：223AFBZX00008000 クラス分類：クラスII (管理医療機器)

*表示価格は、2017年1月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元
デンソプライシロナ株式会社
 本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス
 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)
☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659
<http://www.dentsply-sankin.com>

SDR
 エスディーアール

歯にやさしいフロアブルレジン




特徴

① 4mm の深さまで一括充填

硬化深度が深く一度の充填で 4mm の深さまで一括充填できます。

ベネフィット チェアタイムを大幅に短縮できます。

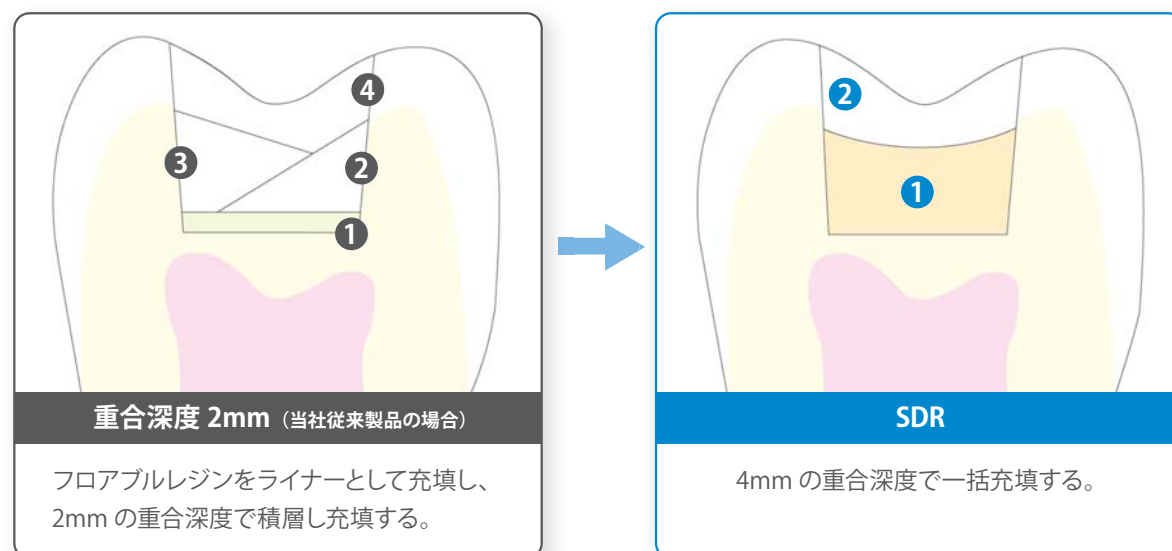

② 窩壁への高い適合力

充填後、自然に窩洞へ馴染んでゆくセルフレベリング機能を有しているため、窩洞内面の小さな凹凸や角へもスムーズに流入します。

ベネフィット 長期的に良好な封鎖が可能です。




③ 低い重合収縮応力

低い重合応力によりレジン硬化時の歯牙に対する負担が抑えられます。

ベネフィット 術後疼痛、術後歯髄炎、辺縁漏洩、2次カリエスのリスクを軽減します。


重合収縮応力とは…

コンポジットレジンが光照射により重合収縮する際に、窩洞内の接着界面において発生する引っ張り応力のこと。

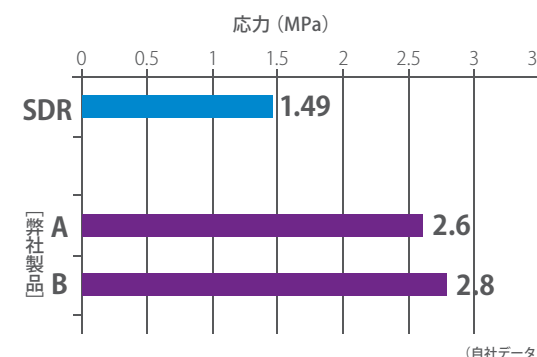


A 弊社従来製品

モノマーのネットワーク形成イメージ図

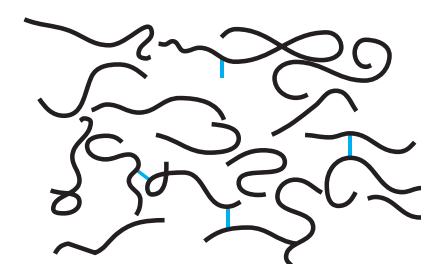


無秩序で急速にネットワークを形成するため、重合する際に発生する収縮応力が大きい。

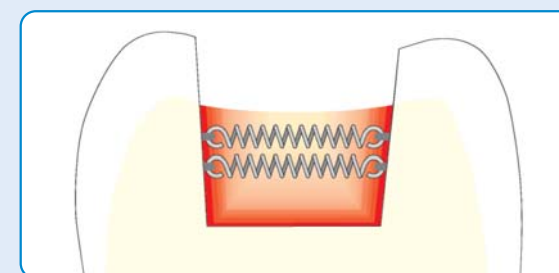


引っ張り応力が大きいため、負担が大きい。

B SDR

SDRモノマーのネットワーク形成イメージ図

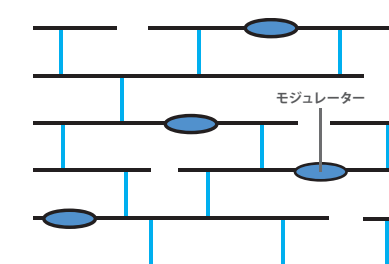

モノマーに組み込まれるモジュレーターの働きにより、ネットワークの形成がコントロールされ、重合する際に発生する収縮応力が小さい。

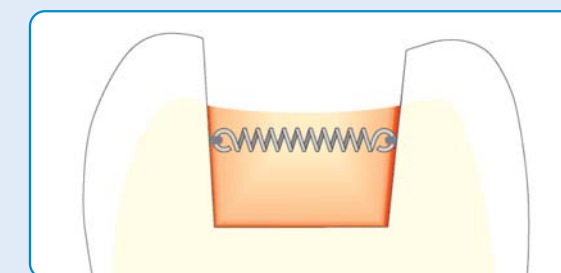

接着面に発生する引っ張り応力は小さいため、歯牙に対する負担も少ない。

SDR 充填手順

