



Dent Burner

デントバーナー

片手（ワンタッチ）で点火するガスバーナー

DENTRADE
DENTAL SUPPLY&TRADE

使用方法



使用方法 ①

PUSH ボタンを押して、ガスバーナーのキャップを開けます。



使用方法 ②

本体を平坦なテーブル等に置きます。操作部を上を持ち上げます。ガスバーナーを本体にセットします。



使用方法 ③


手の側面で操作部（ドーナツ状のステンレス天板）を押し下げ、着火し、プラグー等のハンドインスツルメント（歯科用器具）を加熱します。操作部から手を離すと消えます。

特徴



安定した炎

シャープな炎が安定して出ます。
※長時間又は連続での使用はしないで下さい。
※ロック機能は使用しないで下さい。

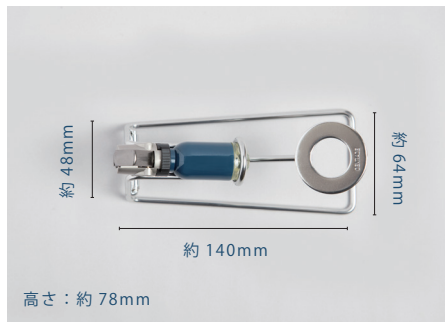

コンパクト

場所をとらないコンパクトサイズで持ち運びも便利。往診等にも便利です。



ランニングコスト

電池が不要な上、市販のガスライター専用のガスボンベで補充が可能なので、ランニングコストに優れています。

ガスバーナー




ガスバーナー

ガスバーナーの後方は透明な為、残量や補充のタイミングが確認できます。



バーナー（火力）の調整

ガストーチの後部にある、調整部（）をマイナスドライバー等を用いて回転させる事で火力の調整が可能です。



ガスの補充方法

市販のガスライター専用のガスボンベで補充が可能です。

DENT BURNER デントバーナー

販売名：デントバーナー
一般的名称：歯科用バーナー

届出番号：27B2X00064000024

標準価格：本体セット（本体+ガスバーナー 1ps） 8,800 円（税込）
ガスバーナー（ガスバーナー 1ps） 2,200 円（税込）



www.dentrade.co.jp

有限会社デントレード

〒567-0041

大阪府茨木市下穂積4丁目13-107

TEL：0120(7)86086

FAX：0120(1)86086

EMAIL：info@dentrade.co.jp