



歯科医院様向け資料

LION

歯科用

プラークコントロール歯ブラシのスタンダード*へ

*ライオン歯科材(株)内

Check-Up 歯ブラシ新登場!!

2023年
2月21日
発売



セルフケアを
もっと簡単に、
効果的に

歯ブラシと歯磨剤の
使用による
セルフケアを提案します



1450
ppmF

医薬部外品

販売名:
チェック・アップSTeA
チェック・アップSTeB

Check-Up歯ブラシstandardタイプ

*6才未満への使用は控え、子供の手の届かない所に保管してください

ライオン
歯科材初!

「フラットダブル植毛」で プラークにダブルアプローチ

ラウンド毛とスーパーテーパード毛のダブル植毛が歯間部・咬合面、さらに臼歯部まで届き、高いプラーク除去効果を発揮します。

Check-Up 歯ブラシ standardタイプの特長

1 フラットダブル植毛の高い清掃力

毛先面がフラットなので当てやすく、ダブル植毛が歯間部と咬合面のプラークをしっかり除去します。



●歯間部の清掃力



●咬合面の清掃力



顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷牙後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。
荷重:200g 刷牙回数:10回 Slimhead II 33Mを100とした場合の指数

歯間部の清掃力がラウンド毛歯ブラシより有意に優れることを確認

咬合面の清掃力はラウンド毛歯ブラシと同等であることを確認

“フラットダブル植毛”が、歯間部・咬合面両方で高い清掃力を実現

2 薄型ヘッドとスリムネックの高い到達性

臼歯部にも無理なく届く




●ヘッド+ネック樹脂部分の体積比率



※ヘッド+ネックの樹脂部分の体積を比較
※Slimhead II 33Mの体積を100とした場合の比率

3 持ちやすくすべりにくいラバーハンドル

ペングリップでもパームグリップでも持ちやすく、高い操作性を発揮

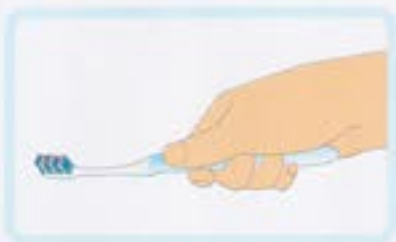

臨床現場のリアルな声を集めました

(2022年意識調査、患者 n=1,000、20代歯科衛生士 n=120)

患者

あまりそう思わない・
そう思わない7%



歯科医院おすすめの
予防用品は
効果が高いと思う

あまりそう思わない・
そう思わない14%



自分に合った
歯ブラシを
すすめてほしい

自分にあった
予防用品を
すすめてほしい



歯科衛生士

あまりそう思わない・
そう思わない34%



患者様に合った
予防用品を
おすすめするのは難しい

あまりそう思わない・
そう思わない28%



予防用品の
質問をされて
困ったことがある

患者様のセルフケアの
お役に立つには
どうしたら良いか?

製品特長や
使い方を短時間で
伝えるには?



そこで!ライオン歯科材から新提案

\\ これからのTBIは **Check-Up** でセルフケア指導 //

高濃度

1450ppmFフッ素配合
フッ素がむし歯を防ぐ



落とす

フラットダブル植毛で
歯と歯の間や
歯面の歯垢を落とす



留まる

ライオン保有技術の
フッ素高濃留処方
歯にしっかり留まる

届く

薄型ヘッドでお口の
奥まで毛先が届く



Check-Up
セルフケアガイド
※詳細は裏面をご覧ください



Check-Upセルフケアガイドを活用して
患者様へ歯みがきのポイントをアドバイス

医薬部外品 販売名:チェック・アップSTeA
※6才未満への使用は控え、子供の手の届かない所に保管してください。

これからのセルフケアのために **Check-Up** メソッドの5ステップ

1



歯磨剤を適量のせる
(2cm程度)

2



軽い力で
小刻みな往復運動でみがく

3



ブラッシング後、
吐き出す

4



すすぎの水約15ml
(大さじ1)を入れる

5



約5秒間、
1回口をすすぐ

Check-Up 歯ブラシは植毛部長さ約2cm

患者様の効果的なセルフケアをサポートします

Check-Up セルフケアガイド

持ち運びに便利な
スマートフォンサイズ

院内で指導したことを患者様が自宅で実践していただけるツールです



使い方

院内

患者様にリスク部位や
磨き方のポイント等を指導



自宅

患者様は指導された内容を
自宅で確認、実践する



商品に関する
情報はこちら



ハンドルカラー | ● ピンク ● ブルー ● イエロー



仕様・入数・価格

商品名	歯ブラシ 全長 (mm)	ヘッドの大きさ と 植毛配列 (65%縮尺)	用毛			内装入数	メーカー希望 患者様向け 価格/個
			種類	長さ (mm)	太さ (mm)		
Check-Up 歯ブラシ standardタイプ S	180		スーパーテーパード毛	10.5*	0.17(根元)*	12個 (3色×4個)	320円
			ラウンド毛	10.0	0.18		
Check-Up 歯ブラシ standardタイプ M	180		スーパーテーパード毛	10.5*	0.18(根元)*	12個 (3色×4個)	320円
			ラウンド毛	10.0	0.20		

※実測平均値 *スーパーテーパード毛のため

商品名	販売名	容量/個	内装入数	メーカー希望 患者様向け 価格/個
Check-Up standard マイルドピュアミント	チェック・アップSTeA	135g	10個	600円
Check-Up standard マイルドシトラスミント	チェック・アップSTeB	135g	10個	600円

●フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない所に保管してください。※価格には消費税は含まれておりません

ライオン歯科材株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7 TEL.03(3621)6183

ライオン歯科材 | 検索 | <https://www.lion-dent.com/>

株式会社モリタ

2022.11.SEN

