

再着色は、防げる。



SERA BRIGHT

PMTC/
エナメルトリートメント

ちゃんとクリーニングしているのに、
どうして毎回再着色してしまうのだろう。
そう思ったことはありませんか？
この問題を解決する糸口は、

ナノレベルで 歯面性状を理解する

ことなのかもしれません。

そのカギは“エナメルトリートメント”

～エナメル質に、上質なトリートメントを～

エナメルトリートメントペースト セラブライト

定価 **¥2,400** (税込 ¥2,640)

傷ついたエナメル質に、 ナノレベルのトリートメントを。

日々の生活で傷つき汚れた歯面。
歯は日々過酷な環境に晒されています。

クリーニングで汚れは落とせても、傷までは元通りになりません。

使用するクリーニングペーストによっては、さらに傷をつけているかもしれません。

そのクリーニングペースト、研磨剤は入っていますか？どのくらいの硬さですか？どのくらいの粗さですか？

近年は、歯面に傷をつけずにクリーニングできると謳われるアイテムも登場してきました。

汚れを吸着するクリーニングペーストや、パウダーメンテナンス機器など。

MIなクリーニングが時代の主流になりつつあることは喜ばしいことです。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてほしいのです。

“元々あった傷”はどうなっていますか？

“傷をつけない”ということは、“傷をそのままにする”ということではありませんか？

『なぜ、歯面は何度も再着色してしまうのか？』

原因は、傷を残してしまった歯面性状にあるのかもしれません。

着色が少ない歯面のメンテナンスは、患者と術者双方の負担が軽減されます。

メンテナンスの時間効率も上がり、応じて人的コストや材料コストが下がります。

日々の生活で、歯面は想像以上に傷ついています。


目には見えなくとも、たくさんの凹凸があるのです。

傷ついたエナメル質に、ナノレベルのトリートメントを。

ただ美しくなめらかな歯面にするものではありません。

エナメルトリートメントの価値は、もっと深い。

再着色は、防げる。セラブライトの真骨頂です。

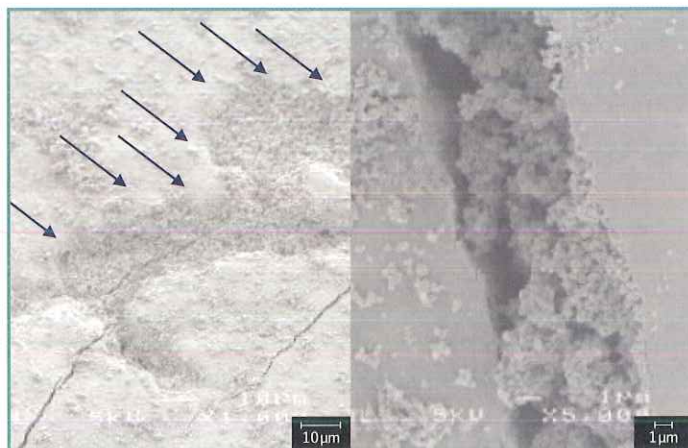

実験方法

一晚蒸留水に浸漬した抜去歯牙表面にnano-SHApを1日1回、7日間継続して、塗布→水洗を繰り返した。最後の塗布と水洗が完了した後、再度一晚蒸留水に浸漬し保存した。その後乾燥させ、表面に金を蒸着し、走査型電子顕微鏡(SEM)にて観察を行った。

結果

nano-SHApは歯面の傷などに効率的に充填され、水洗を行った場合でも溶解や脱落しにくいことが明らかになった。

自信をもって粒子サイズを公開しています。

そのエナメルトリートメント、本当に“小さい”ハイドロキシアパタイトですか？

特徴

- 01 日々の傷ついた歯面をより美しくなめらかに
- 02 歯面に広げやすく飛び散らない粘度
- 03 研磨剤フリーで歯面にやさしい
- 04 みずみずしく美味しいグリーンアップル味

特許取得


nano-SHAp とは？



nano-SHAp は各イオンが規則正しく配列した構造をしています。

c plane
(PO_4^{3-} site : negative charge)


a plane
(Ca^{2+} site : positive charge)

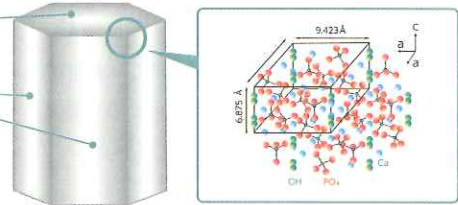

粒子を融着させずに焼成可能な独自技術

nano-SHAp

一般的な焼成法で得られた粒子

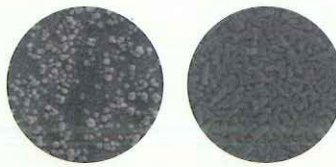

40nm 球状 150nm ロッド状

2種類のナノ粒子を配合



球状 ロッド状

融着しナノサイズを維持できない

ナノ粒子を焼成することで **強固なイオン結合が可能に**

使用方法

STEP 1

ペーストを準備する

セラブライトをトレーやダッペンディッシュに出し、停止したラバーカップやブラシですくうようにペーストを取ります。1歯に対して小豆大（5mm程度）の量が目安です。

STEP 2

ペーストを歯面にすり込む

歯面全体にしっかりとペーストをすり込みます。歯肉縁下にもゆっくり入れましょう。500～1000rpmの低速回転ですり込んでください。すり込む時間は1歯あたり3～5秒が目安です。

STEP 3

うがいをしてペーストを除去する

ペーストが口腔内に残留しても害はありませんが、気になるようならしっかりとうがいをしてペーストを洗い流してください。強くうがいしても効果に影響はありませんのでご安心ください。



写真提供：辻本デンタルオフィス（福岡市中央区）

セラブライト商品詳細

商品名	エナメルトリートメントペースト セラブライト
内容量	50g
包装	1本
香り	グリーンアップル
成分	精製水、ハイドロキシアパタイト、グリセリン、 シリカ、PEG-8、エタノール、セルロースガム、 ピロリン酸4Na、PEG-80水添ヒマシ油、 グリチルリチン酸2K、メントール、 香料(青りんご)、PVP、カラギーナン、 サッカリンNa、エチルパラベン、 o-シメン-5-オール
製造国	日本
分類	口腔化粧品
価格	2,400円 (税込2,640円)

口腔化粧品 / 歯みがき類とは？

歯みがき類と聞くと、一般向けの歯みがき粉を思い浮かべるかもしれませんが、歯みがき類の中には歯科用プロ向けの商品が多く存在しています。商品の区分をどのように設定するかは各メーカー様々な考え方があり、当社はセラブライトを「口腔化粧品 / 歯みがき類」としております。セラブライトは、歯みがき類に属した歯科用プロ向けの商品です。

仕上げには /
ナノハイドロキシ
アパタイト



販売元

株式会社 岡部
/OKABE Co., Ltd.

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間4-4-32
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070
<http://www.okabe118.co.jp>

ZIP CODE 815-0041
4-4-32, Noma, Minami-Ku, Fukuoka, Japan
TEL +81-92-561-8198 FAX +81-92-561-8070



ナノテクノロジーの力で
“エナメルトリートメント”
を新時代へ

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせください。