

商品説明



商品価格

- No.10010 ミスタースイッチ シングル **¥348,000** ¥382,800 (税込)
- No.10011 ミスタースイッチ ダブル **¥348,000** ¥382,800 (税込)
- No.10012 ミスタースイッチ ツイン **¥448,000** ¥492,800 (税込)

※1つの箇所に対して3台以上の取付が必要な場合はご相談ください。
※工事費が別途かかります。工事費は工事業者から直接ご請求させていただきます。

構成

- ミスタースイッチ本体 100V コンセント式
- ミスタースイッチ用ハンドリモコン
- IP カメラ 100V コンセント式
(モニターは付属しません。モニターとなるスマートフォンやタブレットをご用意ください。)
- 各種固定パーツ (取付パターンによって変わります。)



縦 126mm
横 42mm
重さ 65g
※電池を除いた重さ

【乾電池式】
単4形×2本

オプション

- No.10013 ミスタースイッチ用ハンドリモコン **¥38,000** ¥41,800 (税込)
- No.10014 ミスタースイッチ用フットリモコン **¥33,000** ¥36,300 (税込)
- No.10020 ミスタースイッチ用フットリモコン 3台セット **¥89,000** ¥97,900 (税込)

【乾電池式】
単4形×2本

※本体1台に対してリモコン1,000台までペアリング可能

リモコンの電波到達見通し距離 約 200m

※環境によって到達距離は変動します。電波の到達を保証するものではありません。
アンテナがない場合、到達距離は著しく短縮します。アンテナは必ずつけてください。



遠隔管理 スイッチシステム ミスタースイッチ



遠くにも見える。
遠くにも押せる。

遠くにも見える。

time is money

取付パターンは3種類

押す対象物の形状によっては取付ができないこともございます。

取付例1

パターン1 シングル

縦 90mm
(アンテナ含まず)

横 140mm

厚み 66mm



パターン2 ダブル


縦 90mm
(アンテナ含まず)

横 204mm

厚み 66mm



パターン3 ツイン

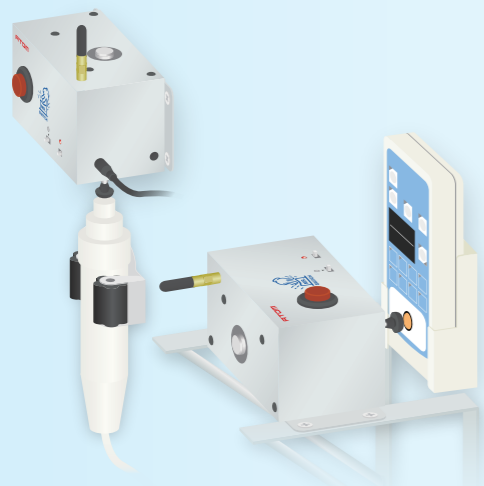

取付例2

パターン1 シングル




手が使えない状況でも
フットリモコンがあれば安心



パターン3 ツイン

緊急通報ボタンを離れた位置に2個設置

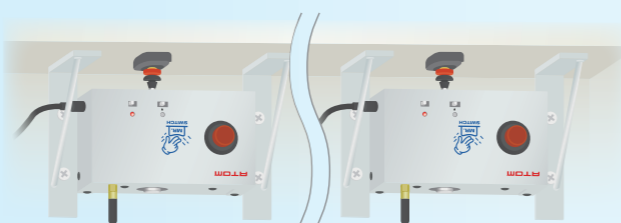


※イラストはイメージです。

使用方法

有資格者

① 室内に設置したIPカメラで位置づけを確認する

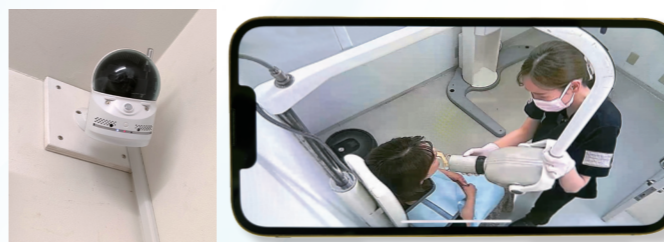

IPカメラの詳細情報はQRコードからご確認ください。

※IPカメラは仕入れ状況により予告なく変更される可能性があります。



② リモコンでミスタースイッチを操作し対象物を押す



リモコンワンプッシュで昇降機は降りたままになります。長押しが必要な場合でもワンプッシュで対応でき手間がありません。

スタッフ

③ 解除ボタンを押してミスタースイッチを元の位置に戻す



10回もしくは14回の操作が必要な場合は、①～③の作業を必要回数繰り返します。

リモコンでミスタースイッチを操作したあと他者が解除を行うシステムのため、解除のタイミングまで気にする必要がなくストレスがありません。

※リモコン側でミスタースイッチを元の位置に戻すことはできません。

コールバックランプ

※各種リモコンに搭載されたコールバックランプの点灯により、ミスタースイッチが正常に動作していることを確認できます。
※解除ボタンを押し忘れた場合でも、セーフティ機能が働き5分後に自動で昇降機が元の位置に戻るため安心です。



使い方動画



開発者コメント

私は歯科医師です。

例えば1年間で、レントゲン撮影のためにどのくらいの時間を要しているか計算してみたことはありますか？撮影と待機にかかる時間、レントゲン室への移動時間など、実は驚くほど多くの時間を費やしており、診療効率にも大きな影響を及ぼしています。

また、無資格者によるレントゲン撮影が度々取り沙汰される歯科業界の現状に以前から危機感を抱いており、診療放射線技師法違反で逮捕・起訴される歯科医師や歯科衛生士、歯科助手をゼロにすることはできないだろうかと考えていました。

『様々な場面において、周囲の状況を確認しつつ遠くにあるボタンを押すことができるシステムがあれば、多くの人の助けになるのではないかと。』

そんな想いから、ミスタースイッチは生まれました。

