

TASK

SINCE 1968

歯科医院用 タンパク分解・洗浄剤（防錆）

インスツルメント
ユニット周り
義歯・リテーナー
バキューム...etc

幅広い用途に！

酵素と
オキシドール成分
Wパワー！

スプレーでも

浸漬でも

安くて頼れる洗浄剤

タスククリーン

TASKLEAN

初回数量限定

専用スプレーボトル(500ml)
プレゼント！

CODE: 19200

内容量：500g

付属スプーン(5g)付き





優れたタンパク分解と洗浄力

『オキシドール成分』と『酵素』の力で、血液などのタンパク質を強力に分解します。

アルコール、漂白剤、蛍光増白剤、防腐剤を含有しないので、器材や環境に優しく、材質を選ばずにお使いいただけます。

界面活性剤の含有率も約8%に抑えていますので、“弱アルカリ性”で泡切れも良く、**水洗作業が簡単**です。

マイクロパウダー状で**素早く溶ける**ため、作業効率もバッチリ！

オキシドール成分



酵素




様々な用途に

通常の洗浄剤としての使用はもちろん、院内の様々な用途にお使いいただけます。

インスツルメント全般
 リテーナー
 義歯
 バキューム
 ユニット周り
 シリコン・ゴム
 ガラス製品
 バー
 リーマー
 院内着

写真提供:ブライト矯正歯科(鎌倉市)

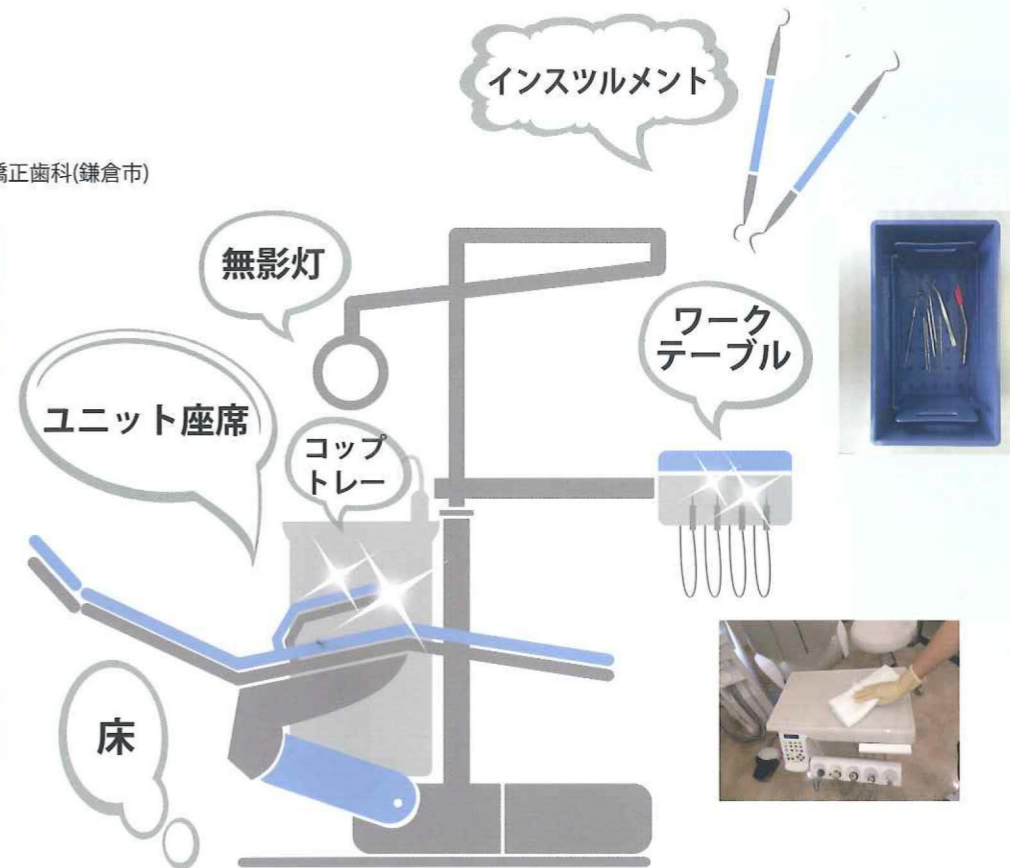

よくある質問

? 滅菌をするのに、洗浄をする必要があるの?

A 器具の滅菌の前に、しっかりと洗浄を行って有機物などを除去することにより、より確実な滅菌ができます。また洗浄で事前に汚れを落としておくことで、器具のサビなどのトラブルを防ぐこともできます。

? 主な成分は?

A オキシドール成分、酵素、カルボン酸、非イオン界面活性剤(約8%)、金属封鎖剤他
 ※漂白剤、蛍光増白剤、塩素、防腐剤、アルコールは非含有です

? 界面活性剤の含有率が約8%というメリットは?

A 界面活性剤の含有量を抑えることで泡立ちが少なく、すすぎの際の泡切れが良好です。また手肌や環境にも優しく、より多くの材質に対応することができます。

? 粉状だが、溶け残りの心配は?

A 微粒子のマイクロパウダー状ですので、素早く溶けます。酵素を配合していますので、40℃以下のぬるま湯に溶かすと洗浄効率が高まります。

? 希釈液の交換の目安は?

A 通常の洗浄液と同じく、使用した液は一日一回程度交換をしてください。汚れのひどい場合には、交換回数を調整してください。

? どの程度タンパク質を分解できるの?

A 第三者機関による汚染血液による除タンパク効果試験の結果、400倍希釈の超音波洗浄(10分)で**99.1%**、200倍希釈の浸漬洗浄(10分)で**98.3%**のタンパク除去が可能です。

? 洗浄後の注意点は?

A 必ずしっかりと水洗し、希釈液が残留しないようにしてください。その後水分を除去し、濡れたまま放置しないようご注意ください。

? ユニット周りの清掃に適している理由は?

A 血液などのタンパク質を分解し、汚れを落とす作用に優れています。また一般家庭用洗剤レベルの安全な成分ですので、ほとんどのユニットの材質に適応します。

? 使えない素材は?

A 皮革、ウール、絹、ニス系の家具、象牙、宝石、真珠、オパール等

? バキュームやスピットンの洗浄方法は?

A 希釈液を約300cc吸引させ、一晩放置してください。その後十分に水を吸引させて洗い流してください。

タスクリーン TASKLEAN 使用方法



このページを、院内に貼ってお使いください

超音波洗浄

浸漬 10分～

400倍希釈

水 2ℓ に付属スプーン 1杯 (5g)

※器具・器材の汚れ具合によって洗浄方法を選択してください。使用後ただちに洗浄することをおすすめいたします。

浸漬洗浄

浸漬 10分～

200倍希釈

水 2ℓ に付属スプーン 2杯 (10g)

※洗浄液は、一日一回の頻度で交換してください。

※汚れ具合によって、洗浄時間を調整してください。

流水すすぎ 水分除去

※十分なすすぎと水分除去を行ってください。洗浄後に水分が残留したまま放置すると錆等の原因になります。

スプレーする場合



500ml ボトルに
付属スプーン 1杯 (5g)

滅菌

オートクレーブ滅菌など

<お問い合わせ>



歯科用インスツルメント
株式会社 **タスク**

〒114-0024 東京都北区西ヶ原 2-44-10 アクト西ヶ原 4F
TEL: 03-3915-2413 FAX: 03-3915-3182

<http://www.task-inc.net>

新製品のご紹介・カタログのダウンロード、
お得なセールの情報などは、ホームページで！

