

# ZOO新カタログ

※カタログ記載の価格は2022年9月1日以降の新価格です。

**ZOOは 10秒** で装着完了!!  
**ラバーダムと同等の口腔内湿度に出来ます!**

## 特徴①

aシリーズのミニバキュームは根管吸引・乾燥等に使用出来ます! ペーパーポイントの使用は1~2本ですみます。



バネを軽く噛んで固定・安定させます!  
バネが開口状態を維持します。

## 特徴②

## 分かりやすい! ZOOの選び方

- ①最初に、ZOOシリーズ・ZOOaシリーズ・C-ZOOシリーズ・C-ZOOaシリーズを選びます (p2~p5)
- ②続いて、バネの大きさZOO(大)/ZOO JR(中)/ZOO ミニ(小)の3サイズの中から大きさを決めます  
\* はじめて使用される方は**ZOOミニ**がオススメです! (大人から子供まで使えます)  
\* 二種類ならZOOミニとZOO JRがオススメです!
- ③最後に、お使いのチェアーのバキュームサイズ11mmか16mmかを調べます  
オサダはオサダ専用を選びます  
11mm ・ 16mm ・ 11mm (オサダ専用)  
モリタ製10mmのバキュームを使用の方は、ZOO11mmを選んでください。  
通常は11mmで使用出来ますが、11mmのZOOが外れやすい場合は、モリタ用のアダプター (p6) を装着して頂くと外れにくくなります  
\* **ZOOシリーズは全てオートクレーブ可能です!**

# ZOOシリーズ (ズーシリーズ)

## 一番シンプルでスタンダードなZOO







ZOO(大) ZOO JR(中) ZOOミニ(小)の3サイズあります

コネクターもバキュームの直径に合わせて3種類あります (11mm・16mm・11mmオサダ専用)

**最初はZOOミニがオススメです！(大人から子供まで使えます)**

バネの大きなZOOやZOO JRは開口量を大きく出来ます

## ZOOシリーズ (ミニバキューム無し・コントローラー無し)

品名	商品写真	新価格
Zoo11mm ・バネ大 ・バキューム直径11mm		¥18,000 (¥19,800税込)
Zoo11mmショート〔バネ大〕	オサダ専用	
Zoo16mm ・バネ大 ・バキューム直径16mm		
Zoo JR11mm ・バネ中 ・バキューム直径11mm		
Zoo JR11mmショート〔バネ中〕	オサダ専用	
Zoo JR16mm ・バネ中 ・バキューム直径16mm		
Zoo MINI11mm ・バネ小 ・バキューム直径11mm		
Zoo MINI11mmショート〔バネ小〕	オサダ専用	
Zoo MINI16mm ・バネ小 ・バキューム直径16mm		

# ZOOαシリーズ (ズーアルファシリーズ)

吸引管(ミニバキューム)がついたZOO

エンドに人気のαシリーズ!!







ZOOにもう1本のチューブ(ミニバキューム)がついたモデル

根管治療をZOO環境下で行いたい先生にお薦めです

先に色々なチップを付け吸引することの出来るのでとても便利です

根管吸引・根管乾燥にも使用出来ます。口腔内に溜まった水も吸う事もできます

## ZOO αシリーズ (ミニバキューム付き・コントローラー無し)

品名	商品写真	新価格
Zoo α11mm ・バネ大 ・バキューム直径11mm		¥22,000 (¥24,200税込)
Zoo α11mmショート〔バネ大〕	オサダ専用	
Zoo α16mm ・バネ大 ・バキューム直径16mm		
Zoo JR α11mm ・バネ中 ・バキューム直径11mm		
Zoo JR α11mmショート〔バネ中〕	オサダ専用	
Zoo JR α16mm ・バネ中 ・バキューム直径16mm		
Zoo MINI α11mm ・バネ小 ・バキューム直径11mm		
Zoo MINI α11mmショート〔バネ小〕	オサダ専用	
Zoo MINI α16mm ・バネ小 ・バキューム直径16mm		









# C-ZOOシリーズ (シーズーシリーズ)

## 吸引力を無段階に調整出来るコントローラーが付いたZOO

ZOOのパキュームコネクターに吸引力を無段階に調整するコントローラーを付けたシリーズです。長時間の治療を行う場合、吸引力を調整する事により、口腔内が乾燥しすぎるのを防止できます

またセメントや歯面に塗布した薬剤などのチューブ内への吸引を防止します

## C-ZOOシリーズ (ミニパキューム無し・コントローラー付き)

品名	商品写真	新価格
C-Zoo11mm ・バネ大 ・パキューム直径11mm		¥23,000 (¥25,300税込)
C-Zoo11mmショート〔バネ大〕	オサダ専用	
C-Zoo16mm ・バネ大 ・パキューム直径16mm		
C-Zoo JR11mm ・バネ中 ・パキューム直径11mm		
C-Zoo JR11mmショート〔バネ中〕	オサダ専用	
C-Zoo JR16mm ・バネ中 ・パキューム直径16mm		
C-Zoo MINI11mm ・バネ小 ・パキューム直径11mm		
C-Zoo MINI11mmショート〔バネ小〕	オサダ専用	
C-Zoo MINI16mm ・バネ小 ・パキューム直径16mm		

人気

人気







人気

# C-ZOOαシリーズ (シーズーアルファシリーズ)

**全ての機能(ミニバキューム+コントローラー)が付いた最高級機種**

この1台でレジン充填から根管治療まで行うことができます

## C-ZOO αシリーズ (ミニバキューム付き・コントローラー付き)

品名	商品写真	新価格
C-Zoo α 11mm ・バネ大 ・バキューム直径11mm		¥27,000 (¥29,700税込)
C-Zoo α 11mmショート [バネ大]	オサダ専用	
C-Zoo α 16mm ・バネ大 ・バキューム直径16mm		
C-Zoo JR α 11mm ・バネ中 ・バキューム直径11mm		
C-Zoo JR α 11mmショート [バネ中]	オサダ専用	
C-Zoo JR α 16mm ・バネ中 ・バキューム直径16mm		
C-Zoo MINI α 11mm ・バネ小 ・バキューム直径11mm		
C-Zoo MINI α 11mm ショート [バネ小]	オサダ専用	
C-Zoo MINI α 16mm ・バネ小 ・バキューム直径16mm		

### ポイント!!

最初は**C-ZOO MINI α** からスタートして下さい。

使用してミニバキュームを使わないなら→追加はC-ZOOシリーズを選んで下さい。

コントローラーを使わないなら→ZOO αシリーズを選んで下さい。





ミニバキュームもコントローラーも使わないなら、ZOOシリーズを選ばれるとよいです。

しかし、**実際に臨床で使ってみると**思っている以上にミニバキュームやコントローラーを使っている事にお気づきになると思います。

# ZOO交換用チューブセット

シリコンチューブは消耗品です。定期的な交換で美しく清潔になります。交換は簡単です！

## チューブセット (交換用チューブセット ワイヤー付き)

品名	商品写真	新価格
Zoo・ZooJR用 C-ZOO・C-ZOOJR用 4本入り		¥9,500 (¥10,450税込)
ZooMINI・C-ZOOMINI用 4本入り		
Zooα・ZooJRα用 C-ZOOα・C-ZOOJRα用 2組入り		
ZooMINIα・C-ZooMINIα用 2組入り		

## アダプター・ノズル・スプリング (オートクレーブ可能)

11→16mm変換アダプター 11mmのZOOを16mmのバキュームで 使用出来ます		¥6,000 (¥6,600税込)
排唾管アダプター11mm (バキューム11mm用) 11mmのZOOを排唾管に接続		
排唾管アダプター16mm (バキューム16mm用) 16mmのZOOを排唾管に接続		
モリタ用専用アダプター 11mm→10mm ZOO11mmをモリタチェアー(10mm) に変換するアダプター		
ノズル (チタン製)	ミニバキュームの金属ノズル	¥3,500 (¥3,850税込)
ノズルキャップ (オートクレーブ可能)	金属ノズルの白いキャップ	¥2,000 (¥2,200税込)
スプリング	各種スプリング	¥14,000 (¥15,400税込)



## \*チューブセットが付いたお得なセットシリーズ\*

### ZOOシリーズセット（ズーシリーズセット）

注）本体は同じ種類になります。異なるバネの大きさの組み合わせは出来ません。

#### Aセット（本体3本、チューブセット1箱）各59,400円（税込み）

単品より  
10,450円 お得

品名		バキューム直径		
ZOO・ミニ（バネ小）	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO・JR（バネ中）	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO（バネ大）	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用

#### Bセット（本体5本、チューブセット2箱）各99,000円（税込み）

単品より  
20,900円 お得

品名		バキューム直径		
ZOO・ミニ（バネ小）	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO・JR（バネ中）	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO（バネ大）	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用

### ZOOαシリーズセット（ズーアルファシリーズセット）

注）本体は同じ種類になります。異なるバネの大きさの組み合わせは出来ません。

#### Aセット（本体3本、チューブセット2箱）各72,600円（税込み）

単品より  
20,900円 お得

品名		バキューム直径		
ZOO・ミニα（バネ小）	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO・JRα（バネ中）	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO・α（バネ大）	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用

#### Bセット（本体5本、チューブセット3箱）各121,000円（税込み）

単品より  
31,350円 お得

品名		バキューム直径		
ZOO・ミニα（バネ小）	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO・JRα（バネ中）	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
ZOO・α（バネ大）	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用

## ZOO倶楽部 会員募集中！

ZOO倶楽部は

- \*ZOO最新情報
- \*ZOOの便利な使い方
- \*ZOOユーザーの先生から頂いた情報
- \*YouTube情報 等の情報を発信させていただくための倶楽部です。

名前とメールアドレスだけで簡単に入会できますので多くの方の参加お待ちしております。

ZOO倶楽部はこのQRコードから簡単に入会できます！

もちろん入会費・年会費は無料です！



# \*チューブセットが付いたお得なセットシリーズ\*

## C-ZOOシリーズセット (シーズーシリーズセット)

注) 本体は同じ種類になります。異なるバネの大きさの組み合わせは出来ません。

### Aセット (本体3本、チューブセット2箱) 各75,900円 (税込み)

単品より  
20,900円 お得

品名		バキューム直径サイズ		
C-ZOO・ミニ (バネ小)	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO・JR (バネ中)	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO (バネ大)	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用

### Bセット (本体5本、チューブセット3箱) 各126,500円 (税込み)

単品より  
31,350円 お得

品名		バキューム直径サイズ		
C-ZOO・ミニ (バネ小)	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO・JR (バネ中)	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO (バネ大)	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用

## C-ZOOαシリーズセット (シーズーアルファシリーズセット)

注) 本体は同じ種類になります。異なるバネの大きさの組み合わせは出来ません。

### Aセット (本体3本、チューブセット2箱) 各89,100円 (税込み)

単品より  
20,900円 お得

品名		バキューム直径サイズ		
C-ZOO・ミニα (バネ小)	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO・JRα (バネ中)	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO・α (バネ大)	Aセット	11mm	16mm	オサダ専用

### Bセット (本体5本、チューブセット3箱) 各148,500円 (税込み)

単品より  
31,350円 お得

品名		バキューム直径サイズ		
C-ZOO・ミニα (バネ小)	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO・JRα (バネ中)	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用
C-ZOO・α (バネ大)	Bセット	11mm	16mm	オサダ専用

認証番号:21100BZZ00012000 特許:第2766830号・第4585246号 アメリカ特許:第7261560号 製造販売元:㈱シオダ

<b>内外歯材株式会社</b> <b>本社</b> 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2丁目3-10 TEL: 06-6771-5553 FAX: 06-6779-7518	<b>内外歯材株式会社</b> <b>名古屋営業所</b> 〒464-0075 名古屋市千種区内山1丁目2-6 TEL: 052-741-7011 FAX: 052-741-7014
---	--

APT<sub>アプト</sub> 商品センター TEL: 042-860-0461 FAX: 042-860-0462

www.apl-inc.jp/zoo/ 「歯科 ZOO」で検索!

アプトホームページで動画をご覧いただけます。YouTube内で「バキュームチップZOO」で検索動画をご覧いただけます。