




# エルゴフィンガー

## 術者と患者さん双方に優しい フィンランド生まれのバキュームアダプター

### エルゴフィンガーのメリット

- エルゴノミック（人間工学）なデザインで身体に負荷をかけない
- バキューム操作が簡単
- 操作性の向上で快適な診療
- アシストの必要が少なくなり経費削減
- 術者の不要な動作が減ることによる処置の効率化と時間短縮
- ディスポーザブルで患者さんへの感染予防を徹底

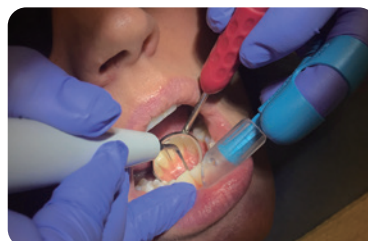

エルゴフィンガーを用いたバキュームテクニック。指先を使う感覚での操作が可能。姿勢も良く、身体に無理がかからない。

ミラー視を行いながらバキューム操作が可能。  
(下顎前歯舌側)


バキューム操作を行いながら、頬粘膜や口唇の排除が可能。



通気孔があり  
粘膜の吸引を防ぐ

**One Point!** 通常はエルゴフィンガーを人差し指に装着しますがミラーを併用する際はエルゴフィンガーを中指に装着します

5mm から 10mm まで3段階に長さを調節

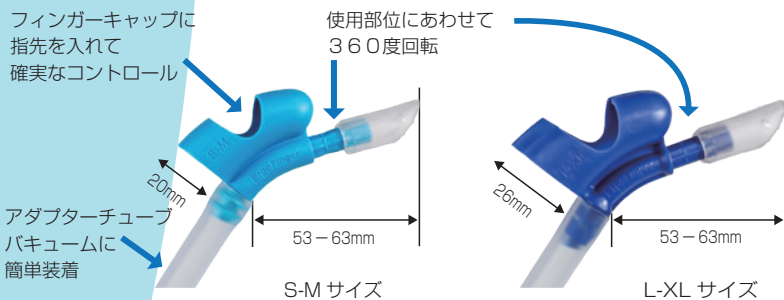

動画はこちらでご確認ください

- \* 直径 11mm のバキュームに対応
- \* 使用の直前にフィンガーキャップをアダプターチューブに差し込んでください
- \* サイズ選びの目安 女性 S-M サイズ、男性 L-XL サイズ
- \* アダプターチューブ 148mm
- \* 素材 PVC

商品名 **エルゴフィンガー** 医療機器届出番号 13B1X00133000067  
**S-M サイズ** 標準価格 9,900円 (税別) /50本入 (@198/本)  
**L-XL サイズ** 標準価格 9,900円 (税別) /50本入 (@198/本)

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
 URL : <http://www.crossf.com> E-mail : [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)  
 製造販売元：株式会社吉田製作所

お問い合わせは



# エルゴフィンガーから パウダークリーニング専用ノズルが登場 !!

## エルゴフィンガー エアフロー用ノズル

\* エルゴフィンガーのノズル部分だけ交換して使用します



### エルゴフィンガー エアフロー用ノズルのメリット

- ノズルの先がより広くなりパウダーを効果的に吸引
- 口腔外への吸引パウダーの飛散を大幅に軽減
- 飛散を軽減することで感染予防効果が更にアップ
- 患者さんに快適なパウダークリーニングを提供



上顎前歯唇側




下顎前歯唇側




上顎前歯口蓋側

### エアフロー用ノズルの装着方法

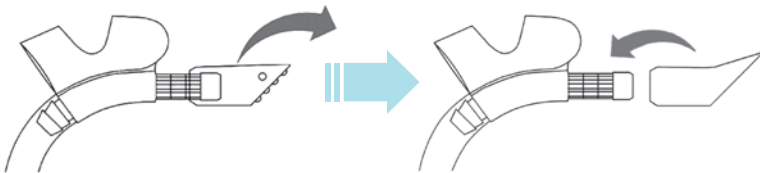

① フィンガーキャップ部に  
ついているノズルを引っ張り外す

② エアフロー用ノズルを差し込む

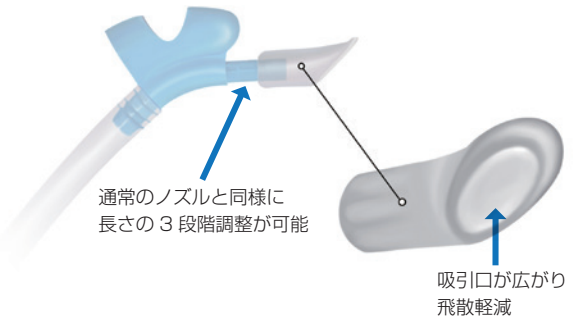

通常のノズルと同様に  
長さの3段階調整が可能

吸引口が広がり  
飛散軽減

\* エルゴフィンガーの詳細は裏面に記載

### ノズルのサイズ比較

\*実寸大



\* ノズルのみの販売になります

医療機器届出番号 13B1X00133000067

商品名 **エルゴフィンガー エアフロー用ノズル**

標準価格 2,400円 (税別) /50 個入 (@48円/個)

\*S-M / L-XL サイズ共通 (ノズルの挿入径は同じ大きさです)



エアフロー用ノズルの使用方法  
動画はこちらをご覧ください