

# サラヤ環境清拭クロス

## タンパク・油脂汚れを除去

洗浄・除菌が一度にできる  
様々な環境表面の清掃に

第四級  
アンモニウム塩  
配合



80枚入 ピロータイプ  
1枚サイズ:150×230mm



250枚入 容器 大判クロス  
1枚サイズ:150×300mm

### 製品特徴


1. 配合成分と相性のよいクロスを使用しています。
2. 洗浄成分が汚れを浮かして除去します。
3. 第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮します。
4. 金属やプラスチックへの腐食が少なく、  
においがほとんどありません。
5. 二度拭きが要りません。

### サラヤ環境清拭クロスの性能評価

サラヤ環境清拭クロスはタンパク汚れ、油脂汚れそれぞれに対して高い洗浄力を有します。


#### ① タンパク汚れに対する洗浄力

硬質表面にタンパク汚れを付着させ、乾燥させた後にサラヤ環境清拭クロスで清拭。

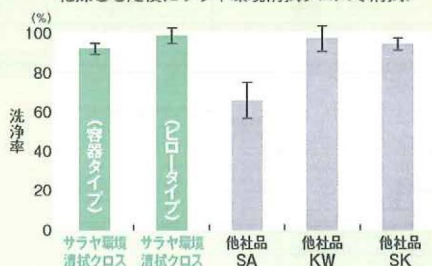

#### ② 油脂汚れに対する洗浄力

硬質表面に油脂汚れを付着させ、乾燥させた後にサラヤ環境清拭クロスで清拭。

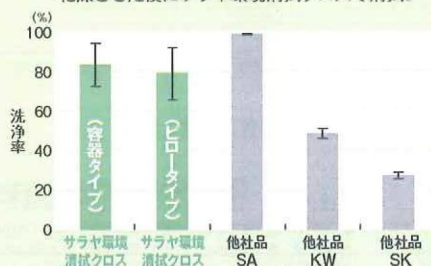

# 医療施設・介護施設の環境清拭に サラヤ環境清拭クロス

開封日記録シール付き



250枚入 容器

フタに開封日が書き込める記録シールが付いています。

詰替えるたびに新しい取り出し口に交換できます



250枚入 詰替

詰替1袋にフタが1コと開封日記録シールが付いています。



80枚入 ピロータイプ

フタに開封日が書き込めます。



## 用途

ドアノブ・ベッド柵・オーバーテーブル・ME機器など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌に。



ME機器に



処置台に



ベッド柵、オーバーテーブルに



注射台に

## 使用上の注意

- 乾燥を防ぐために使用後はフタをしっかりと閉めてください。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがありますので、目立たない部分で試してから使用してください。
- 機器などに使用のときは機器付属の「取扱説明書」をご覧ください。
- この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。
- 使用時には手袋を着用してください。
- 不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 使用している不織布の性質上、経時的に不織布が変色することがありますが、使用上問題ありません。

## 保管上の注意

- 熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざける。禁煙。
- 換気のよい涼しい場所で保管する。容器を密閉しておく。
- 子どもの手の届かない所に保管する。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	JANコード
	250枚入 容器	6	49-87696-44156-9
	250枚入 詰替	6	49-87696-44157-6
	80枚入 ピロータイプ	30	49-87696-51683-0

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2016年4月現在のものです。

## サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL .06-6797-2525

ご用命は



## 販売代理店 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288