



感染予防は手洗いから…手洗い方法の確認に

手洗い

チェッカー

LED

専用ローションを手についた汚れに見立てて、専用ライト下で光らせます。
適切な手洗いが実施できているか確認できます。
専用ライトはLEDを採用していますので、従来の蛍光管タイプと
比較して電池寿命が約4倍長持ちします。



洗い残しが光ります

セット内容

- ① 手洗いチェッカー 本体
- ② ブラックライトLED
乾電池は付属しておりません。
単3乾電池×4本は別途お買い求めください。
- ③ 手洗いうけけん液
シャボネットユ・ムS 250mL 1本
- ④ 手洗いチェッカーローション 250mL 2本

コンパクトに
収納できます

単品でも取り扱っています。

ブラックライトLED

手洗いチェッカーLED付専用ライトの単品商品です。
既にご購入の「手洗いチェッカー」にも使用可能です。

※本商品には乾電池は同梱されていません。単3乾電池×4本は別途お買い求めください。

手洗いチェッカーの使用法



専用のローションをワンブッシュ
(約1mL)手に取り、まんべん
なくぬり広げます。



手洗いうけけん液を使って、
普段通りの手洗いをします。



専用ライトを取り付けた本体に
手を入れます。



洗い残した部分が光ります。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
手洗いチェッカーLED	1セット	1	41338	49-87696-41338-2

**安全にご使用
いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。



販売代理店 **株式会社日本歯科商社**

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

ご用命は