



VIVAace

訪問歯科診療ユニット

## デンタルワークに、フットワークを。

もっと快適で高度な、訪問歯科診療のために。

加速する高齢化社会、訪問診療のニーズはますます高まっています。また高齢者の残存歯数も増加し、訪問先においても幅広い治療が求められています。VIVA aceは、多目的に使用できる高性能マイクロモーターや超音波スケーラーなど、診療室と変わらない治療環境をコンパクトに凝縮。軽量で女性でも持ち運びやすく、訪問先での設置も簡単。これまでになかった高度な機動性で、より快適な訪問歯科診療をサポートします。



軽量&コンパクトボディー



診療室と変わらない高機能システム



セッティング・撤収も簡単スピーディー





より軽快な訪問歯科診療を可能にする、  
軽量・コンパクト設計。

### 軽量・コンパクトで移動も容易。


女性でもラクに扱える軽量8.6kg。車での積み降ろしや、階段の昇り降りもラクに行えます。また、狭い場所でもラクに通れるコンパクトサイズ。訪問先から訪問先への移動も容易です。

高さ  
28.4cm

奥行き  
29.8cm

幅  
46.2cm

### どこにでも持ち運べる軽量8.6kg\*。

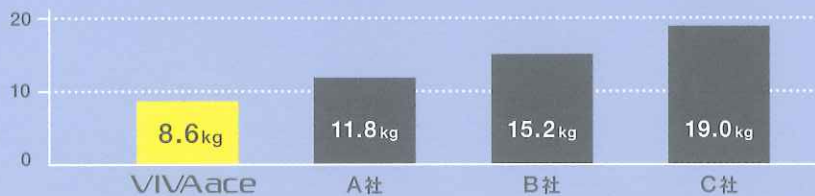

\*ハンドピース類を外した重量。



先進の  
歯科治療機器を  
コンパクトな  
ボディに  
凝縮


スリムボディの多目的超音波スケーラー

エンドモードにも対応する高機能マイクロモーター

バキューム

3way シリンジ

視認性に優れた直感的操作パネル

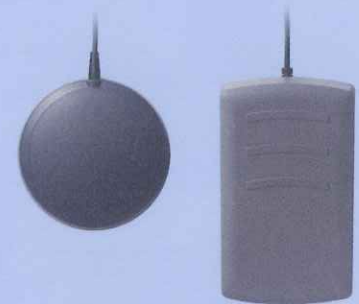

フレキシブルな  
フットコントロールシステム






診療室と変わらない、高性能システムを搭載。

義歯調整から、う蝕治療、エンド治療、スケーリングまで、あらゆるニーズに対応。

## エンドモードにも対応する高性能マイクロモーター

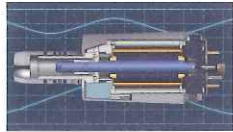

高トルク、スムーズな回転、高い静寂性

独自技術の180度ベクトルモーター制御により、高速から低速まですべての回転域で高いトルクとスムーズな回転を実現。歯科治療で求められるあらゆるニーズに対応します。

### エンド治療にも幅広く対応

0.3~3.0までのトルク設定が可能。エンド治療に適した、オートストップ、オートリバース機能を搭載。等速(1:1)コントラングルを用い、エンド治療を行うこともできます。



一般切削モード



エンドモード

	一般切削モード	エンドモード
回転速度	1,000~40,000 min <sup>-1</sup>	100~5,000 min <sup>-1</sup>
トルク値	4.0Ncm	0.3~3.0Ncm

## スリムボディの多目的超音波スケーラー



Varios2 Lux LED



### ナカニシ独自のiPiezoエンジン搭載

硬い歯石や柔らかい歯石など、歯面の状態に合わせて、常にチップ先端に適正なパワーを供給。取れにくい歯石にも安定したスケーリングが可能です。(フィードバック機能/オートチューニング機能)



### 多彩なチップラインナップ

歯石除去以外にも初期う蝕除去や根管治療など、多彩な治療に対応できるよう70種類以上のチップをご用意しています。



スケーラーモード

さらに充実した診療を可能にする、オプション機器。

## 手軽な歯科用照明器具 isoE-LUX (オプション)



### 高い照度と操作しやすいスリムデザイン

訪問診療先の環境にかかわらず、口腔内を明るく照射します。スリムボディによる高いアクセス性で、見えにくい部分にもアプローチが可能。ピンポイントに観察できます。マイクロモーターのLEDライトを利用するため、バッテリー切れなどの心配もありません。



近接で照射し観察

## 吸引歯ブラシ (オプション)



強い吸引力で誤嚥を防止。コンパクトなヘッドと長くて安定感のあるハンドルは、高いアクセス性と操作性を実現します。



診療体制に合わせて選べる、フレキシブルなフットコントロールシステム。

### ドクター1人体制の診療に

#### 1台で2つの操作が同時にできるフットコントロール

Syncモードにより、モーター・スケーラーとバキュームのonとoffがひとつのフットコントロールで操作できます。

モーター・スケーラー  
バキューム




### ドクター+歯科衛生士 2人体制の診療に

#### バキューム専用のフットコントロール

モーター・スケーラーのon/offと、バキュームのon/offを2つのフットコントロールで操作。2つを組み合わせることで、ドクターはモーター・スケーラーの操作だけに専念できます。

モーター・スケーラー

バキューム

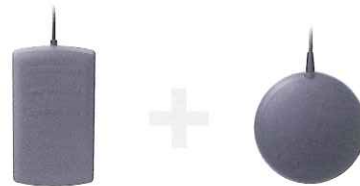


# EASY STEP SETTING

セッティングから撤収まで、すべてが簡単でスピーディー。


訪問診療先での設置と撤収が、短時間で簡単に行えるので効率的です。  
ホルダーバーとホルダーアームは、4段階の調整が可能です。

OPEN

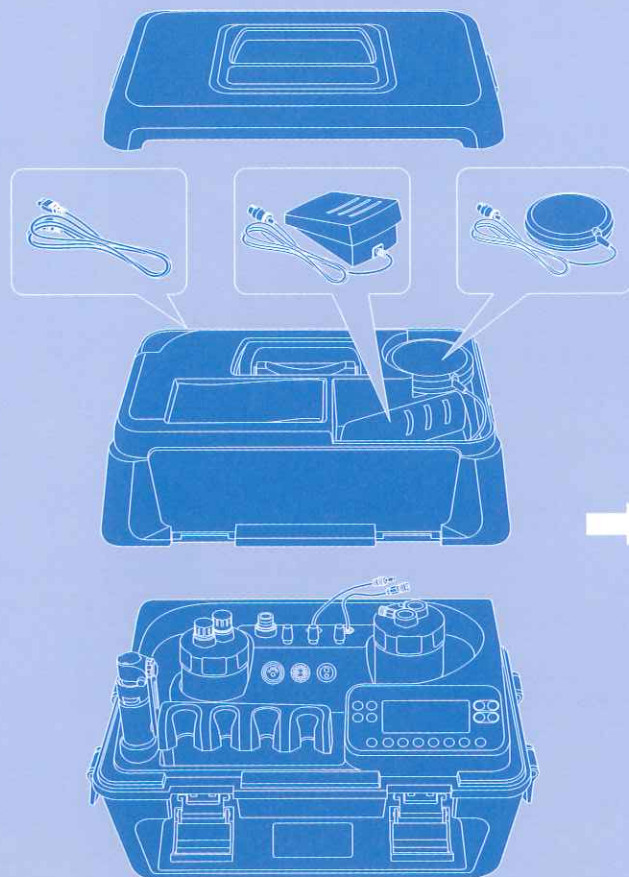

床に触れるパーツは  
カバー部分に別収納なので衛生的

SET UP

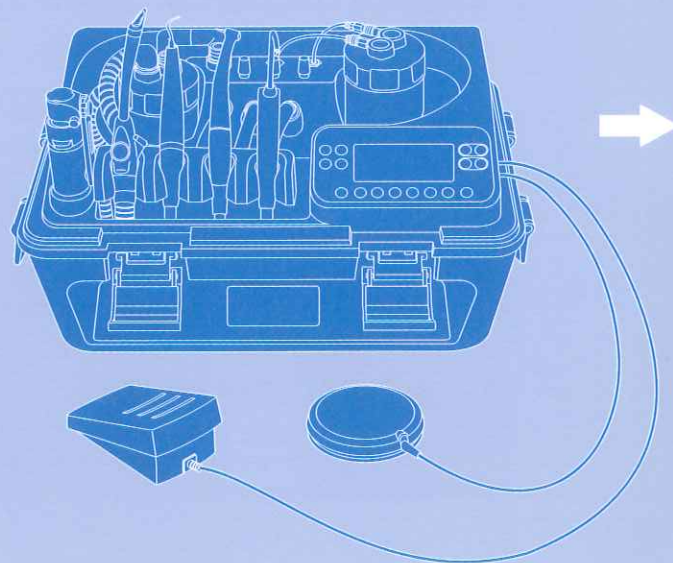



## 高さ・角度4段階調整

立位、座位等、さまざまなポジションに合わせて調整可能



4  
3  
2  
1



COMPLETE



お手入れもラクにできる



収納も簡単

ハンドピースを外して、スッキリ収納

# VIVAace コンプリートセット



製品名 ビバエース コンプリートセット

製品番号 Y1003571

仕様：コントロールユニット	
寸法	W462 x D298 x H284 mm
総重量	8.6 kg
電源	AC100-240V 50/60 Hz
電源入力	130VA

#### 【セット内容】

- コントロールユニット ● ACコード ● フットコントロール(FC-76S) ● フットコントロール(FC-70S)
- トップケース ● V-ace バキュームホースセット(ホース/バルブ付き) ● V-ace バキュームボトルセット
- V-ace バキュームノズル(10本) ● V-ace 注水ボトルセット ● V-ace 3way シリンジセット
- V-ace ショルダーベルト ● モーターキット(モーター NLX plus/モーターコード/他)
- スケーラーキット(ハンドピース VA2-Lux/スケーラーコード/チップ(G6,G8)/他)

## SET OPTIONS

製品名	製品	製品番号
ビバエース ベーシックセット		Y1002903
ビバエース モーターキット		E1040002
ビバエース スケーラーキット		E351006

#### 【セット内容】

- コントロールユニット ● ACコード ● フットコントロール(FC-76S) ● フットコントロール(FC-70S)
- トップケース ● V-ace バキュームホースセット(ホース/バルブ付き) ● V-ace バキュームボトルセット
- V-ace バキュームノズル(10本) ● V-ace 注水ボトルセット ● V-ace 3way シリンジセット
- V-ace ショルダーベルト

#### 【セット内容】

- モーター NLX plus ● モーターコード ● モーターキャップ ● プロテクションプラグ




#### 【セット内容】

- ハンドピース VA2-Lux ● スケーラーコード ● チップ(G6, G8) ● チップ交換レンチ ● チップホルダー

販売名:ビバエース 一般的名称:可搬式歯科用ユニット 認証番号:227ABBZX00112000 管理医療機器  
販売名:NLX プラス 一般的名称:歯科用電気回転駆動装置 認証番号:221ALBZX00019000 管理医療機器  
販売名:バリロス 170 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 認証番号:223ALBZX00036000 管理医療機器

## OPTIONS

製品名	製品	製品番号
Z95L (増速 1:5、切削用)		C1034
Z25L (等速 1:1、切削用)		C1038
X65L (等速 1:1、ストレート)		H273
X57L (減速 16:1、プロフィー用)		C609

製品名	製品	製品番号
isoE-LUX		Z1265
吸引歯ブラシキット (10キット)		U1144089
V-ace バキュームノズル (10本セット)		U1144088

販売名:チーマックス ZC 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:222ALBZX00006000 管理医療機器  
販売名:チーマックス XS 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:219ALBZX00014000 管理医療機器  
販売名:チーマックス XC 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:219ALBZX00013000 管理医療機器  
販売名:isoE-ラックス 一般的名称:歯科用口腔内手術灯 届出番号:09B2X00016000150 一般医療機器

## SPARE PARTS

製品名	製品	製品番号
V-ace バキュームホースセット		U1144074
V-ace バキュームボトルセット		U1144070
V-ace 3way シリンジセット		U1144040
V-ace 3way シリンジノズル		U1144046
V-ace バキューム中継ホース		U1144753
バキュームキャップA		U1144750
バキュームキャップB		U1144751
ホースキャップ		U1144752

製品名	製品	製品番号
V-ace 注水ボトルセット		U1144080
FC-76S		Z1082003
FC-70S		Z1008004
ACコード		U435550
V-ace ショルダーベルト		U1144370
蓋バックン		U1144729
フィルター		U1144727

株式会社 **ナカニシ** [www.nsk-nakanishi.co.jp](http://www.nsk-nakanishi.co.jp)

本社・工場 〒322-8666  
栃木県鹿沼市下日向700  
TEL:0289(64)3380  
FAX:0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015  
東京都台東区東上野4-8-1  
TIXTOWER UENO 9F  
TEL:03(5828)4180  
FAX:03(5828)0064

大阪事務所 〒530-0057  
大阪市北区曽根崎2-12-7  
清和梅田ビル 10F  
TEL:06(6315)7217  
FAX:06(6315)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール  
受付時間(土日祝日を除く)  
9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**  
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも  
お気軽にお寄せください。

***NSK***

CREATE IT.