

コンフォート ティッシュコンディショナーⅢは、
義歯治療における様々なシーンをサポートします。

義歯床用粘膜調整材(機能印象材)

TISSUE 1-1 SET CONDITIONERⅢ

コンフォート ティッシュコンディショナーⅢ

粘膜調整・疼痛除去

柔らかさが持続

機能時の義歯辺縁形態づくり



軟性裏装の「コンフォート」から義歯床用粘膜調整材が登場!

流動性に富み、義歯使用時の粘膜面や辺縁の形態を機能的に印象採得することが可能。

粘膜調整、疼痛除去、適切な義歯の辺縁形態形成など、機能印象に最適なティッシュコンディショナーの登場です。

柔らかさが1週間持続するので、傷ができてしまったケアにもお薦めです。



東京歯科大学
老年歯科補綴学講座
准教授 上田貴之先生

容易にできるダイナミック印象

私がダイナミック印象を行う際には、コンフォートティッシュコンディショナーⅢを使用することが多いです。

一般的なティッシュコンディショナーは、義歯に盛り付けるタイミングによって粘調度が変わりますが、そのコントロールは難しいものです。

しかし、コンフォートティッシュコンディショナーⅢは流動性の変化がわかりやすいので、自分の好きな粘調度で使用することが容易です。

特に、下顎総義歯の床辺縁部に長さや厚みを付与したい時には、流動性が低くなってから義歯に盛り付けることで適切な形態を得る事ができます。

抜歯後等の粘膜ケアに最適

接着剤がなくてもレジンとの接着が良く、練り始めは非常に混ぜやすく、印象材のフローが良いので、薄くキレイな印象面ができます。

厚みが気になる上顎の方などにとても使用しやすいです。

そして、粘調度を時間で調整することができるので、抜歯後や噛み込みの強い方、傷や痛みが出やすい方には、印象材を厚くすることで粘膜を保護することができます。

また、粘度が出ることにより、床延長などもしやすいのも特徴です。

時間の経過とともに硬化することで、動的な印象がしっかりと確認でき、患者にあった、最適な義歯床形態が採得できます。



医療法人社団武蔵会
コンフォートデンタルクリニック
池田昭先生
(コンフォート臨床経験全国TOP 医師)



ホームページにて製品使用方法ムービー公開中！

ティッシュコンディショナーⅢの使い方のポイントを動画で公開中!!
PC、スマートフォンで下記URLもしくはQRコードでアクセス!

www.bitecglobal.com/doctor/care/tc3.html



【販売代理店】



【販売元】
株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 〒104-0052 東京都中央区月島 2-14-12-3F <http://www.bitecglobal.jp>

ご用命は.....