



歯科用象牙質接着材

フルオロボンド シェイクワン

# FLUORO BOND SHAKE ONE

グラスアイオノマーセメントの良さを活かしたボンディング材。



Light-cure Fluoride Releasing Dental Bonding System

## CONCEPT

Gentle to teeth.

It is a teeth strengthening,  
preventive and steady  
bonding material.


SHOFU INC.

# 豊富なフッ素徐放

## 根面、歯頸部修復で発揮される特性

### グラスアイオノマーセメントに匹敵するフッ素徐放量

S-PRGフィラー配合のフルオロボンド シェイクワンは、高いレベルで持続的なフッ素リリースとリチャージ機能を有しています。また、徐放されたフッ素は樹脂含浸層を通して歯質(象牙質)に拡散されます。

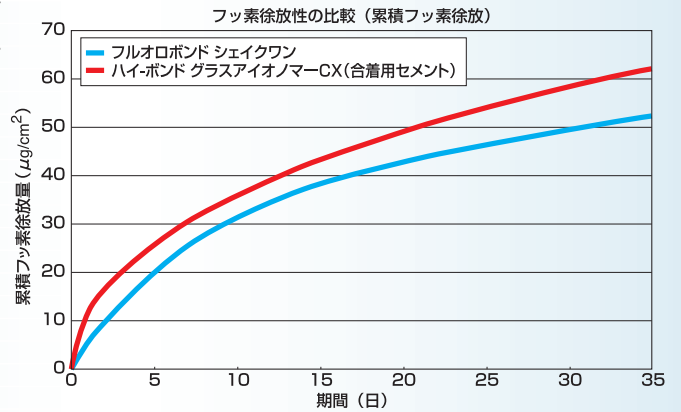

### マイルドなボンディング材

硬化機構にグラスアイオノマー反応を採り入れていることから、酸性度が一般的なボンディング材に対してよりマイルドになっています。

象牙細管露出による知覚過敏が発症しやすい「歯頸部のくさび状欠損」の修復に最適です。



③ 歯頸部くさび状欠損



フルオロボンド シェイクワン塗布後



フルオロボンド シェイクワン、ビューティフィル(A3.5)を用いて修復

(写真提供: 虎の門病院歯科部長 山田敏元 先生)

## 簡単な操作ステップと安定した接着性


テクニカルエラーが少ない操作ステップで、乾燥に強圧エアを使わなくても、安定した高い接着力が得られます。

### 水分の接着阻害を受けにくい反応機構

水成分を利用したグラスアイオノマー反応を含むトライキュア(+光、化学重合反応)の硬化機構により、水分による接着阻害を受けやすい歯頸部、根面の修復に最適です。

### 前臼歯部の修復に使用可能

新規ホスホン酸系接着モノマー(6-MHPA)の採用により、信頼性のある2ステップボンディング材並みの接着力を発現します。

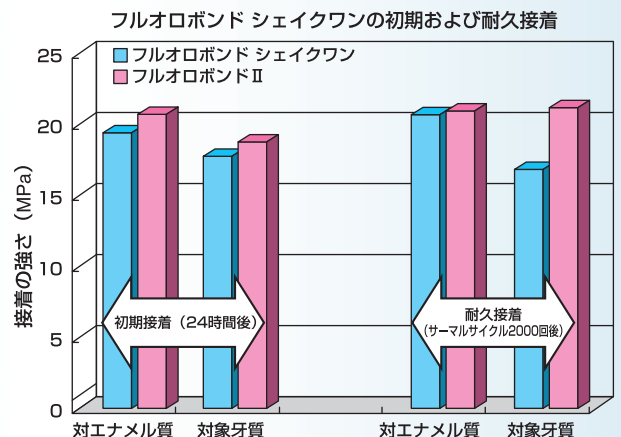


## 使用方法

### ■ 操作ステップ

#### 1. 準備

ボンドA液を **充分振る**  
(カチカチ音がしてから  
さらに5~6回)

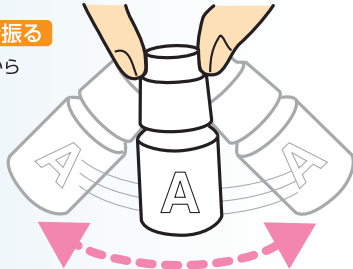


#### 2. ボンドの混和

A→B を等量採取後、充分に混和。




#### 3. 塗布

混和液を  
塗布後、**20秒放置**

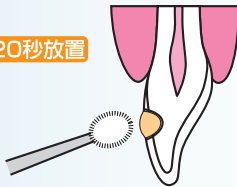


#### 4. エア乾燥

ボンディング層を  
均一化 (水洗不要)

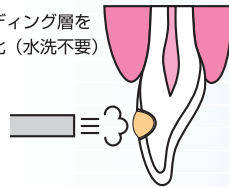

#### 5. 光照射

ハロゲン照射器  
の場合、**10秒**  
LED照射器  
の場合、**5秒**

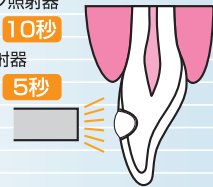

ボンドAのノズル先端に、**白い粉状のもの** が付着した時は、綿球などで **ふきとってください。**

## 用途

- 輪状で深部に及ぶ、または歯肉縁下に及ぶ根面う蝕
- 歯頸部う蝕
- 隣接面の複雑かつ狭いう蝕高洞

これらの症例は軟化象牙質の完全な除去、または水分コントロールが困難であることから、レジン修復が避けられてきました。

フルオロボンド シェイクワンはトライキュア機構を採用しているため、これらの症例に最も適しています。

### ビューティフィルフローとの併用で歯頸部修復がスピーディーに

同じPRG技術を応用した、フッ素徐放性のあるフロアブルコンポジットレジン「ビューティフィルフロー」との併用で、ガラスイオノマー修復よりも審美的な予防修復を行うことができます。

F02 低流動タイプ



ビューティフィル フロー

Gentle to teeth

It is a teeth strengthening,  
preventive and steady  
bonding material.

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
フルオロボンド シェイクワン	歯科用象牙質接着材	管理医療機器 医療機器認証番号 21500BZZ00482000

包装・価格



フルオロボンド シェイクワン セット

内容：ボンドA 2.3 mL、ボンドB 3.3 mL、マイクロブラシ ファイン(ピンク)25本、  
プチディッシュ、ステップカード

<単品販売>

フルオロボンド シェイクワン ボンドA 2.3 mL  
ボンドB 3.3 mL

関連製品

管理医療機器 認証番号  
226AFBZX00106000



ビューティフィル ネクスト  
1本3.0g…  
色調／12色

管理医療機器 認証番号  
226AFBZX00138000



ビューティフィルII LS  
1本4.0g…  
色調／12色

管理医療機器 認証番号  
221AKBZX00171000



ビューティフィル II  
1本4.5g…  
4.5g×3本入… (A2、A3のみ)  
色調／12色

管理医療機器 認証番号  
225AFBZX00052000



ビューティフィル バルク  
1本4.5g…  
色調／2色

管理医療機器 認証番号  
21600BZZ00147000



ビューティフィル フロー  
1本2g…  
2g×3本入… (F02 A2、A3のみ)  
色調／F02:7色、F10:7色

管理医療機器 認証番号  
229AFBZX00047000



ビューティフィルフロープラスX  
1本2.2g…  
2.2g×3本入… (A2、A3のみ)  
色調／F00:9色、F03:12色

管理医療機器 認証番号  
228AFBZX00024000



ビューティフィル キッズ  
種類／ゼロフロー、ローフロー、ペースト  
色調／乳歯色のみ  
価格／ゼロフロー、ローフロー  
1本2.2g…  
ペースト1本3.0g…

管理医療機器 認証番号  
21700BZZ00012000



ビューティフィル オペカー  
1本2g…  
色調／2色

管理医療機器 認証番号  
21700BZZ00430000

〈2ステップタイプ〉



フルオロボンド II  
セット…

管理医療機器 認証番号  
302AKBZX00026000

〈ワンステップタイプ〉



ビューティボンド Xtreme  
セット…

一般医療機器 届出番号  
26B1X00004000262  
特定保守管理医療機器



ペンブライト  
一式…

※3本入は箱無しの簡易包装です。

取扱い店

カタログに記載の価格は2023年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。