



オーラルスキャナ

TRIOS オーラルスキャナシステム

3shape 

 S-WAVE

TRIOS

はやく *Fast*

きれいに *Cleanly*

正確に *Accurately*


Impression & Various check modes



SHOFU INC.

3Shape TRIOS 5

すべてを追及したら
「シンプル」に辿り着きました

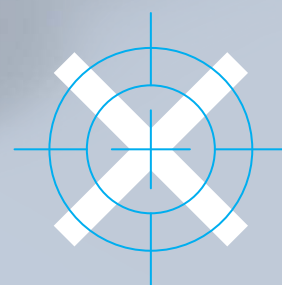

スキャンアシスト機能を搭載

TRIOS 5から新たに3Dモデルを効率的に構築するためのテクノロジーが搭載されました。毎秒約2000枚の平面画像を撮影し、それらを繋ぎ合わせて3D画像を生成することで、スキャンエラーが起こりにくくなっています。



スキャンアシスト機能
動画はこちら

キャリブレーション不要

TRIOS 5はキャリブレーションなしでいつでもスキャンを始めることができます。

LEDとバイブレーション機能

スキャナの接続状態、チップの装着状況、バッテリーの残量低下などを色で示すリング状のLEDを搭載。また、スキャンができていない場合、バイブレーションでフィードバックされる快適さを装備しています。

TRIOS 4から 30%小型化、20%軽量化

手が小さめの方でも握りやすいフォルムで、スキャン時の負担を軽減します。





製品紹介動画は
こちら


改良されたバッテリー (Smart Power Management)

TRIOS 5は使用後置いておくだけでスリープモードに、持ち上げると再接続。
バッテリー1つでスリープモードのみの状態では7日間以上持続。
また、66分間のスキャンが可能です。空になったバッテリーは60分で約80%、
120分以内でフル充電が可能です。ワイヤレスでもバッテリー残量を気にすることなく使用することができます。



衛生面を考慮したデザイン

清掃が容易なシームレスなデザインと100回までのオートクレープ滅菌に対応したスキャナチップを採用。さらに使い捨ての専用スリーブを使用することで滅菌が困難な部分をカバーし、交差感染のリスクを減らします。

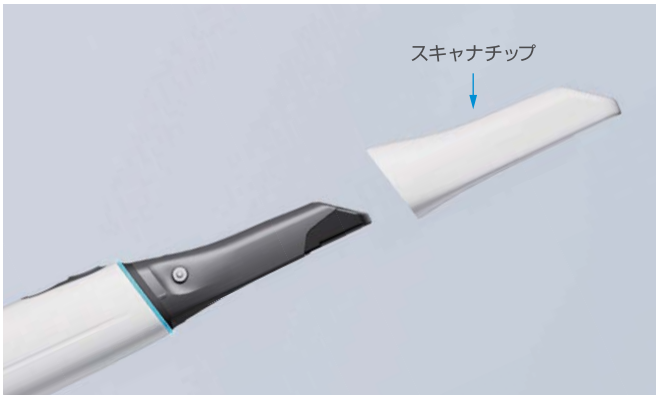

専用スリーブにより交差感染のリスクを低減

う蝕検知機能を搭載

TRIOS 4と同様にう蝕検知機能を搭載しています。
詳細は次頁をご参照ください。

販売名・一般的名称 ……………

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
TRIOS 5 オーラルスキャナシステム	デジタル印象採得装置 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 光学式う蝕検出装置	管理医療機器 医療機器承認番号 30500BZIO0031000 特定保守管理医療機器



う蝕検知機能を搭載

ワイヤレス接続と有線接続のどちらでも使用可能

操作性を求めるならワイヤレス、充電量を気にせず使用するなら有線、とフレキシブルに対応できます。



「う蝕検知機能」を搭載

光学印象採得だけでなく、QLF法の原理に基づき歯の平滑面や咬合面う蝕の程度の分析ができます。う蝕診断の補助ツールまたは患者さまへの説明用ツールとしてご使用ください。

- ※QLF法：歯面に可視光を照射することによりエナメル質初期う蝕の診断を行う検査法
- ※本機能は初期う蝕診断の補助支援ツールであり、確定診断は行えません。
- ※本器を使用して「エナメル質初期う蝕管理加算」は請求できません。




製品紹介
動画はコチラ

カラスキャン表示



う蝕検知表示

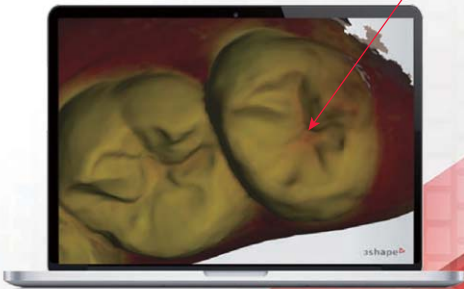

販売名・一般的名称 ……………

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
TRIOS 4 オーラルスキャナシステム	デジタル印象採得装置 チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 光学式う蝕検出装置	管理医療機器 医療機器承認番号 30200BZ100027000 特定保守管理医療機器

TRIOS 3

3shape

モデル
S2P

ワイヤレスでストレスフリー

操作性を求めたワイヤレス接続。
豊富なソフトウェアの使用が可能のため、
さまざまなコンサルテーションに活用できます。



MOVE Plus

スタイリッシュなデザイン

患者さまの真近で情報提供可能な機能的デザイン
大型タッチパネル、専用PC付きのカートタイプ

モデル
S1P

有線タイプのスタンダードモデル

充電量を気にせず連続使用に最適
S2Pと同様のソフトウェアの使用が可能




MOVE Plus 主な仕様

OS	ディスプレイ	ストレージ容量	サイズ	重量	ソフトウェア
Windows10 Enterprise CBB 64bit	サイズ：15.6型(16：9) タッチパネル 解像度：1920×1080	1TB SSD	150×50×60cm	14kg	3Shape Unite (プリインストール)

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
TRIOS 3 オーラルスキャナ	デジタル印象採得装置 チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	管理医療機器 医療機器承認番号22800BZI00042000 特定保守管理医療機器

製品データ

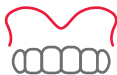		TRIOS 5	TRIOS 4	TRIOS 3
				
 Scanner Features	寸法 高/幅/長 (mm)	38 × 37 × 266	49 × 40 × 278	48 × 40 × 273
	Wireless	Wirelessのみ	Wired / Wireless を1台で切替可能	Wired / Wireless
	重量 (バッテリー、チップ装着時)(g)	299	375	340 / 373
	毎秒の平面画像撮影数	2400	1875	1875
	う蝕検知機能	☒	☒	
	リモートコントロール(マウス機能)	☒		
	ScanAssist	☒		
	ディスプレイスリーブ	☒		
	LEDとバイブレーション機能	☒		
	Smart Power Management	☒		
	キャリブレーションフリー	☒		
	TRIOS Share* 対応	☒	☒	Wirelessのみ

*TRIOS Share はクリニック内のWiFiを利用することで、PCを移動させずにワイヤレススキャナとの接続を可能にし、各チェアでのスキャンを実現します。

アクセサリ (単品販売)

for
TRIOS
5

スキャナチップ ... 3個



バッテリー ... 3個



ポッド



プロテクションチップ



バッテリー充電器



スリーブ

for
TRIOS
4

スキャナチップ ... 3個



バッテリー ... 3個



キャリブレーションキット

for
TRIOS
3

スキャナチップ ... 3個



バッテリー ... 3個



カラーキャリブレーションキット




キャリブレーションチップ

Accessories

3Shape Unite



3Shape UniteはTRIOSでのスキャンやオーダーフォームなどを簡単に管理できるプラットフォームです。Unite Storeではさまざまなアプリやサービスを選択することが可能です。

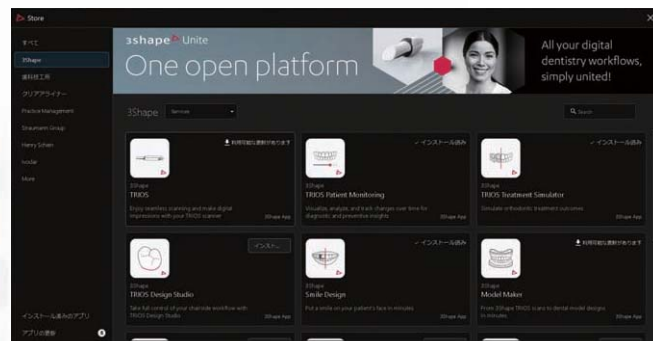

Multi-Function

Hi-Speed スキャン

高速スキャン技術により片顎30秒の印象採得が可能。チェアタイムの短縮はもちろん患者さまの負担も軽減できます。



高速スキャン
動画はこちら





クリアランス確認

ラボサイドとのコミュニケーション前にクリアランスの確認ができます。



シェード測定

スキャンと同時にシェード測定ができるため効率的です。咬合面のシェード測定も可能なため、インレーやCR充填時の色調選択にも活用できます。

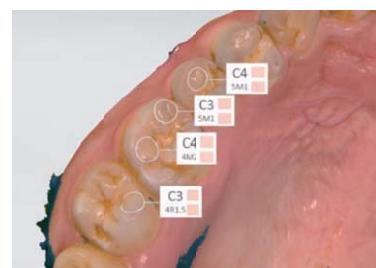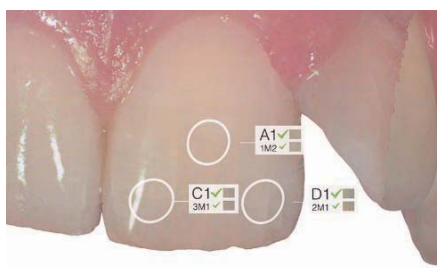

TRIOS Patient Specific Motion

患者さま固有の顎運動をスキャンし、アプリケーション上で再現することができます。また、3Shape社の技工用スキャナを所有するラボへデータを送信すれば、ラボのCADで利用することが可能であり、クラウン形態設定に反映することができます。



顎運動スキャン
動画はこちら




3Shape Apps

Treatment Simulator

スキャンした歯列をアニメーション化し歯列矯正後のイメージを確認できます。




ソフトウェア紹介
動画はコチラ

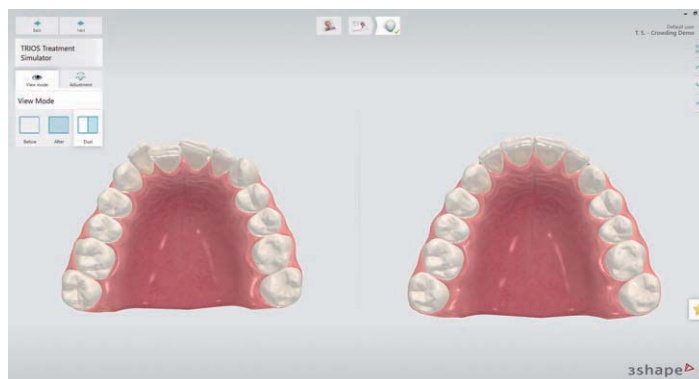

TRIOS Patient Monitoring

歯の摩耗や矯正治療の経時変化を記録することができ、色調によりその変化を確認できます。

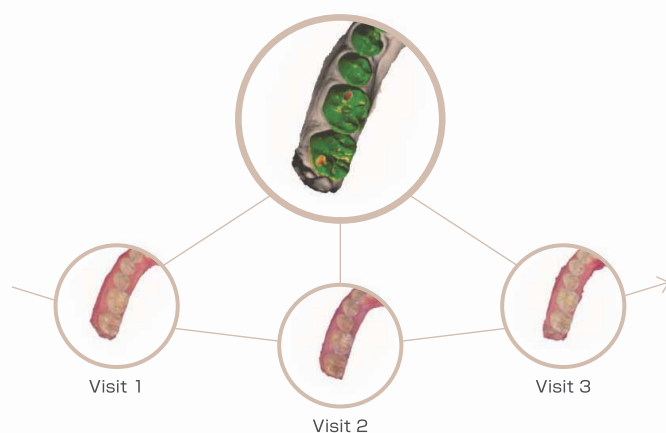

Model Maker

スキャンした歯列のデータから、3Dプリンターで出力するためのデータを自動で設計できます。




TRIOS Smile Design

デジカメやスマートフォンで撮影した写真を取り込み、術後の歯の形態や色調をデザインし、スマイルイメージをシミュレーションすることが可能です。my3Shape (アプリ) をインストールすれば患者さまのスマートフォンと共有することが可能です。



スマイルイメージ シミュレーション
動画はコチラ

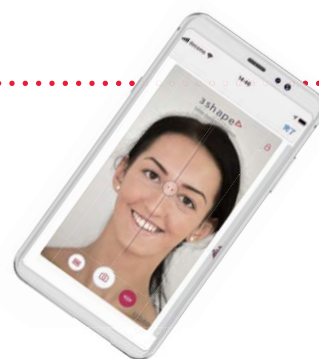


CADソフトウェア

インプラント スタジオ & インプラント プランナー


3shape

TRIOSと連動してインプラント体の
埋入位置・方向・深さをシミュレーション

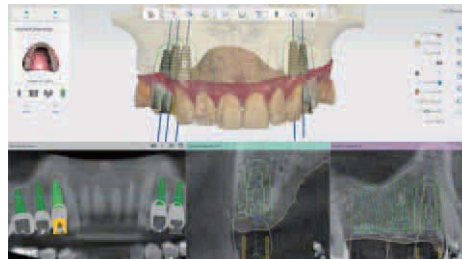

インプラント体の埋入位置をシミュレーション

口腔内スキャンデータとCBCTデータをマッチングし、インプラント体の埋入位置をシミュレーションします。精度が高く、安心・安全なインプラント手術をサポートします。

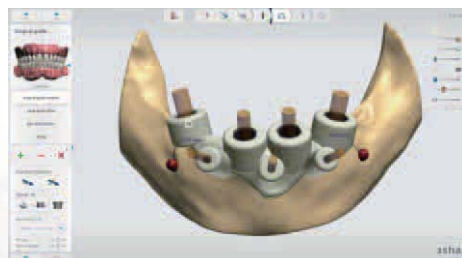

サージカルガイドを設計

インプラント体の埋入シミュレーションに基づいたサージカルガイドを設計可能です。歯牙支持型・骨支持型等さまざまな形態が設計可能です。



プロビジョナルレストレーション設計 (単冠)

スクリュ固定式プロビジョナルレストレーション (単冠) を術前に設計可能です。

■ 対応表

	埋入シミュレーション	サージカルガイド設計	プロビジョナル レストレーション設計 (単冠)	対応ソフト	
				3Shape Unite	Dental System
インプラント スタジオ	○	○	○	○	○
インプラント プランナー	○	×	×	○	×

■ 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
インプラントスタジオ	・ 歯科インプラント用治療計画支援プログラム ・ 歯科修復物設計支援プログラム	管理医療機器 医療機器承認番号 30300BZX00227000

チェアサイドでの ▶ Same-day トリートメントシステム

口腔内スキャンから加工までをチェアサイドで完結可能なシステムです。
クラウン・インレー・ベニアなどの設計・加工が可能です。

オーラルスキャナ
TRIOS 3 / TRIOS 4



スキャン

CADソフトウェア
TRIOS Design Studio




TRIOS Design Studio

クラウン、インレー、ベニアなどの補綴装置の
設計が可能なCADソフトウェア

設計

CAMソフトウェア
Sum 3D TDS Edition

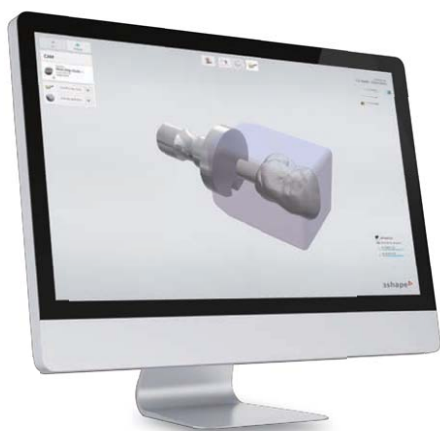

Sum 3D TDS Edition

TRIOS Design Studioとシームレスに
連動するCAMソフトウェア

切削・加工

加工機
DWX-4



DWX-4

※5年目までの保守点検契約が必要です。

※本製品のご使用には、集塵機とコンプレッサーが必要です。


■ 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
TRIOS 4 オーラルスキャナシステムの付属品 CADソフトウェア Design Studio	デジタル印象採得装置 チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 光学式う蝕検出装置	管理医療機器 医療機器承認番号 30200BZI00027000 特定保守管理医療機器
TRIOS 3 オーラルスキャナの付属品 CADソフトウェア Design Studio	デジタル印象採得装置 チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	管理医療機器 医療機器承認番号 22800BZI00042000 特定保守管理医療機器
歯科用CAD/CAMマシン DWX-4	歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	一般医療機器 医療機器届出番号 22B3X10006000050

加工用マテリアル

● 高透光性マルチレイヤー ジルコニアディスク

「強度」×「透光性」×「色調」を機能的にディスク内に配置し、「ディスク1枚」でインレー、ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで対応可能です。

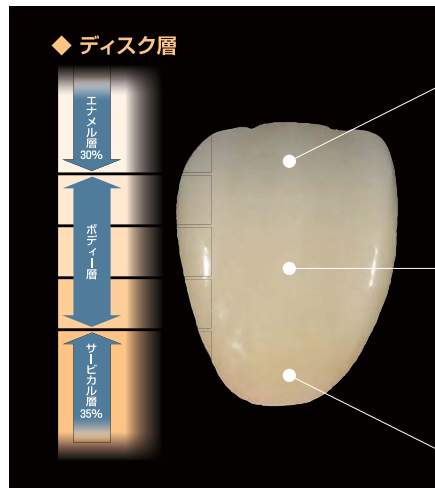

エナメル層

前歯部にも対応可能な高い透光性

3点曲げ強さ^{※1} (代表値) 1034MPa
可視光透過率^{※2} (代表値) 44%

ボディー層

層の界面が識別されにくい、すぐれたグラデーション機能

3点曲げ強さ^{※1} (代表値) 1163MPa
可視光透過率^{※2} (代表値) 40%




サービカル層

歯頸部の遮蔽性向上と、ロングスパンブリッジにも対応可能な高い強度

3点曲げ強さ^{※1} (代表値) 1454MPa
可視光透過率^{※2} (代表値) 37%

各層の拡大イメージ(×20,000)

→: 入射光 →: 散乱光

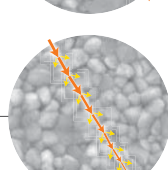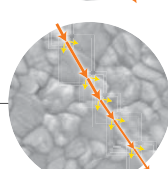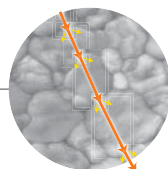

粒子の組成と形状の違いにより各層の透光性と物性をコントロール

※1 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる)

※2 可視光透過率 (JIS R 3106:1998に準ずる、色調: A2、試験体厚さ: 0.5mm)

CAMソフト「Go2dental」スーパーファインモードで作成
クラウンやインレーの調整量を低減



松風ディスク ZR ルーセント スーブラ

14mm 22mm
18mm 26mm



写真提供: 西山 敦先生 (医療法人 Natural Smile)
枝川 智之先生 (有限会社 バンパデンタルラボラトリー 代表取締役)



マージンオフセット
0.300mm



マージンオフセット
0.050mm

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スーブラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

● 超高透光性セミシンター ジルコニアディスク


周辺歯質との調和が要求される「インレー」「ラミネートベニア」の症例で活躍します。



色調: A3 (ヴィンテージアートユニバーサルにてステイン)
写真提供: 藤崎 啓太先生 (Charm Dental Design 代表)



超高透光性 **48%** を実現

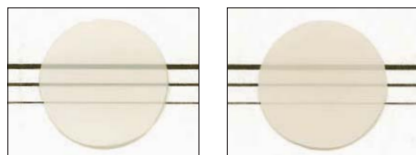

松風ディスクZR ルーセント
ウルトラ
色調: A2 厚さ: 0.5mm


松風ディスクZR ルーセントFA
色調: 5L ライト(A2 相当)
厚さ: 0.5mm

曲げ強さ **752MPa**

超高透光性を誇りながら安定した曲げ強さを有しています。
また、松風独自の成型技術により、CAD/CAM 加工時の
チッピングリスクを低減しています。

症例に合わせて選択可能なサイズ展開 **10mm** ラインアップ

インレーに適したジルコニアディスクとして当社従来品より薄い10mm、12mmをラインアップ。
同サイズのインレーを切削した場合、10mmと14mmを比較すると切削体積が約30%軽減し、
材料の無駄を削減できると共に、作業時間短縮にも寄与します。

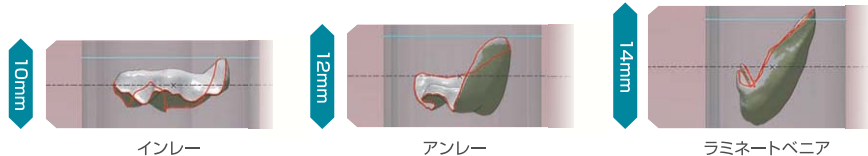

松風ディスク ZR ルーセント ウルトラ

10mm 12mm 14mm

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント ウルトラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 303AKBZX00070000

● CAD/CAM冠対応 レジンブロック

全ての機能区分に対応できる充実のラインアップ！
前歯から小臼歯・大臼歯まで色調が揃い、
口腔内での調和にすぐれています。



	松風ブロック HC ハード AN	松風ブロック HC ハード II	松風ブロック HC	松風ブロック HC スーパーハード
適用範囲※1	前 歯	小臼歯	小臼歯	大臼歯※2
機能区分	CAD/CAM冠用材料 (Ⅳ)	CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ)	CAD/CAM冠用材料 (Ⅰ)	CAD/CAM冠用材料 (Ⅲ)

※1 保険点数算定要件をご確認のうえご利用ください。 ※2 小臼歯で使用される場合、CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ) が適用されます。

松風ブロック HC シリーズ

- 松風ブロック HC ハード AN 14L (5個入)
- 松風ブロック HC ハード II Sサイズ (5個入) Mサイズ (5個入) Lサイズ (1個入)
- 松風ブロック HC Sサイズ (5個入) Mサイズ (5個入) Lサイズ (1個入)
- 松風ブロック HC スーパーハード Mサイズ (5個入)

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC ハード AN	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00071000
松風ブロック HC ハード II	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00035000
松風ブロック HC	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00070000
松風ブロック HC スーパーハード	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 231AKBZX00002000

接 着 レジセムEX / ビューティボンドXtreme

CAD/CAMマテリアルの接着に適した1ボトル1シンリンジ

レジセムEXは、ビューティボンド Xtremeと併用することで
支台歯・各種補綴装置に幅広く対応可能です。
補綴装置によって、前処理材を使い分ける必要がなく
すべて同じ術式でお使いいただけます。



レジセムEXペースト
5.0mL
1本

ResiCemEX + BeutiBond Xtreme

従来レジセムシステム



従来5本
必要だった
前処理材が
1本に！



ビューティボンド Xtreme 5.0mL
1セット
トリプルパック

レジセメントの前処理に、CR充填修復に、
マルチに対応可能な1液性ボンディング材。


これまで困難とされてきた酸性モノマーとシランカップリング剤の共存を実現。
ビューティボンド Xtremeは、一般的なシランカップリング剤と比べて耐酸性に
すぐれた新しいシランカップリング剤「ARS」を配合することで、さまざまな被着体
に対してすぐれた接着性を発現します。



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
レジセムEX	歯科用コンボジットレジセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 302AFBZX00112000
ビューティボンド Xtreme	歯科用象牙質接着材 (歯科金属用接着材料) (歯科セラミックス用接着材料) (歯科用知覚過敏抑制材料) (歯科用シーリング・コーティング材)	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00026000

支台歯形成 CAD/CAM プレパレーションキット

CAD/CAMの支台歯形成には厚みと丸みが必要です。CAD/CAM用支台歯を確実に形成できる形態を厳選！

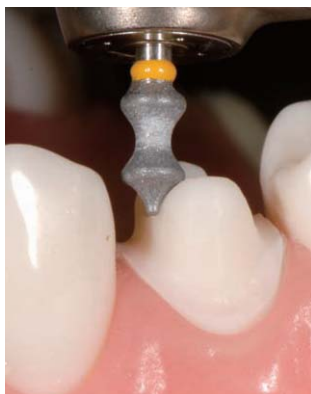

シャンファー形態の付与には
先端径が太い108R、109Rがおすすめです。

※ 108R、109RはCAD/CAMプレパレーションキットには含まれておりません。


支台歯切削量の比較イメージ



102Rから108R、109Rの順でより深いシャンファー形態が付与できます。

CAD/CAMの支台歯に厚みと丸みが必要なのはなぜ？

一般的に支台歯の切端や咬頭頂が厚み不足であったり鋭角な場合、CAD/CAM加工時にクラウンと支台歯の間に余分なスペースが生じます。これはCAD/CAMミリングバーの形状によるものです。

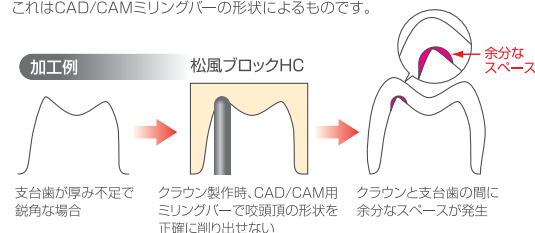


CAD/CAM プレパレーションキット
1キット

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ダイヤモンドポイントFG	歯科用ダイヤモンドバー	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000023

ジルコニア除去 ダイヤモンドポイントFGスーパーコース

通常の砥粒の2倍の大きさを採用しているため、1.5倍～2倍の研削力があります。

ザグザグと削れる7形態!!
汎用性の高い形態をセレクトしました。

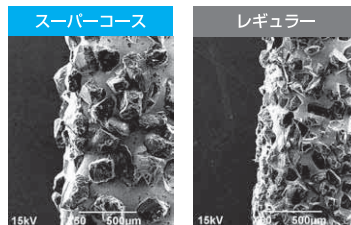


ダイヤモンドFG スーパーコース
セレクトセット
1箱


販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ダイヤモンドポイントFG	歯科用ダイヤモンドバー	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000023

形態修整・研磨ステップ ビトリファイドダイヤ / ジルコシャイン / ジルグロス

鏡面研磨し表面を整えることで対合歯摩耗リスクの軽減に

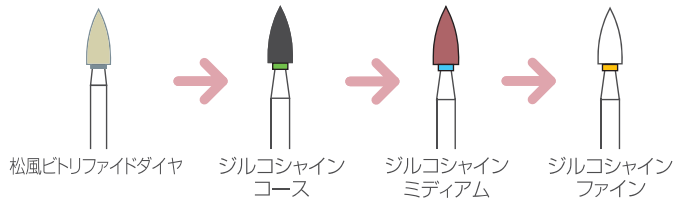

さらに短時間で艶やかな表面性状を得るにはジルグロスを

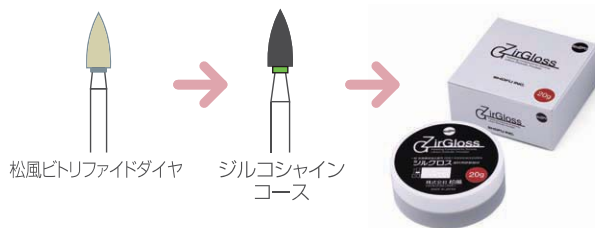

ジルグロス
20g
40g



ビトリファイドダイヤ

FG : 3本入	25,28
CA : 3本入	28,29,43
HP : 3本入	28,29,42,43
HP : 2本入	11
HP : 3本入	20
HP : 2本入	10,70




ジルコシャイン
セレクトキットCA
1キット

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ビトリファイドダイヤ	歯科用研削器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000226
ジルコシャイン セレクトキット	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000258
ジルコシャイン	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000017
ジルグロス	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000269

安心のサポート体制

S-WAVEシステム導入ユーザーさま専用の
コールセンターを設置。
リモートシステムでユーザーさまと同じ画面を
見ながら各種ご案内をさせていただきます。

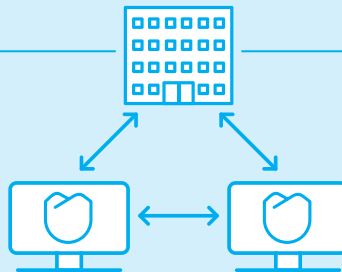

Pod

タイプ	型 名	う蝕検知機能	
 ワイヤレス	TRIOS 5 オーラルスキャナシステム	○	
 ワイヤレス/有線	TRIOS 4 オーラルスキャナシステム モデルS3P-2	○	
 ワイヤレス	TRIOS 3 オーラルスキャナ モデルS2P	—	
 有線	TRIOS 3 オーラルスキャナ モデルS1P	—	

上記機種をご購入の際は必ず推奨のパソコンを、弊社からご購入いただきますようお願いいたします。

MOVE Plus

タイプ	型 名	う蝕検知機能	
	ワイヤレス/有線	TRIOS 4 オーラルスキャナ モデルS3A-22 MOVE Plus ペン	○
	ワイヤレス	TRIOS 3 オーラルスキャナ モデルS2A MOVE Plus カートベン	—
	有線	TRIOS 3 オーラルスキャナ モデルS1A MOVE Plus カートベン	—

TRIOS 3 MOVE Plus Without Scanner

- ・TRIOS 3 (S1P, S2P) いずれかをお持ちのユーザーさま用のスキャナ無しの仕様です。
- ・TRIOS 4 (S3P-2) にも使用可能です。
- ・ライセンス料金はユーザーさま所有のTRIOSのみに必要です。



● ライセンス料

2年目以降選択	ライセンス料 (2年目以降/年額)	ハードウェア保証*	3Shape コールセンターサポート
TRIOS Care		5年	無償
TRIOS Only		1年	有償の場合あり

※保証内容については、弊社担当者までお問合せください。

● ソフトウェア

名 称			備 考
TRIOS Design Studio			初年度よりライセンス料必要
Sum 3D TDS Edition			6年目以降ライセンス料必要 ライセンスの有効期間 (開始終了日) : 1月1日～12月31日
インプラントスタジオ			初年度よりライセンス料必要
インプラントプランナー			初年度よりライセンス料必要

取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。