



歯科レジン用接着材料

CAD/CAMレジン用アドヒーシブ



100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years



PEEK材のための 接着用前処理材

CAD/CAMレジン用 アドヒーシブ




Adhesive

For CAD/CAM resin

CAD/CAMレジン用アドヒーシブを用いてPEEK材料からなる補綴装置の被着面処理を行うことで接着強さが向上します。

■せん断接着強さ / サーマルサイクル5,000回後

使用レジンセメント：レジセムEX (代表値) (自社試験)

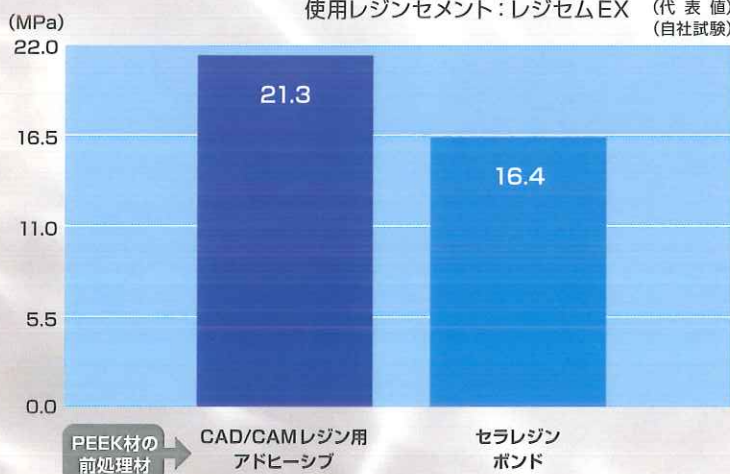

「レジセムEX」をはじめとする各種レジンセメントと併用いただくことが可能です。


SHOFU INC.

Adhesive

For CAD/CAM resin

使用ステップ

アルミナサンドブラスト処理

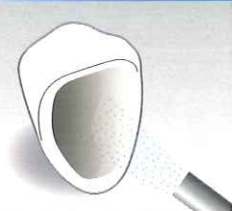

アルミナサンドブラスト処理▶
水洗又は超音波洗浄▶乾燥▶
試適

試適後の清掃



試適後、補綴装置内面に付着し
た唾液などを洗浄・水洗▶乾燥
※リン酸エッチングゲルを用いて
洗浄することを推奨します

※インバーバوند
エッチングゲル(別売)

補綴装置の前処理



CAD/CAMレジン用アドヒーシブ
を塗布▶十分にエア乾燥

光照射



LED照射器: 10秒
ハロゲン照射器: 20秒
※照射面積が広い場合は、複数回
に分けて照射してください

以降、使用するレジン
セメントの添付文書に
従い、補綴装置の装着
等を行なってください

CAD/CAMレジンブロックを含む、その他レジン材料の接着にも使用可能

包装・価格



CAD/CAMレジン用アドヒーシブ

5mL ¥8,000

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
CAD/CAMレジン用アドヒーシブ	歯科レジン用接着材料	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00039000

関連材料

管理医療機器 認証番号
303AFBZX00025000



レジセムEXキット

¥28,000

色調: クリア

[セット内容]

ペーストクリア5.0mL(9.2g).....2

ビューティボンドXtreme(5.0mL)....1

松風ミキサーチップ(ショート).....20

ディスボラシファイン(ピンク)....50

松風Vディッシュ...25、ステップカード

管理医療機器 認証番号
301AKBZX00036A01



松風PEEK

ディスク φ98×16mm ¥90,000

φ98×20mm ¥100,000

φ98×25mm ¥120,000

ブロック 5個1箱 ¥30,000

色調: アイボリー

管理医療機器 認証番号
20300BZZ01149000



インバーバوند エッチングゲル

6mL ¥1,500

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

カタログに記載の価格は2023年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595