


■ 使用方法	ファスト	ノーマル
色調	ライトグリーン	ライトピンク
香り	スペアミント	
混水比(粉:水)	23g:50ml	23g:50ml
練和時間	20秒	30秒
操作時間	1分20秒	2分00秒
初期硬化時間	1分30秒~2分10秒	2分00秒~2分30秒
口腔内保持時間	約1分	約1分30秒



アルギノプラスト クリーム ファスト
 内容: 10kg (500g×20袋)
 計量スプーン1本
 計量カップ1個
 製品コード: 66097458

販売名: アルギノプラスト クリーム ファスト
 一般名称: 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類: 管理医療機器
 認証番号: 229ABBZX00074000

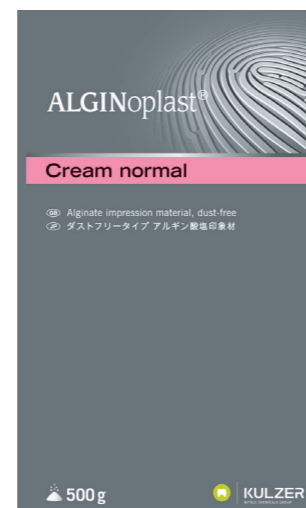

アルギノプラスト クリーム ノーマル
 内容: 10kg (500g×20袋)
 計量スプーン1本
 計量カップ1個
 製品コード: 66097459

販売名: アルギノプラスト クリーム ノーマル
 一般名称: 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類: 管理医療機器
 認証番号: 229ABBZX00075000

■ お問い合わせとご用命は…

■ 製造販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13
 TEL.03-5803-2151

大阪営業所: 〒590-0982 堺市堺区海山町4-174
 福岡営業所: 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12

D13AC01-09-2310-700MM

www.kulzer.co.jp



クリームのような水なじみのよさ
 5µmの高い細線再現性を実現



【製品ご紹介動画】

アルギン酸塩印象材

アルギノプラスト クリーム

Giving a hand to oral health.



KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP

アルギノプラスト クリームは、術者と患者様の双方にやさしいアルギン酸塩印象材です。




5µmの高い細線再現性

アルギノプラスト クリームの細線再現性は5µm。ファインタイプのフィラーを使用することによりアルギン酸塩印象材でシリコン印象材と同等の精度を実現しました。



5µmもしっかり再現

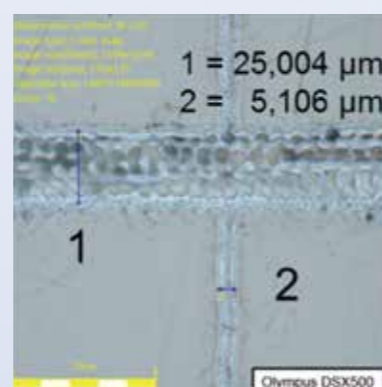


試験片拡大図



クリームのような水なじみ

高品質な原材料に加え、新たに親水性を高める成分・界面活性剤を添加。水とのなじみがより一層良好になりました。短時間で簡単にダマなくクリーミーに練和できます。

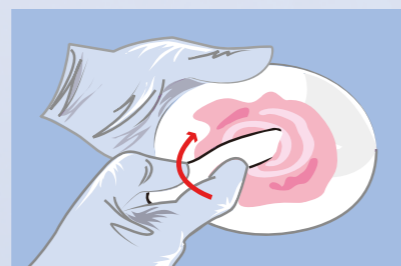

スペアミントの香り

アルギノプラスト クリームはさわやかなスペアミントの香り。練和時 および 印象採得時の不快感を和らげます。



高い引裂き強さ

引裂き強度が高く、JIS規格値の約2倍の性能を有しています。これは少なくとも2回石膏を注げる強さで、印象撤去時にマージン部分にダメージがおよぶのを防ぎ、再印象の必要リスクを低減させます。



優れた寸法安定性

印象採得後の離液が起こりにくく、2日目でも-0.5%以内の収縮率を維持。印象精度を損ないにくく、寸法が安定します。
* 印象採得後は、必ず保湿できる容器で保管してください



口腔内で短時間で硬化

口腔内で圧接後、短時間で硬化が始まります。口腔内保持時間はファスト約1分、ノーマル約1分30秒。患者様への負担を軽減でき、印象のゆがみリスクも低減します。

■ 物理的性質	JIS T6505:2016	ファスト	ノーマル
細線再現性	20µm line	5µm	5µm
引裂き強さ	min. 0.38	0.7N/mm	0.7N/mm
弾性回復	min. 95	> 96%	> 96%
弾性ひずみ	5-20	14%~16%	14%~16%
圧縮強さ	min. 0.35 (JIS T6505:2005)	> 1.0MPa	> 1.0MPa