


高性能と美しいデザインのハイエンドモデル

ノブレス エー

NOBLESSE A


高度な設計により従来のノブレスを更に上回る性能

■ マルチ波長照射

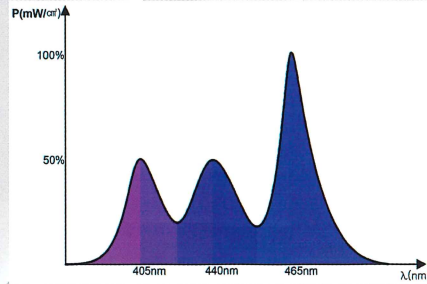


3波長の出力によりどんな重合材にも対応。
新たにブリーチングモードも追加されました。

■ 光照射を知り尽くした形状

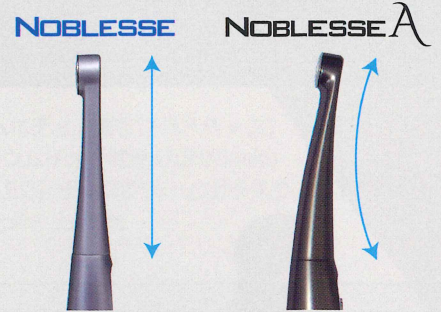


本体ネックに角度を持たせ口腔内での操作性が更に向上。ノブレスと同様にヘッドは180°回転します。

■ 光診断サポーター

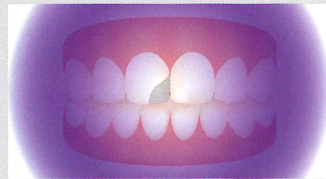

405nmの紫色光と専用フィルターを併用することで、クラック・人工歯（レジン充填）と天然歯の識別などをサポートする視覚的診断補助機能。

※ 診断の確定は従来通りの方法でお願いします。

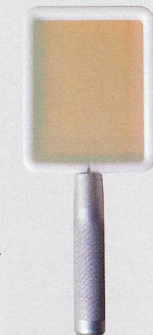

専用フィルターは同梱しています。

■ 均一な光分布と直進性



光学系デザインの最適化により、照射面全体が均一な照度で、かつ直進性がよいため照射面から少し離れても照度が落ちません。

■ 大容量バッテリー

・2,850mAhのリチウムイオンバッテリーを使用。
約1,800回の照射が可能。(3秒エクストラモードにおいて)
※バッテリー交換は弊社での修理受付となります。

■ 回転可能な薄型ヘッド

・180°回転ヘッド構造

■ アルミ製ボディ

・チタンカラーのアルミボディ

■ 従来ノブレスの照射モードに4つ追加。

<p>■ X-tra power : エクストラパワーモード 3,000mW/cm² 1秒 / 3秒</p>	<p>■ Pulse : パルスモード 1,600 mW/cm² 5秒 / 10秒 0.6sec ON 0.4sec OFF</p>
<p>■ High power : ハイパワーモード 2,000mW/cm² 5秒</p>	<p>■ Soft start : ソフトスタートモード スタートから5秒かけピーク(1,400mW/cm²)その後10秒間照射</p>
<p>■ Orthodontics : 矯正モード 3,000mW/cm² 3秒ON 1秒OFFのレポート(10回連射)</p>	<p>■ Normal : ノーマルモード 1,200mW/cm² 10秒 / 20秒</p>
<p>■ Orthodontics : 矯正モード 3,000mW/cm² 3秒ON 1秒OFFのレポート(6回連射)</p>	<p>■ Soft start -T : ソフトスタートTモード スタートから10秒かけピーク(1,400mW/cm²)その後10秒間照射</p>
<p>■ Bleaching : ブリーチングモード 1,200mW/cm² 180秒間照射</p>	<p>■ Soft start -P : ソフトスタートPモード スタートから2秒かけ1,600mW/cm² その後2秒間照射した後3,000mW/cm²で1秒照射</p>

【セット内容】

本体・充電台・ACアダプター・ライトシールド・感染防止スリーブサンプル
取扱説明書・保証書・光診断サポーター用フィルター

【標準価格】

税込 125,400円
(本体価格 114,000円)