

おかげさまで大変ご好評いただいております
皮脂・血液汚れの洗浄から、細菌・ウイルス対策までこれ1枚で幅広く使える!

KaO セイフキープEX

医療機関・介護施設用

第四級アンモニウム塩配合



EXワイドサイズ 詰替え用 (300枚)

商品コード	入数	標準価格
1250	300枚	¥1,980/パック(税別)



ワイドサイズ 詰替え容器

商品コード	入数	標準価格
2420	1個	¥950/個(税別)



セーフキープEXボトル (80枚)

商品コード	入数	標準価格
1247	80枚	¥580/ボトル (税別)
1248	80枚	¥440/パック (税別)



セーフキープEXつめかえ用 (80枚)

商品コード	入数	標準価格
1247	80枚	¥580/ボトル (税別)
1248	80枚	¥440/パック (税別)



セーフキープEXワイド付ピロー

商品コード	入数	標準価格
1249	80枚	¥730/パック (税別)



汚れ
除去


&

ウイルス
除去
除菌


24時間
抗菌持続!!

複数のウイルス・細菌での検証を実施
 日常清掃～細菌・ウイルス対策まで!


ウイルス除去*1効果

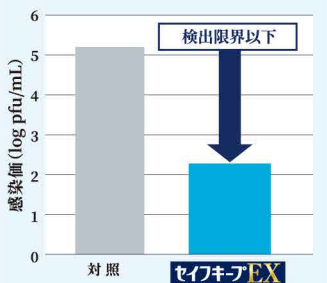

除菌*1効果

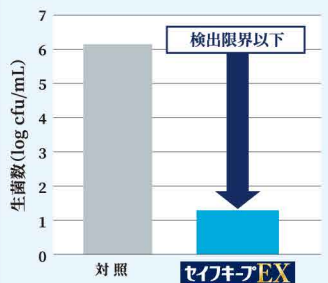

24時間後の菌数

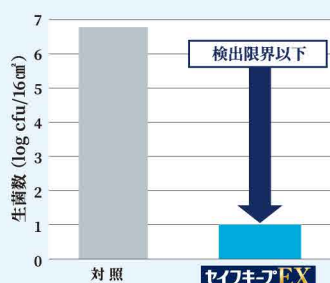

*2022年 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
 試験法: ウェットワイパー類の除菌性能試験 (日本衛生材料工業連合会) に準用

*2022年 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
 試験法: ウェットワイパー類の除菌性能試験 (日本衛生材料工業連合会) に準拠

*2022年 花王調べ
 試験法: JIS Z 2801 抗菌性試験法に準用
 試験法概略: シートで一拭きしたステンレス板に、菌を塗布。
 試験開始から24時間後に菌数をカウント。

*1 すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

*2 すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。

アルコールなどと比較して
 拭く対象を傷めにくい

アルコールはプラスチック製器具のビニールの表面の黄変・ひび割れの原因になる場合がありますがセーフキープなら安心。

プラスチック	金属
ポリエチレン ○	ステンレス ○
ポリプロピレン ○	アルミニウム* ○
ポリスチレン ○	アルミニウム* (アルマイト加工) ○
アクリル ○	○…未処理のものと比較して同等
塩化ビニル ○	
ナイロン ○	
ABS樹脂* ○	

試験法概略
 市販の標準試験板を使用して評価を実施
 プラスチック: 厚さ1mm、幅10mm、長さ70mmの各樹脂製の試験板に消毒シートを力fully 24時間接触させ、試験板の外観および屈曲させたときの跡を評価

金属: 試験板をシート絞り液に浸漬し、50℃、10日保存後の状態を評価

*アルミニウム、ABS樹脂は目立たない部分で影響がないことを確認してからご使用ください。
 グレードや形状、微細な傷、負荷等の状況により影響が出る場合があります。
 ●機器などに使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
 ●機器内部や凸凹のある箇所へのご使用はお控えください。