

DENTAL WHITENING GEL



コードNo.	製品名	標準価格
444119	アンジェラス ホーム10% スターターキット	¥7,300
444044	アンジェラス ホーム10% 2本入	¥3,400
444051	アンジェラス ホーム10% 6本入	¥7,900
444069	アンジェラス ホーム10% 12本入	¥14,000
444126	アンジェラス ホーム16% スターターキット	¥8,300
444083	アンジェラス ホーム16% 2本入	¥4,200
444091	アンジェラス ホーム16% 6本入	¥8,300
444101	アンジェラス ホーム16% 12本入	¥14,500
444076	アンジェラス ホーム マウストレー 5枚入	¥2,200



▲ 院内用紹介動画



▲ 製品紹介動画

アンジェラスホーム10%(16%)スターターキット内容
 ・アンジェラスホーム10%(16%)3gシリンジ×4本
 ・アンジェラスホームマウストレー×2枚
 ・リーフレット(カラーチャート記録用紙付)×1セット
 ※シリンジ単品は10%、16%全て内容量3.0gです。



▲ ポスター



▲ 患者様用リーフレット

コードNo.	製品名	標準価格
445001	アンジェラス ホーム ポスター(A3カラー1枚入)	¥600
444806	アンジェラス ホーム患者様用リーフレット (20枚+スタンド1個付)	¥830

DENTAL WHITENING GEL

angelus® HOME 10% 16%



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格は2024年9月現在の税別価格です。

一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
 販売名：アンジェラス ホーム
 承認番号：30100BZX00059000（高度）

一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
 販売名：アンジェラス ホーム 16%
 承認番号：30400BZX00204000（高度）

一般的名称：歯科用咬合スプリント
 販売名：アンジェラス ホーム マウストレー
 届出番号：27B1X00147000005（一般）



(01)02747937020685

製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206

販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9 TEL.0800-170-5541（ユニット・歯科材料・滅菌器のお問い合わせ）

C02499/2024年9月/@40/改

ラインナップ

患者さまの負担が少なく、手軽に行えるホームホワイトニング材で健康的な白い歯へ。
充実した関連製品がホワイトニング治療をトータルでサポートします。

効率重視の方には

過酸化尿素 **16%**

装着時間 **1.5時間**

※装着時間は1日の時間です。

優しさ重視の方には

過酸化尿素 **10%**

装着時間 **2時間**

※装着時間は1日の時間です。

ホワイトニングに関するQ&A

Q.1

ホワイトニングって
痛くないの？

A.

治療中に感じる不快感として
知覚過敏があげられます。

Q.2

ホワイトニングの
効果はどれくらい
持続しますか？

A.

生活スタイルや加齢現象により
若干あと戻り（治療前の歯の色
に近づく）があります。
しかし、定期的にタッチアップを
することで白さが続きます。

Q.3

詰め物やかぶせも
白くなりますか？

A.

ホワイトニングは天然歯のエナ
メル質だけに作用します。充填
物や前装冠を白くすることは
できません。治療後の新しい色
に合わせて取り換えが必要になる
ことがあります。

Q.4

他治療との
関連は？

A.

ラミネートベニアやオール
セラミック等の審美的な治療
の際、あらかじめそれ以外の
歯にホワイトニングを施して
おくことで、よりよい結果が
期待できます

シリンジ内容量3.0g

※ 6 歯合計で1目盛り(0.5g)が目安です。
※ 本品の使用前、使用後は冷蔵保存をお勧めします。
※ 製品には気泡が混入していることがありますが、品質等には問題ありません。

シンプルな処置で 歯科医院さま、患者さまの負担を軽減

歯科医院での処置

1 診察・診断

歯のみならず歯肉その他口腔
内全体の診査をします。

※ホワイトニング治療を始める前に
必要な歯科治療がある場合があります。

3 治療について 説明

治療方法、治療期間、
治療費等の説明を
受けます。

4 印象採得 マウストレーの製作

治療を決めた後
マウストレーの製作のため
上下の歯の型を取ります。

2 治療

ホワイトニング治療だけ
では良好な改善がなく、
セラミック冠などの治療の
追加が必要な場合があります。

5 マウストレーの試適 使用方法の説明

マウストレーを試適し、使用
方法の説明を受けます。
マウストレー、10%または
16%のホワイトニングジェル
を受け取ります。

自宅で行う処置

1 清掃

マウストレー装着の前に
歯磨きをします。

3 マウストレーの装着 使用後のお手入れ

歯科医師より指示された時間を
守ってマウストレーを装着しま
す。マウストレーを外したら、
口腔内をよくすすぎ歯みがきを
します。
マウストレーは水で洗浄し
ます。高温のお湯を使用すると
マウストレーが変形します。
マウストレーはトレーケースに
入れて常温で保存します。
ホワイトニングジェルはキャップ
をしっかり締め、冷蔵庫に保管
します。

2 ジェルの注入

キャップを外してシリンジの
プランジャーを押してホワイト
ニングジェルを出します。
マウストレーの内面の液溜めに、
10%または16%のホワイト
ニングジェルを1歯あたり
米粒1~2粒大を入れます。

チップのご使用上注意

アプリケーションチップの先端を、くびれ
部分で折り切りします。(切り取ったZパ
ーツは上下逆さまにして装着することで
抽出口のキャップになります)キャップ
突起部をアプリケーションチップ先端部
に押し込むように挿入して先端部を
しっかり開口してください。開口が
不十分だとホワイトニングジェルが
出にくくなります。

4 ホワイトニング後

マウストレーを外した後は、少
なくとも30分間はコーヒー・紅茶
など色のついた飲食物は避けま
しょう。