

initial™ IQ ONE SQIN

ニケイ酸リチウムガラスセラミックス・ジルコニア用マイクロレイリング陶材
キャラクターライズ用ペーストセラミック / キャラクターライズ用ステイン

イニシャル IQ SQIN

イニシャル IQ ラスターペースト ONE / ラスターペースト

イニシャル スペクトラムステイン

Paintable colour-and-form ceramic system



Since 1921
100 years of Quality in Dental



initial™ IQ ONE SQIN

美しさと強さの両立。

時代に合わせて進化するイニシャルに、マイクロレイヤリング専用のセラミックシステムイニシャル ^{ワン} ^{スキン} IQ ONE SQIN が誕生。
 築盛用陶材イニシャル ^{スキン} IQ SQINをイニシャルの各種ステイン材と組み合わせることで多彩な表現を可能にします。



マイクロレイヤリング用陶材
 イニシャル ^{スキン} IQ SQIN

ペーストステイン
 イニシャル IQ ラスターペースト ONE
 イニシャル IQ ラスターペースト (ガムシェード)

パウダーステイン
 イニシャル スペクトラムステイン




2 | 1、3 : セット後

写真提供: RDT 荒木 康成

マイクロレイヤリングは、ニケイ酸リチウムガラスセラミックやジルコニアフレームに対し約0.2mm～最大0.6mmの非常に薄い層で築盛するため、フレームの厚みを確保でき、レイヤリングの審美性とフレーム強度を両立できます。

カラーチャート

■ イニシャル IQ SQIN

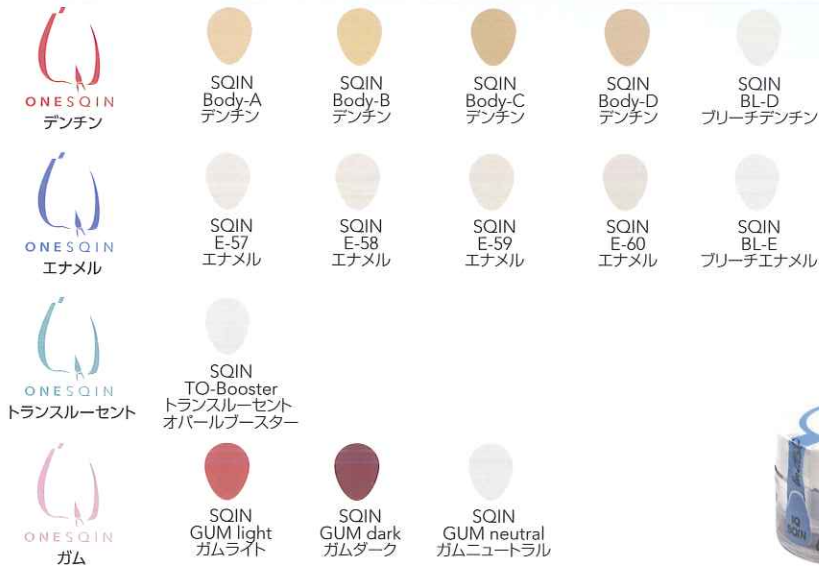

■ イニシャル IQ ラスターペースト ONE



■ イニシャル IQ ラスターペースト (ガムシェード)

【ベーシックカラー】(ペースト)



【エフェクトカラー】(パウダー)



■ イニシャル スペクトラムステイン



スキン イニシャル IQ SQIN


焼成温度：740℃～

イニシャル IQ SQINはマイクロレイリング*に最適化された色設計と操作性のセラミックパウダーです。粒子が非常に細かく、オートグレース効果があり真空焼成のみでツヤが出るため、追加のグレース築盛工程を必要とせず製作時間を短縮できます。

*マイクロレイリング：厚みが約0.2mm～最大0.6mmの築盛。



SQIN専用のリキッドで マイクロレイリングに最適

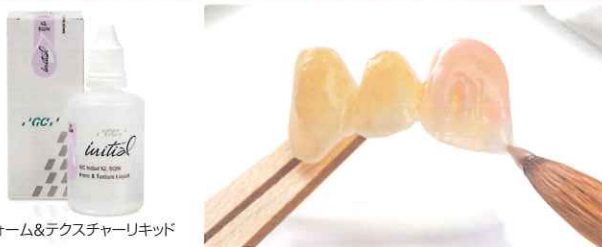

フォーム&テクスチャーリキッド

SQIN専用に開発されたフォーム&テクスチャーリキッドは、通常の築盛よりも乾きにくく表面のテクスチャーを再現しやすいように設計されています。

真空焼成のみでツヤが出る オートグレース効果



追加のグレース焼成を必要とせず、真空焼成でもツヤが出ます。グレース焼成の工程を減らすことで、より効率的に製作でき表面性状の維持が可能です。

ラスターペーストと組み合わせて ポーセレンワークをシンプルに




イニシャル IQ ONE SQINは、最小2ステップの焼成で完成可能な新しいコンセプトのセラミックシステムです。ラスターペーストを用いて色調調整とコネクションファイアリングを同時に行い、さらに SQINを一層築盛することで表面性状を付与し、立体的な表現が可能になります。

ラスターペースト ONEやラスターペースト(ガムシェード)、スペクトラムステインとの組み合わせで、約0.2mm～最大0.6mmの非常に薄い層でマイクロレイリングをすることが可能です。

レイヤー各層の厚み	平均厚み [mm]	最大厚み [mm]
ラスターペースト ONE/ガムシェード	0.05	0.1
SQIN	0.1	0.5
合計	0.15	0.6

*イニシャル IQ SQIN はマイクロレイリングに適した製品として設計しています。0.6mmを超える厚みで築盛する場合は、イニシャル LiSiやイニシャル Zr-FSをご使用ください。

カットバックのイメージ

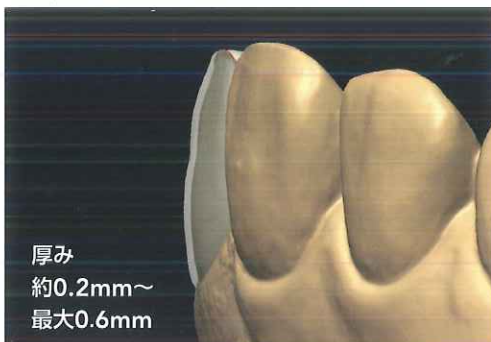

厚み
約0.2mm～
最大0.6mm



スキン
SQIN 築盛ステップ

LDS/Zrフレーム製作



ニケイ酸リチウムガラスセラミックスまたはジルコニアでフレームを製作します。

STEP 1 コネクションファイアリング



ラスターペーストで色調調整し焼成します。

STEP 2 SQIN築盛



SQINを一層築盛し、形態と繊細なテクスチャー、表面性状を付与します。

完成 焼成後



マイクロレイヤリングにより天然歯に近い色調と形態を再現でき、一回の焼成で美しいツヤと表面性状が得られます。



【使用製品】
イニシャル IQ ラスターペースト ONE



【使用製品】
イニシャル IQ SQIN



焼成スケジュールは
こちら

STEP 1 ラスターペーストによるコネクションファイアリング焼成スケジュール

	予熱温度・係留時間	乾燥時間	真空	昇温速度	焼成温度・係留時間
ニケイ酸リチウムガラスセラミックス	450°C 1 min	4 min	Yes	45°C/min	760°C 1 min
ジルコニア	450°C 1 min	6 min	Yes	45°C/min	850°C 1 min

STEP 2 SQIN焼成スケジュール

	予熱温度・係留時間	乾燥時間	真空	昇温速度	焼成温度・係留時間
ニケイ酸リチウムガラスセラミックス	400°C 1 min	8 min	Yes	40°C/min	740-780°C 1 min
ジルコニア	400°C 1 min	8 min	Yes	40°C/min	750-800°C 1 min

焼成スケジュールは、焼成炉とその機能に応じた調整が必要ですので、上記は目安とお考えください。

Zrフレーム製作



①色調調整・コネクションファイアリング



②SQIN築盛



完成



写真提供: ZTM Michael Brüsck, Germany

ラスターペースト ONEやラスターペースト(ガムシェード)、スペクトラムステインとの組み合わせで、歯冠部・歯肉部の色調再現のみならず蛍光性やオパール効果も付与した多彩な表現が可能になります。

各種ステイン材との組み合わせで
広がる表現力

①色調調整・コネクションファイアリング:
ラスターペースト ONE/ラスターペースト(ガムシェード)



②SQIN 築盛



イニシャル IQ ラスターペースト ONE

イニシャル IQ ラスターペースト (ガムシェード)

焼成温度:730℃~

イニシャル IQ ラスターペーストは通常のステイニングのように塗ることも、立体的に盛り上げることも可能な内部・外部ステインに使用できるペーストステインです。
歯冠色と歯肉色のラインナップがあり、熱膨張係数(CTE)に制限されることなく、すべてのイニシャル製品に使用できます。



歯冠色

ラスターペースト ONE

- 16色のカラーペーストをラインナップ。全て適度な蛍光性があります。
- 2種類の透明色をラインナップ。
 蛍光性を高めたL-NFL(ニュートラルフルオレッセンス)と蛍光性のないL-N(ニュートラル)があります。




L-OP
(オパール)



天然歯のエナメル質のような光学特性を有し、オパール効果を再現できます。

L-NFL
(ニュートラルフルオレッセンス)

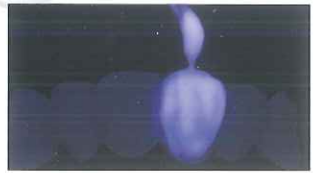

写真提供:MDT Leonardo Cavallo, Italy

蛍光性の低いジルコニア等の材料にも、天然歯のような蛍光性を与与できます。



歯肉色

ラスターペースト (ガムシェード)

- 5色のガムシェード(G-23,24,34,35,36)と、4種類のステインモディファイヤー(LP-M1~4)をラインナップ。
 ※ガムシェード:蛍光性なし



ラスターペースト同士であれば、歯冠部・歯肉部を同時にステイニングし、焼成することができます。




ペーストにステインモディファイヤーを加えることで、より多彩な表現が可能です。

コネクションレイヤーに使用可能



SQIN築盛時のコネクションレイヤー(焼き付け層)にも使用可能です。

グレージング効果

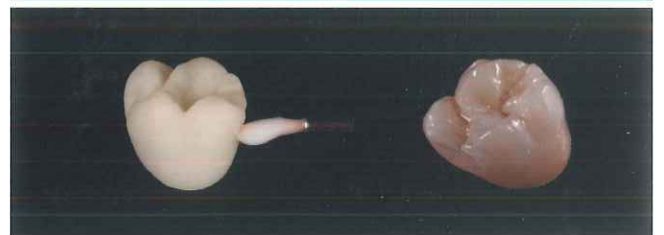

一般的なセラミックスパウダー同様に、焼成後にはグレージングの効果があります。

ラスターペースト専用

2種類のリキッド



リフレッシュリキッド

容器の中でペーストが乾燥してしまった場合に用いるリキッドです。容器の中に直接滴下しても、必要量だけミキシングディッシュ等に出し練和しても使用可能です。

※リキッドはよく振って、一滴入れることに流動性を確認しながら練和してください。



ディルーテイングリキッド

各種ペーストの流動性を調整する希釈液です。ペーストの粘度が高い場合は、必要量のペーストをミキシングディッシュ等に出し、練和してください。

※容器の中には、直接入れないでください。



注意

- ペーストに水が混入すると、斑点やヒビ割れの原因となります。筆等の水分にも注意してご使用ください。
- 通常のステインのように薄めすぎると色むらが起こる可能性があります。希釈し過ぎず、ペーストがゲル状となる程度で塗布してください。
- 色を薄めたい場合は、L-Nと混ぜてご使用ください。

イニシャル スペクトラムステイン

焼成温度：730℃～

イニシャル スペクトラムステインは熱膨張係数(CTE)に制限されることなく内部・外部ステインに使用できるオールマイティな**パウダーステイン**です。セット16色と追加色4色で、計20色のカラーラインナップがありすべてのイニシャル製品に使用できます。



2種類のグレース材



GL
(グレース)



GL-FLUO
(グレース フルオレッセンス)

グレースパウダーは蛍光性を高めたGL-FLUOと蛍光性のないGLの2種類があり、専用の2種類のリキッドを使用することで好みの粘稠度に調整し使用可能です。

症例に合わせた茶系色



SPS-17使用



SPS-17
ダークブラウン




SPS-9, SPS-10使用



SPS-9
ブラウン

SPS-10
ダークウォールナット

馴染みの良いイリュージョンカラー

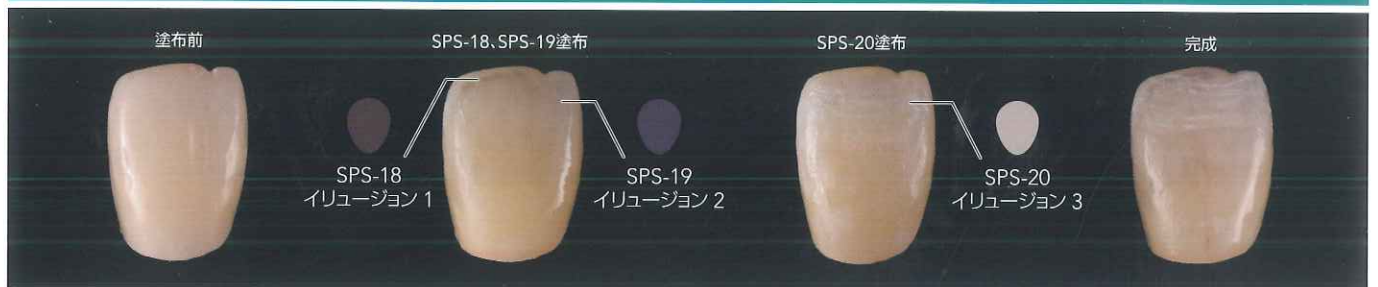

写真提供：RDT 鬼頭 寛之

追加色でより深みのある色調表現が可能に



SPS-17 ダークブラウン

スペクトラムステインで唯一、焼成後にツヤがなく焼き上がる濃い茶系色です。



SPS-18 イリュージョン 1

ラベンダー色で馴染みが良く、奥行きや透明感の表現が可能です。



SPS-19 イリュージョン 2

明るすぎず馴染みの良いブルーグレー色で透明感や立体感の表現が可能です。



SPS-20 イリュージョン 3

他のホワイト色よりも淡く、グレーを帯びた透明感のあるホワイト色です。

※セット包装には含まれておりません。

スペクトラムステイン専用

2種類のリキッド

2種類のリキッドを使い分けることにより、粘稠度を調整し、表面のテクスチャーを残しながらステイニングできます。

グレースペーストリキッド

ラスターペーストのように立体的に表現する場合

グレースリキッド

薄く塗布し、表面性状を残す場合



厚塗り



薄塗り





イニシャル製品の
詳細はコチラ

二ケイ酸リチウムガラスセラミックス・シリコニア用マイクロレイヤリング陶材

イニシャル IQ SQIN

包装	1函	¥73,000
シートセット		
デンチン4色(Body-A, Body-B, Body-C, Body-D) 10g各1個		
ブリーチデンチン(BL-D) 10g 1個		
エナメル4色(E-57, E-58, E-59, E-60) 10g各1個		
ブリーチエナメル(BL-E) 10g 1個		
トランスルーセントオパールブースター(TO-Booster) 10g 1個		
ガムシート3色(GUM light, GUM dark, GUM neutral) 10g各1個		
フォーム&テクスチャーキット25mL 1本		
ブラシ2 1本		
ミキシングディッシュ1個		
ミキシングディッシュ用プラスチックカバー1個		
カラーチャート1枚		

単品包装

製品名	容量	価格
Body-A, Body-B, Body-C, Body-D, BL-D, E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E, TO-Booster, GUM light, GUM dark, GUM neutral 1個	10g	¥5,150
フォーム&テクスチャーキット1本	50mL	¥3,200

歯科用陶材
ジーシー イニシャル IQ SQIN
管理医療機器 305AFBZX00063000



キャラクタライズ用ペーストセラミック

イニシャル IQ ラスターペースト ONE

包装	1函	¥93,000
Vシートセット		
ニュートラル2色(L-N, L-NFL) 4g各1個		
ボディ4色(L-A, L-B, L-C, L-D) 4g各1個		
エナメルエフェクト12色		
(L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10, L-V, L-OP) 4g各1個		
ディルレーティングリキッド8mL 1本		
リフレッシュリキッド8mL 1本		
ブラシ(00, 2)各1本		
ミキシングディッシュ1個		
ミキシングディッシュ用プラスチックカバー1個		
カラーチャート1枚		

単品包装

製品名	容量	価格
L-N, L-NFL, L-A, L-B, L-C, L-D, L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10, L-V, L-OP 1個	4g	¥5,200
ディルレーティングリキッド1本 リフレッシュリキッド1本	8mL	¥2,500

歯科セラミックス用着色材料
ジーシー イニシャル IQ ラスターペースト ONE
管理医療機器 305AFBZX00066000

キャラクタライズ用ペーストセラミック

イニシャル IQ ラスターペースト (ガムシート)

包装	1函	¥52,100
ガムシートセット		
ガムシート5色(G-23, G-24, G-34, G-35, G-36)各4g 1個		
ステインモディファイヤー4色		
(LP-M1, LP-M2, LP-M3, LP-M4)各3g 1個		
ディルレーティングリキッド8mL 1本		
リフレッシュリキッド8mL 1本		
ブラシ(00, 2)各1本		
ミキシングディッシュ1個		
ミキシングディッシュ用プラスチックカバー1個		
カラーチャート1枚		

単品包装

製品名	容量	価格
G-23, G-24, G-34, G-35, G-36 1個	4g	¥5,200
LP-M1, LP-M2, LP-M3, LP-M4 1個	3g	¥4,840
ディルレーティングリキッド1本 リフレッシュリキッド1本	8mL	¥2,500

歯科セラミックス用着色材料
ジーシー イニシャル IQ ラスターペースト
管理医療機器 222AFBZX00138000

別売

製品名	容量	価格
ブラシ00	1本	¥550
ブラシ2		¥680
ミキシングディッシュ	1個	¥3,850
ミキシングディッシュ用プラスチックカバー		¥550

キャラクタライズ用ステイン

イニシャル スペクトラムステイン

包装	1函	¥119,900
セット		
16色(SPS-1~SPS-16) 3g各1個		
GL 10g 1個		
グレースリキッド25mL 1本		
グレースペーストリキッド8mL 1本		
シートガイド1枚		

単品包装

製品名	容量	価格
SPS-1, SPS-2, SPS-3, SPS-4, SPS-5, SPS-6, SPS-7, SPS-8, SPS-9, SPS-10, SPS-11, SPS-12, SPS-13, SPS-14, SPS-15, SPS-16, SPS-17, SPS-18, SPS-19, SPS-20 1個	3g	¥5,700
GL 1個	10g	¥4,800
GL-FLUO 1個	10g	¥4,800
グレースリキッド1本	25mL	¥2,140
グレースペーストリキッド1本	8mL	¥2,380
シートガイド	1枚	¥25,600

歯科セラミックス用着色材料
ジーシー イニシャル スペクトラムステイン
管理医療機器 301AKBZX00012000

※掲載情報は2024年9月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー
公式アプリ

