

口呼吸予防

デンタルマウステープ

で快眠

口臭対策
歯並び

虫歯
歯周病

いびき
乾燥予防

風邪、感染症、アレルギー
などが気になる方

OK
テープを
はがさずに
ストローで
水分を取れます

口やのどの渇きを抑えて、口腔内のトラブルを軽減します。
歯科医院の指導のもと継続的なご使用をお勧めください。

初回A3サイズポスター付き

【使用方法】

●必ず鼻だけで呼吸できることを確かめてください。●使用前に口元付近の水分、クリーム、薬剤、汚れ等をきれいに拭き取ってください。●口を閉じ、はくり紙をはがしたテープの中心が唇の中央にくるように合わせ、しっかり貼ってください。※口全体をふさがらないこと。

【使用上の注意】

●本商品は使い捨てタイプです。●毎日貼り替えてください。●はがす時は、唇やまわりの皮フを傷めないよう、ゆっくりはがしてください。●お子さまには使用しないでください。●本商品は起床時の口やのどの渇きを軽減するために使用し、用途以外には使用しないでください。●鼻づまりや鼻風邪の時には使用しないでください。●自らの意思により本商品を着脱することができない方には、使用しないでください。●肌・唇の弱い方には使用しないでください。●肌がかぶれやすい人や、ニキビ、傷、はれもの、湿しんなどの異常がある場合は使用しないでください。●無呼吸症候群など医師から診断を受けている方は使用しないでください。

【保管上の注意】

●直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。●滅菌済ですので、個包装を破損しないようご注意ください。●再使用禁止。

患者様参考価格 1100円(税別)

1箱64枚

大きめで
安定した
サイズ

19mm
×
55mm

素材：不織布
アクリル系粘着剤

滅菌済みで衛生的

個包装



発売元
株式会社スギモト
横浜市港南区日野南1-21-5
TEL 045-832-3265
FAX 045-832-3204

製造発売元：阿蘇製薬株式会社