

泡タイプで
手軽に洗えて
スピーディー!



キラリ

泡
タイプ

幅広く使える口腔内装置洗浄剤
「キラリの泡タイプ」が新登場!

使用可能材料

矯正装置



- ・矯正用リテーナー
- ・部分床義歯、総義歯

マウスピース



- ・アライナー、ナイトガード等のマウスピース
- ・ノンクラスプデンチャーなど

総義歯・部分床義歯



フルーツ
ミントの香りの
もっちり泡



キラリ泡タイプ
患者さん向けリーフレットの
ダウンロードはこちら▶



お家でも、お出かけ先でも 短時間で手軽にキレイを保てる洗浄剤

キラリ泡タイプは待ち時間なく洗浄でき、洗い流した後もすぐに装着していただけます。
忙しい朝や食事の合間、休憩時間にも患者さんに手軽にできるお手入れとしておすすめです。



待ち時間なし！
忙しい時も簡単に
お手入れ可能！



きめ細かい
もっちり泡が
優しく汚れをキャッチ！



1本(100mL)でたっぷり
約125プッシュ分！



フルーツミントの
やさしい香りで
お子さまでも
使いやすい！

使用方法

※使用前には注意事項をお読みください。

STEP 1



口腔内装置の上に適量の泡を出してください。


[目安] 総義歯：2プッシュ
マウスピース：0.5～1プッシュ

STEP 2



約60秒間を目安に汚れが落ちるまで柔らかいブラシを用いてブラッシングしてください。

STEP 3

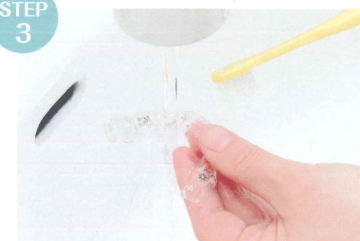

流水でしっかりすすいでください。

食事の合間、スキマ時間など 手軽にお手入れできる泡タイプ



口腔内装置洗浄剤 キラリ 泡タイプ

成分：増粘剤、界面活性剤
(脂肪酸系(非イオン))、
エタノール、有機酸塩、
有機酸、プロポリス、フラボノイド、
香料、キレート剤、着色剤、精製水
香り：フルーツミントの香り
液性：弱酸性
内容量：100mL(125プッシュ分)

関連商品



就寝前など義歯を
しっかり洗浄できる錠剤タイプ
義歯洗浄剤
フィジオクリーン キラリ錠剤
30錠入(3g×30) [セット包装：6箱入]

歯石が気になる方に
おすすめ！



自宅で手軽に
歯石を除去できる錠剤タイプ
義歯洗浄剤
フィジオクリーン 歯石くりん
30錠入(3g×30) [セット包装：6箱入]

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2024年5月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては製品の取扱説明を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社 ニッサン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社 モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> TEL:0800-222-8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com