

Tissue Conditioner

FLECTON

ティッシュコンディショナー フレクトン

選べる
2カラー

ピンク

ホワイト

やさしく、やわらかな
ティッシュコンディショナー



お好みの
フロー感に
調整可能

貼りかえ簡単

低アルコール
4%




義歯床用短期弾性裏装材
ティッシュコンディショナー
フレクトン

粘膜調整 / 機能印象 / 暫間裏装
標準価格 セット 6,800円

製品特長

調整可能なフロー感


粉計量容器に記された線を参考にして、粉量を調整することで好みのフロー感に調整いただけます。



実線 1.50g

**調整しやすい
やわらかタイプ**

義歯辺縁の修正や
クリアランスの狭い印象時には、
高フローのやわらかタイプ



点線 1.65g

**厚盛りしやすい
しっかりタイプ**

訪問診療で座位のできない
患者さまや義歯との隙間(不適合)
が多いときは厚盛りできる
しっかりタイプ

粉計量容器

“短時間で”はがしやすい

べたつかず、一体となってはがせるため簡単に貼りかえることができます。



低刺激でやさしい

低アルコールで苦みが少なく、ピリピリするといった患者さまへの負担がありません。

機能印象ができる


高い印象採得能があり、機能印象を取ることができます。

使用方法

処置も操作時間も
短時間!
※弊社従来品比べ

べたつかず、短時間で
トリミングが可能に!
※弊社従来品比べ

1 粉液計量

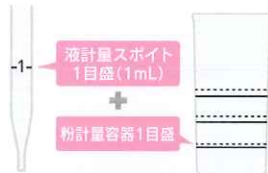

粉計量容器1目盛に対して液1mLを計量します。

[目安] — やわらかタイプ 1.50g
----- しっかりタイプ 1.65g

2 混和と盛り上げ



粉液がなじむ程度に、約20秒混和してください。その後、義歯床粘膜面に盛り上げ、表面を整えて口腔内に装着します。

3 口腔内保持



適切な咬合位で咬合せませす。約5分間口腔内で保持します。

4 トリミング



口腔内から取り出し、余分な本材をナイフやハサミで除去します。

義歯床用短期弾性裏装材

ティッシュコンディショナー
フレクトン

- 色調：ピンク/ホワイト
 - セット内容：粉100g、液100mL、スパチュラ、混和器、スポイト、粉計量容器、ノズルキャップ
 - 単品（粉）：粉100g、粉計量容器、ノズルキャップ
 - 単品（液）：液100mL、スポイト
 - 標準価格
- | | | |
|-------------|--------|------------|
| セット(ピンク) | 6,800円 | 204510030P |
| セット(ホワイト) | 6,800円 | 204510030W |
| 粉100g(ピンク) | 4,430円 | 204510031P |
| 粉100g(ホワイト) | 4,430円 | 204510031W |
| 液100mL | 2,330円 | 204510032 |



●認証番号：306AFBZX00044000
●管理医療機器 ●義歯床用短期弾性裏装材

ティッシュコンディショナーにも使える
入れ歯洗浄剤「キラリ泡タイプ」がオススメ!



口腔内装置洗浄剤
キラリ 泡タイプ

●標準価格 1,000円 204530569
●希望患者価格 1,180円

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2024年10月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の電子添文を入手し、必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社ニッシン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> TEL:0800-222-8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com