

# RETAINER SHINE

リテーナーシャイン

# Renewal!!

矯正用リテーナー洗浄剤「リテーナーシャイン 顆粒」が  
装いも新たにリニューアルします！



商品番号	包装
RSKN	24 個入

内容量  
150g  
(1回 2.5g)

## 従来品からの変更点 1

### パッケージが変わります！

デザインが変わり、ボトルごとにシュリンク包装が施されます。  
シュリンク包装は汚れなどから商品を保護し、容器の開封・改ざんを防止します。  
包装状態から新品（未開封）であることが確認できるため、安心安全にお使いいただけます。



## 従来品からの変更点 2

### 使い方が変わります！

従来品は水の後に洗浄剤を入れる方法でしたが、リニューアルした  
リテーナーシャインは洗浄剤の後に水を入れる方法に変更します。  
水を入れる時に発生する攪拌力により、  
さらに素早く顆粒を溶かすことができます。

従来品

リニューアル品





## 従来品からの変更点 3

### 洗浄力アップ！

金属へのやさしさはそのままに、洗浄力がアップしました！  
ステンやタバコのヤニを用いた試験において、従来品以上の洗浄力を  
発揮いたしました。また、口内炎や口臭の原因菌に対しても 99.9%  
の除菌力を確認いたしました。

データ提供：製造元による調査結果

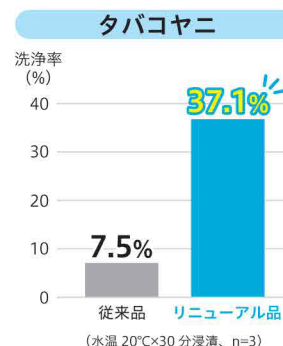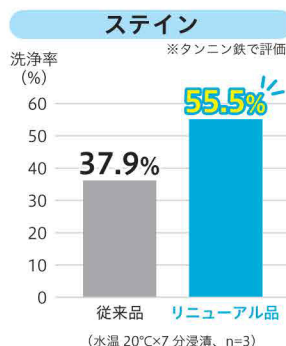

# リテナーシャインのココが良い!

## 早く溶け、洗淨力発揮

リテナーシャインは顆粒タイプですので、**水に溶けるのが早く、すぐに十分な洗淨力を発揮**します。

## 優れた除菌・洗淨力

### 活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワー!

義歯性口内炎原因菌、口臭原因菌、デンチャープラーク構成菌を99.9%除菌します。

## 金属にやさしい

リテナーシャインは従来品に引き続き、装置の金属部、特にロウ着部に対し悪影響を及ぼすことが少なく、**安心してご使用いただけます**。

## リテナーシャインの使い方

1

コップに付属のスプーンで、一杯(約2.5g)を入れた後、水またはぬるま湯(約150ml 40°C)を入れます。



2

水の色がブルーになりますので、装置を入れてください。



3

水の色が薄くなってきたら(約30分)、洗淨終了です。



4

コップから装置を取り出し流水でよく洗った後、口腔内に装着するか、よく乾かしてリテナーケースなどで保管してください。  
※使用後はボトルのフタを必ず閉めてください。



使い方の動画はこちら

## 別売 リテナーシャイン 専用ボトルキャップ

リテナーシャインの計量には専用のボトルキャップがおすすめです。

### 使い方

- 1回さかさに傾けると1回分の量が出てたまります。  
※最初の1回は計量のみで中身は出てきません
- 1回分を出す度につぎの分量が計量キャップ部にたまります。



キャップ装着時本体

商品番号	包装
RSC 206850800	1個入