

あなたの進化を、鈍らせない。




歯科麻酔用電動注射筒

i-JECT

# 使い方

## スタートボタン

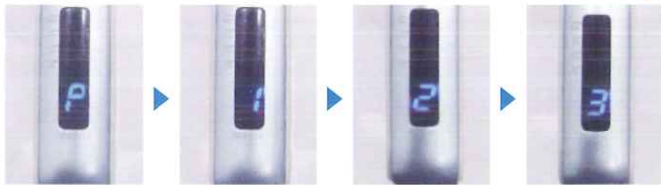


最低速

低速

中速

高速

[1回クリック]→注入開始(Pからスタート)  
速度切替(注入中)

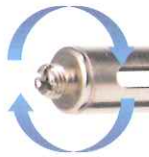

カートリッジホルダー  
360度回転可能

速度は4段階

## モード切替ボタン(QTY)

[長押し] モード切替

H:手動モード

A:自動モード

[1回クリック] 注入量の設定



1.8mlカートリッジに対して

25%

50%

75%

100%

## 電源ボタン

[長押し]  
電源のオンオフ

## バッテリー

バッテリーを入れたままで充電可能  
クレードルに挿入した予備バッテリーと  
同時に充電可能



## ストップボタン(Asp/II)

[1回クリック]→停止

[長押し]→射出部リセット

[ダブルクリック]→自動吸入

(セルフアスピレーション)

# スペック

## 構成品

 <p>寸法:W135mm×D34mm×H110mm 重量:100g</p>	 <p>寸法:Φ16 × 87.3mm 重量:20g</p>	 <p>寸法:W27mm×H50mm×D8.5mm 重量:約18g</p>	
<p>アイジェクト本体</p>		<p>1.8mlカートリッジ用ホルダー (ストレート・ネジ式) / 2個</p>	<p>専用バッテリー / 2個</p>
			
<p>充電クレードル / 1個</p>	<p>充電アダプター / 1個</p>	<p>専用カバー / 1箱(200枚入)</p>	<p>ユーザーマニュアル / 1部</p>

## 注入速度(1.8mlをすべて注入するまでにかかる時間)

<p>Hモード(手動モード)</p>	<p>Aモード(自動モード)</p>
<p>P(最低速):約465秒 1(低速):約202秒 2(中速):約125秒 3(高速):約47秒</p>	<p>約72秒 注射開始後、痛み感じにくくする独自のアルゴリズムに基づき、自動的に速度が上昇していく。(P⇒1⇒2⇒3)</p>

医療機器認証番号:306AGBZI00007000 一般的名称:歯科麻酔用電動注射筒 特定保守管理医療機器 販売名:アイジェクト  
【製造販売元】 株式会社ジオメディ 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚1-38-28 ジオビル TEL:092-409-4050

## バッテリー充電完了時間

約3時間

## フル充電での使用可能回数

1.8mlカートリッジで約20回  
※使用状況により、異なることがあります

## 価格



商品コード:0003630

アイジェクトスターターセット(ブルー)  
¥198,000(税込¥217,800)



商品コード:0003640

1.8mlカートリッジ用ホルダー(ストレート・ネジ式)  
¥7,000(税込¥7,700)



商品コード:0003641

1.8mlカートリッジ用ホルダー(アングル・ネジ式)  
¥9,000(税込¥9,900)



商品コード:0003650

専用バッテリー  
¥10,000(税込¥11,000)



商品コード:0003653

専用カバー(200枚入)  
¥6,000(税込¥6,600)

カートリッジホルダーの滅菌について:121°Cの高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)で15分以上  
※薬液消毒は薬剤の種類によって金属の腐食や変色を引き起こす可能性があるため注意する



【販売元】株式会社岡部  
〒815-0041 福岡県福岡市南区野間 4-4-32  
【TEL】092-561-8198 【FAX】092-561-8070  
【WEB】<https://okabe118.co.jp>

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせください。