

フィラー含有量 %	重合収縮率 Watts%	圧縮強度 Mpa	曲げ強度 Mpa	破壊靱性 KIC, MPa m <sup>1/2</sup>	硬化時間 ブライト・ナチュラル・ウォーム
重量比:78.5 体積比:63.3	1.73	361	151	1.89	LED照射器 :10秒 ハロゲン照射器:20秒

社内データ

## フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン ラインナップ



フィルテック™ イージーマッチ  
ユニバーサル コンポジットレジン  
ブライト

内容: シリンジ(4g) × 1本  
製品番号: 6120B  
希望医院価格: 3,600円



フィルテック™ イージーマッチ  
ユニバーサル コンポジットレジン  
ナチュラル

内容: シリンジ(4g) × 1本  
製品番号: 6120N  
希望医院価格: 3,600円



フィルテック™ イージーマッチ  
ユニバーサル コンポジットレジン  
ウォーム

内容: シリンジ(4g) × 1本  
製品番号: 6120W  
希望医院価格: 3,600円

## 関連製品



フィルテック™ フィル アンド コア  
フロー コンポジットレジン  
プラス

内容: シリンジ(2g) × 1本  
注入チップ × 20個  
製品番号: P4872U、P4872A1、  
P4872A2  
希望医院価格: 2,800円



フィルテック™ シュープリーム  
ウルトラ フロー  
コンポジットレジン プラス

内容: シリンジ(2g) × 1本  
注入チップ × 20個  
製品番号: P6032A1、P6032A2、  
P6032A3、P6032A3.5、  
P6032A4、P6032B1、  
P6032B2、P6032C2、  
P6032D2、P6032W、  
P6032XW、P6032OA3  
希望医院価格: 3,400円



フィルテック™ シュープリーム  
ウルトラ コンポジットレジン

内容: シリンジ(4g) × 1本  
製品番号: 5916A2D、5916A3D、  
5916A4D、5916A1B、  
5916A2B、5916A3B、  
5916A3.5B、5916A4B、  
5916B2B、5916A2E  
希望医院価格: 3,600円



スコッチボンド™ ユニバーサル  
プラス アドヒーズブ  
ボトルタイプ

補用品  
内容: ボトル(5mL) × 1本  
製品番号: 41294J  
希望医院価格: 13,200円  
ダブルパック  
内容: ボトル(5mL) × 2本  
製品番号: 41294W  
希望医院価格: 23,700円

販売名: フィルテック イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン 認証番号: 306AKBZX00036000 / 販売名: フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン 認証番号: 229AKBZX00030000  
販売名: フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン 認証番号: 222AKBZX00110000 / 販売名: フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン 認証番号: 221AKBZX00174000  
販売名: スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ 認証番号: 302AKBZX00043000 / 販売名: フィルテック P60 コンポジットレジン 認証番号: 21300BZY00372000  
販売名: フィルテック Z250 コンポジットレジン 認証番号: 21100BZY00250000

※掲載の内容および希望医院価格は、2025年2月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。  
Solventum およびそのロゴ、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社  
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.  
© Solventum 2025. All Rights Reserved.  
DEN-1879-AJ(0225)PN/e.

一般歯科コールセンター


☎0120-332-329

9:00~17:00 月~金 (土日祝年末年始を除く)



# フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン

Filtek™ Easy Match Universal Restorative

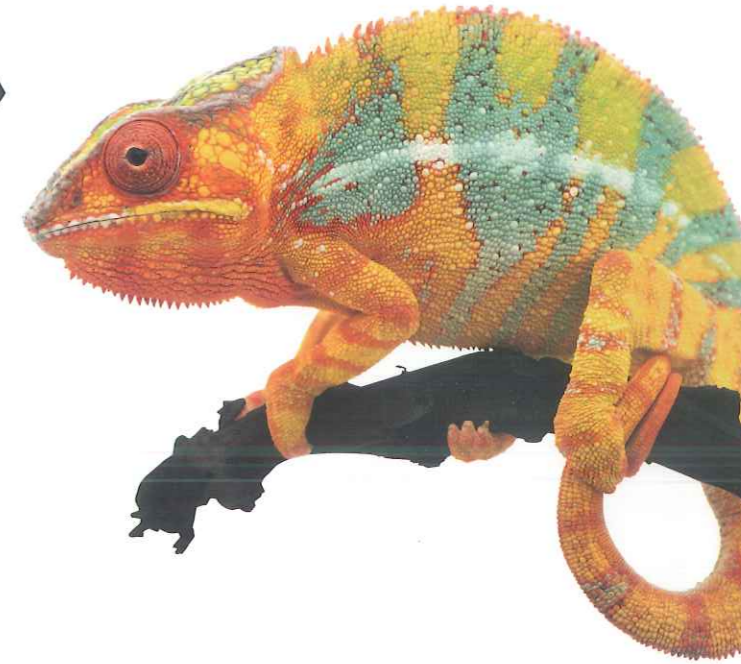

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

# 感覚的に選べるシェード

“ナチュラル”を基準に、歯質が明るければ“ブライト”、濃ければ“ウォーム”を選択ください。感覚的にシェードを選ぶことができます。




## 1つのシェードを選択するだけ

ブライト、ナチュラル、ウォームの3つのシェードから1つを選択するだけで、歯質との優れた色調適合性が得られます。



# 積層不要の遮蔽性


1つのシェードで厚みにより遮蔽性を表現。ブロッカーやオパークシェードが不要です。

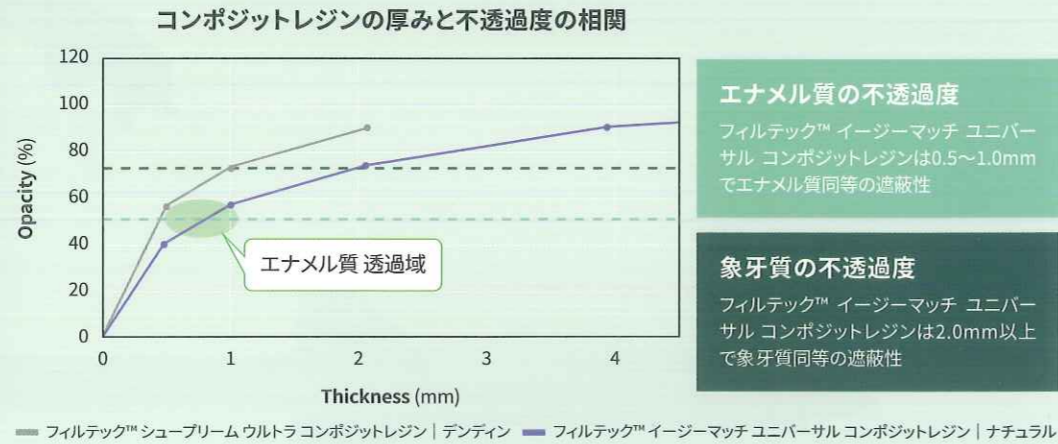

**エナメル質の不透過度**  
 フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン0.5~1.0mmでエナメル質同等の遮蔽性

**象牙質の不透過度**  
 フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン2.0mm以上で象牙質同等の遮蔽性


## 厚みによって遮蔽性・透明性をコントロール ブロッカーやオパークシェード不要

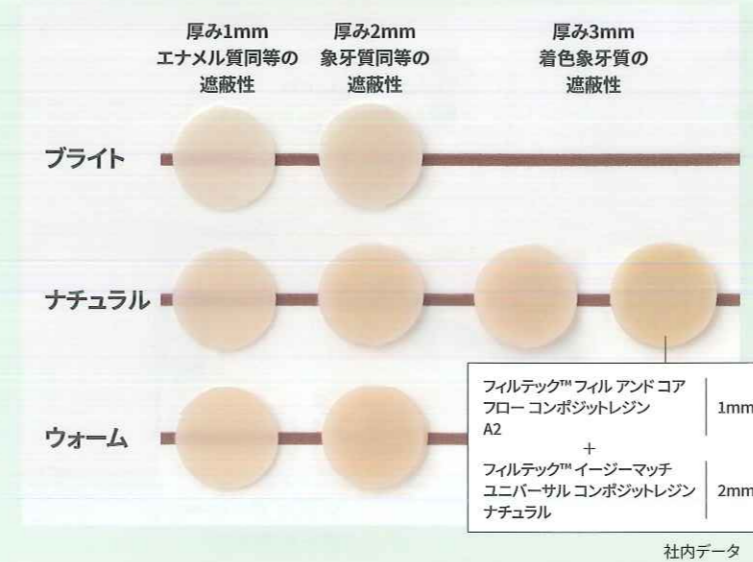

# 賦形性の良さ

## 独自のレジンマトリックステクノロジー


UDMA (ウレタンジメタクリレート)、Bis-EMA(6) ビスフェノールAポリエチレングリコールジメタクリレート)、およびBis-GMAの主成分に、PEGDMA (ポリエチレングリコールジメタクリレート)とTEGDMA (トリエチレングリコールジメタクリレート)を加えることで粘度を最適化。優れた賦形性を実現しました。

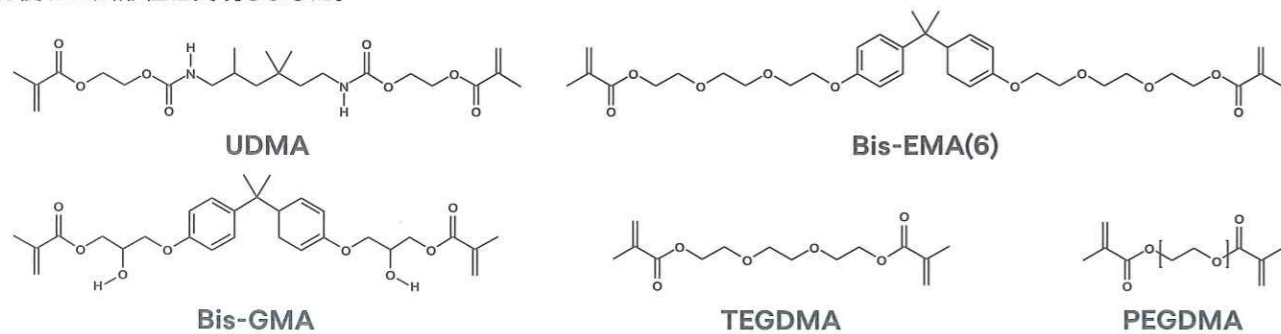

## 独自のナノフィラーテクノロジー


独自の“ナノフィラー” (シリカナノフィラーとジルコニアナノフィラー)と“ナノクラスター”の結合構造により、賦形性、滑沢性、耐摩耗性に優れた性能を実現しました。

### フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン

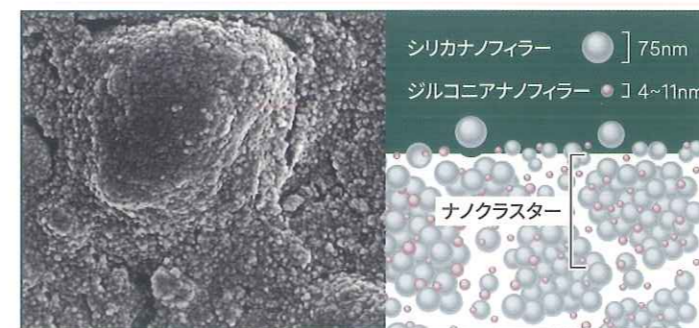

デコボコができにくく表面性状が維持されるため、ステインやプラークが付きにくくなる

### 従来のハイブリッドタイプ (弊社従来品\*)

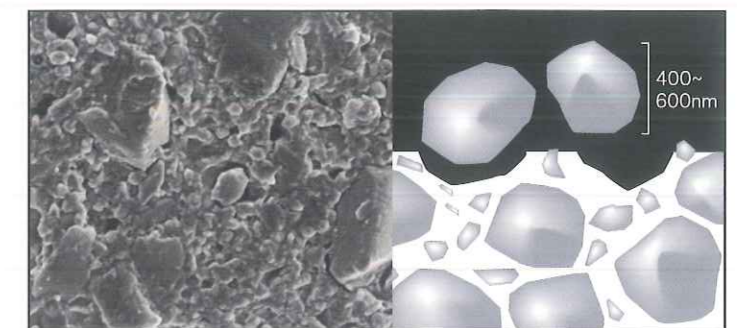

デコボコができやすく表面性状が損なわれるため、光沢が失われやすくステインやプラークが付着しやすくなる

\* フィルテック™ Z250 コンポジットレジン

ソルベンタムのコンポジットレジン技術を結集

# 3つのシェードで簡単に色合わせ ベタつきがなく簡単に賦形が可能な コンポジットレジン

Easy


簡単に

Match

調和する




## ソルベンタム コンポジットレジンの歴史

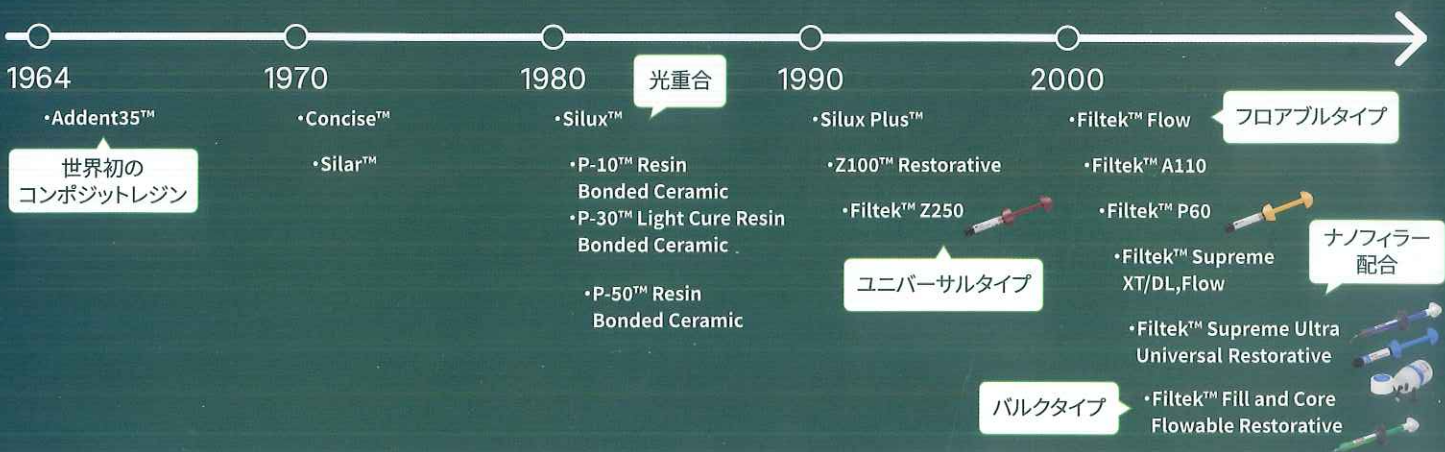





### 咬合面のエナメル質感

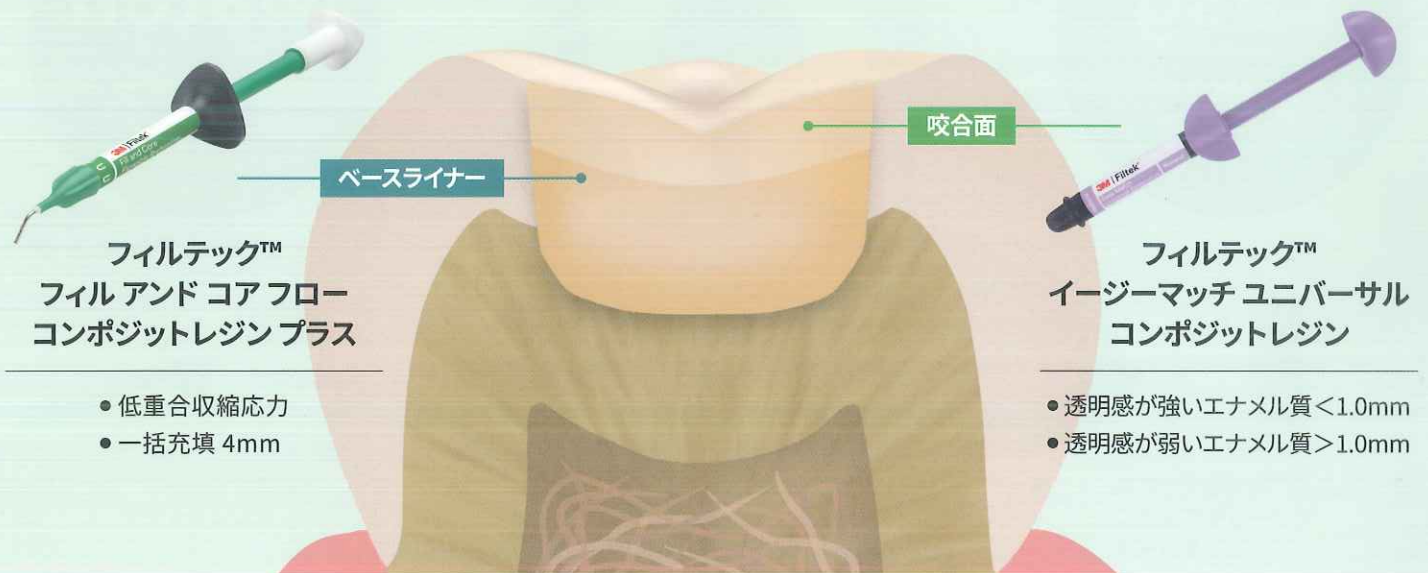

### 形態の維持力

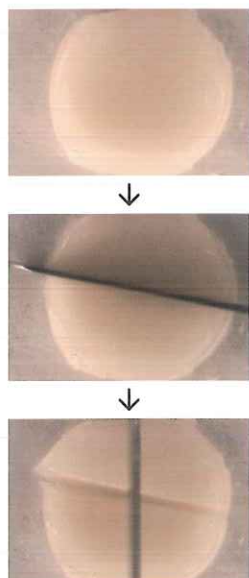

直後

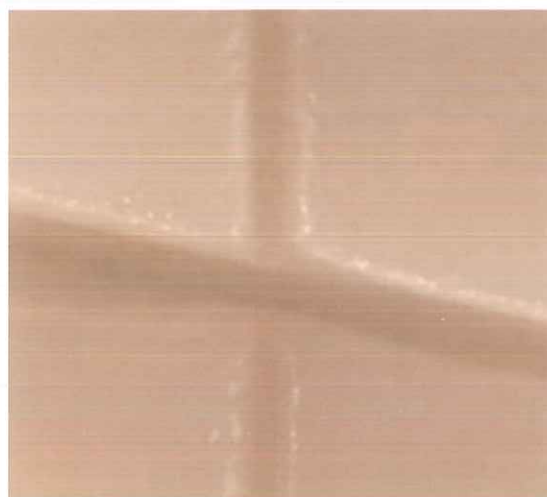

3分後

