

G-フロー ONE


シングルシェード充填用インジェクタブルレジン

保険適用

ユニバーサルシェードに
さらなる付加価値を



Since 1921
100 years of Quality in Dental

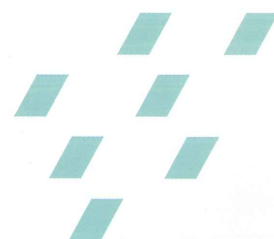

シンプル&スピーディ


1本で幅広いシェードに対応する ユニバーサルタイプのインジェクタブルレジン

最適化された光透過性・光拡散性・彩度

粒度の異なるフィラーの組み合わせにより光拡散性が向上し、
レジンマトリックス内部で色情報を拡散させ、より強力なカメレオン効果をもたらします。
これまでのGCのCR開発の経験を活かし、光透過性、光拡散性、彩度を最適化することで、
ワンペーストで様々な色調に適合するCR開発を達成しました。




光拡散性の低いCR
光が直進するので裏打ちが無いと透けて暗く見える

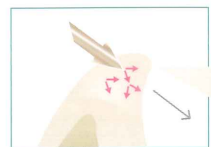

G-フロー ONE
最適化された光透過性と光拡散性により裏打ちが無くても色がなじむ

16シェードの人工歯に充填

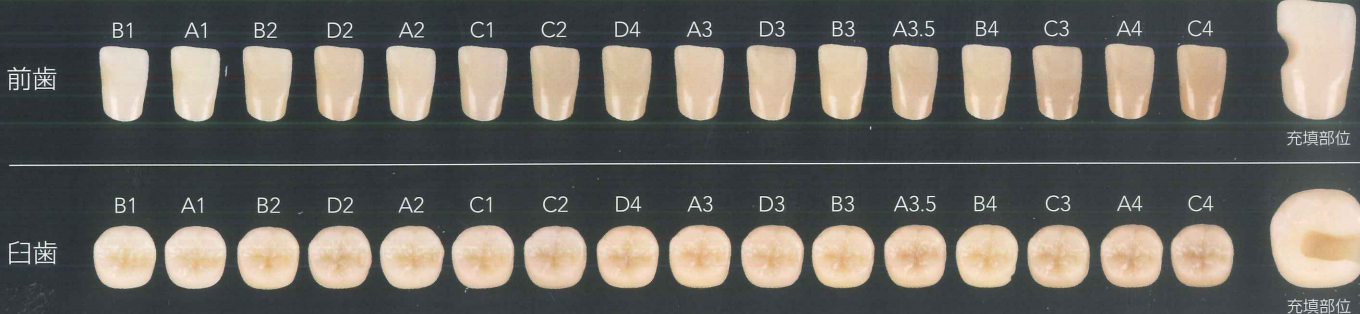


Point 1

ツヤが出やすく 研磨がラク



ツヤが維持する

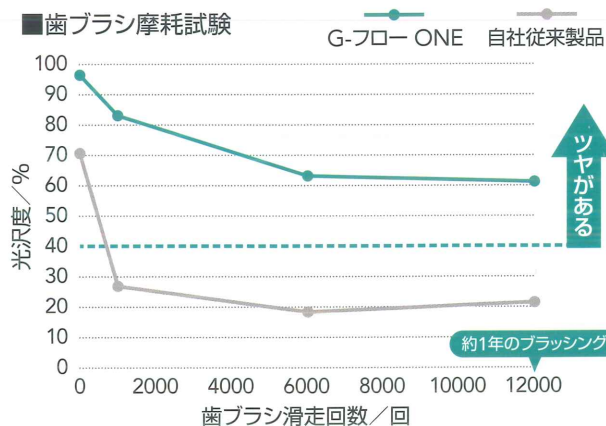

ジーシー研究所測定データ

長期的にツヤを維持

独自の技術を駆使したナノフィラーの均一分散化により、摩耗による表面フィラーの脱落が起こりにくく、脱落しても表面の凹凸が小さいためツヤが維持されます。

SEM画像



ジーシー研究所測定データ



Point 2

低吸水で着色しにくい

吸水量を大幅に抑制する独自のレジンマトリックス技術により着色しにくく、コンポジットレジン本来の色調を長期的に維持します。


■コーヒー着色試験

※2%のコーヒー水溶液に1週間浸漬

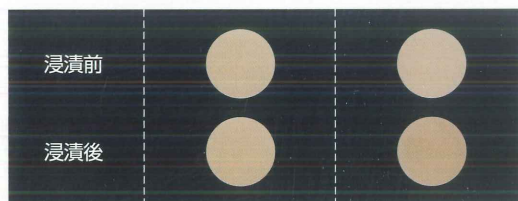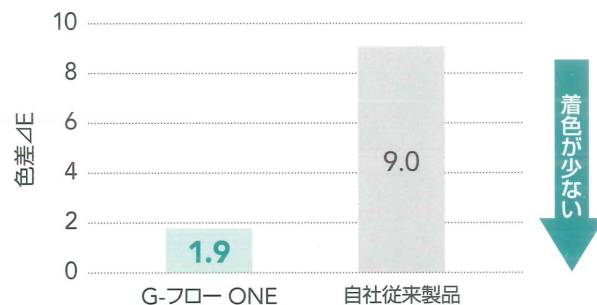

ジーシー研究所測定データ


〈従来のコンポジットレジン〉

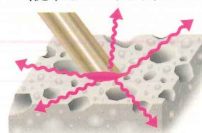

〈G-フロー ONE〉



イメージ

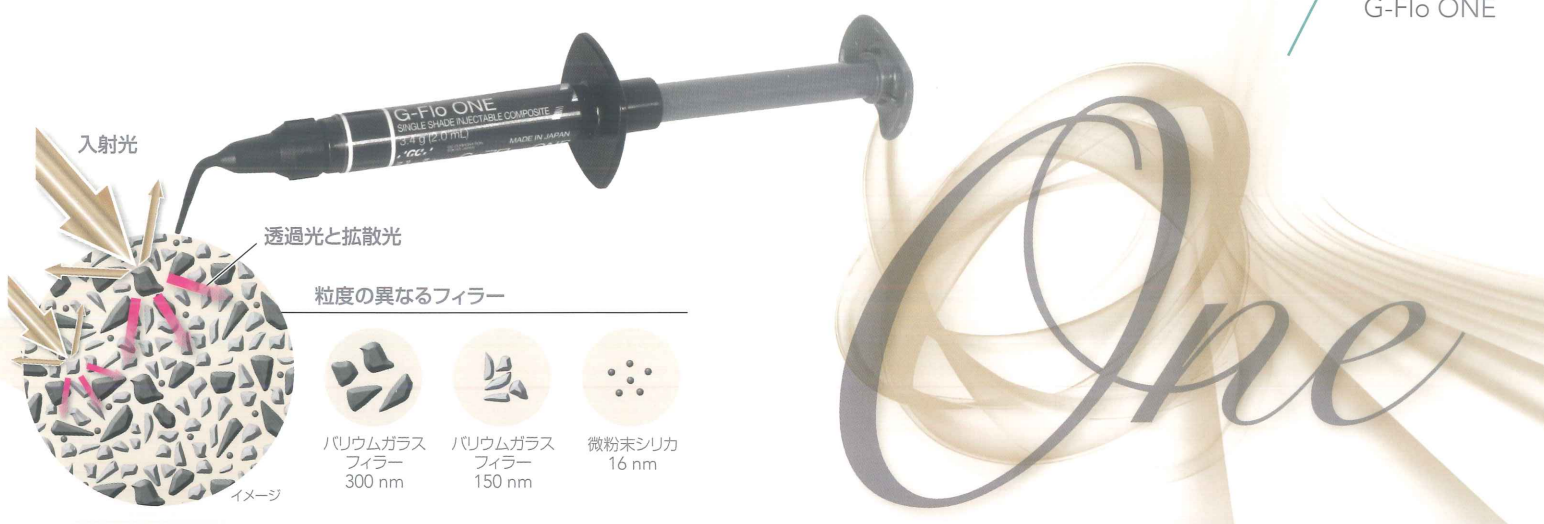

【症例】Ⅱ級窩洞



術前



窩洞形成後




ボンディング処理後、G-フロー ONE充填

Point 3

高い曲げ強度や耐摩耗性があり予後が良好


咬合面にも使用できる高い曲げ強度と優れた耐摩耗性を実現しました。

■三点曲げ試験

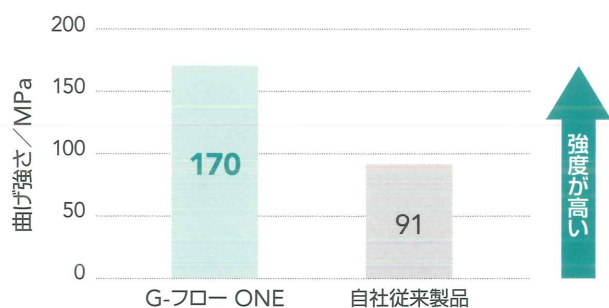

ジーシー研究所測定データ

■咬合摩耗試験

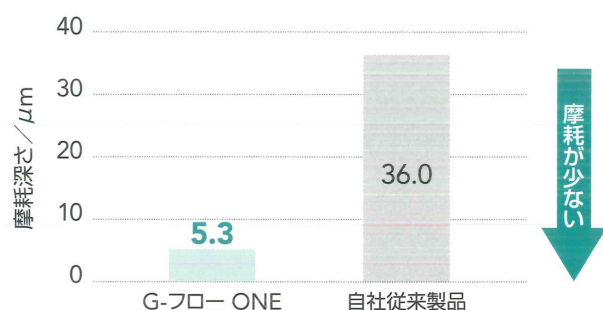

ジーシー研究所測定データ



Point 4

幅広い症例で充填しやすいフロータイプ

適度な流動性を持ち付形性が良く、形が崩れにくいフロー形状のため、オールマイティに使用できます。



G-フロー ONEにおすすめの症例

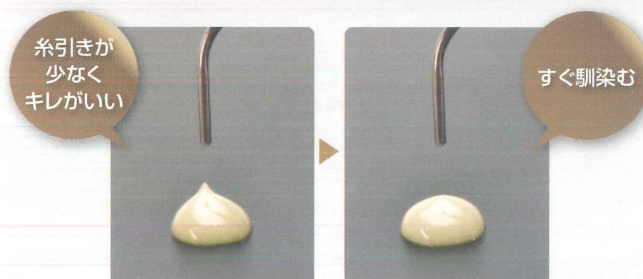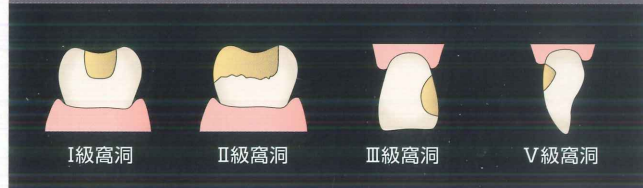

糸引きが少なく
キレがいい

すぐ馴染む

シングルシェード充填用インジェクタブルレジン

G-フロ- ONE

包装・希望医院価格●

1 函：シリンジ 3.4g (2.0mL) 1 本、フィリングチップⅢ プラスチック 2 個、
フィリングチップⅢ ニードル 1 個、フィリングチップ用キャップ 1 個 = ¥4,000

歯科充填用コンボジットレジン

ジーシー G-フロ- ONE

管理医療機器 306AKBZX00075000



別売

フィリングチップⅢ
ニードル

包装・希望医院価格●

フィリングチップⅢニードル 15 個、
フィリングチップ用キャップ 2 個
= ¥1,290

フィリングチップⅢ
プラスチック

包装・希望医院価格●

フィリングチップⅢプラスチック 15 個、
フィリングチップ用キャップ 2 個
= ¥1,290

関連製品



多目的光重合型1液性ボンディング材

G- プレミオ ボンド

包装・希望医院価格●セット1 函：G-プレミオ ボンド(5mL) 1 本、
ディスボザブルアプリーターⅡ 50 本、 ディスポティッシュ 20 枚
= ¥18,130

2 本包装1 函：G-プレミオ ボンド(5mL) 2 本 = ¥29,870

単品包装1 函：G-プレミオ ボンド(5mL) 1 本 = ¥17,310

ユニードセット1 函：G-プレミオ ボンド(0.1mL) 50 本、ディスボザブルアプリーターⅡ 50 本 = ¥20,600

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 /
歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 /
歯科用シーリング・コーティング材
ジーシー G-プレミオ ボンド
管理医療機器 226AABZX00098000



多目的光重合型2液性ボンディング材

G2- ボンド ユニバーサル

包装・希望医院価格●セット1 函：1-プライマー(5mL) 1 本、2-ボンド
(5mL) 1 本、ボトルカバー(1-プライマー用、2-ボンド用)各1 個、ディス
ポティッシュ20 枚、ディスボザブルアプリーターⅡ 50 本、テクニ
カルチャート = ¥16,480

単品包装：1-プライマー1 本(5mL) = ¥13,700

2-ボンド1 本(5mL) = ¥4,430

歯科用象牙質接着材
(歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 /
歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材)
ジーシー G2-ボンド ユニバーサル
管理医療機器 302AKBZX00045000

歯科重合用光照射器

スリムライト

包装・希望医院価格●一式=本体1 台、アイガード1 個、充電器1 個、AC
アダプタ1 個 = ¥98,000

別売

G-ライト プリマ/スリムライト 衛生カバー(50 枚) = ¥1,260
アイガード 1 個 = ¥1,130

歯科重合用光照射器 スリムライト
一般医療機器 13B1X00155000308
製造販売元 株式会社ジーシー

タイプ	仕上げ	ツヤ出し	仕上げ	ツヤ出し
形態番号	FP9762M	FP9762F	FP9769M	FP9769F
シャング種類/ ISOコード	RA(CA) 040	RA(CA) 040	RA(CA) 100	RA(CA) 100
回転数※2	20,000	20,000	20,000	20,000
注文コード	82195	82196	82197	82198
用途	レジン			

※1 例040：頭部最大径が4.0mm ※2 最大許容回転数/分

ポリッシャー

マイジンガー ポリッシャー

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーポリッシャー
一般医療機器 13B1X00155000277
製造販売元 株式会社ジーシー

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2025年6月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ

東京都文京区本郷3丁目2番14号

愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

