



インダイレクト
ボンディングトレー
作成ステップ
動画



印象採得後
CR 充填し圧接
ステップ
動画



複模型用透明シリコン印象材 PERFIT クリアマトリックス



作業時間※

1分30秒

口腔内硬化時間

3分

ショアA硬度

62

収縮率

<0.2%

使用期限

製造から**3年**

※室温（23℃）での作業時間です。
温度が高い場合は時間が短くなり、低い場合は時間が長くなる場合があります。



暫間修復物作成に用いる透明度が高く、適度な流動性があるシリコン印象材です。

- 光重合型コンポジットレジンの重合時に光を透過させることが可能です。
- 矯正のインダイレクトボンディングトレーとしても使用することが可能です。

PERFIT クリアマトリックス カートリッジ 2本入 (ベース、キャタリスト 計 50mL×2 本入)

※ミキシングチップは付属されていません。
※別途、ミキシングチップ（グリーン）をお買い求めください。

歯科医院様参考価格

¥4,900

一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料、歯科咬合採得用材料 医療機器届出番号: 13B1X10394300001
製造業者: Shandong Huge Dental Material Corporation (シャンドン ヒュージ デンタル マテリアル コーポレーション) (略称: Huge Dental 社)
製造国: 中華人民共和国

HUGE



PERFIT クリアマトリックスを使用した間接修復モックアップテクニック



1. 形成後、診断用模型を作製します。




2. 模型にワックスアップを行い、診断用ワックスアップ模型を作成します。



3. クリアマトリックスを模型に適用します。



4. クリアマトリックスを注入した既製透明トレーに診断用模型を正確に適合させます。

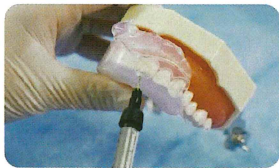

5. クリアマトリックスに光重合型レジン注入します。




6. レジンを光照射します。



7. 形態修正および研磨します。

クリアマトリックス用トレー マルチクリアトレー

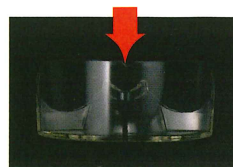

マルチクリアトレーの辺縁にある切り込みを正中に合わせて簡単に装着することができます。

内容：マルチクリアトレー 3個

材質：ポリアミド樹脂

サイズ：横 66mm× 縦 36mm× 高さ 29mm

歯科医院様参考価格 **¥3,900**