



歯科用口唇筋力固定装置/口腔・嚥下機能訓練器具

シャブリオ


1つで3種のトレーニング！

「食べる・話す・笑う」を
楽しくケア


syaburio
シャブリオ



01

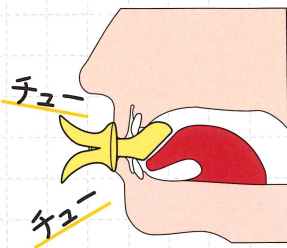


口唇閉鎖・空嚥下の トレーニング

おしゃぶりのように繰り返し吸う
運動です。

吸啜反射によって、啜えるだけで
トレーニング効果が期待できます。

02

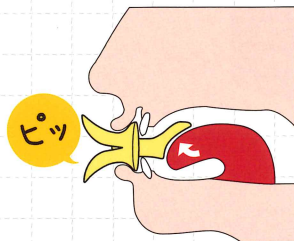


舌筋のトレーニング

唇の裏と歯の表側に挟み、舌で
押しつぶす運動です。

正しくトレーニングできれば笛が
「ピッ」と鳴ります。

03

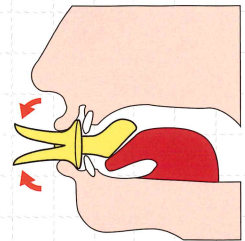

表情筋群のトレーニング

唇の裏と歯の表側に挟み、繰り返し
唇を「ギュー」と閉じて押しつぶす
運動です。

口唇閉鎖筋を使います。

トレーニング方法&組み立て方の詳細はこちら ▶

※本製品は組み立てが必要です。



SHOFU INC.




こんなお悩みを抱えた患者さまにおすすめです



Check!

- ✓ 食事中によくむせる
- ✓ 口が乾きやすい
- ✓ 食べこぼしが増えた
- ✓ 滑舌が悪くなったように感じる
- ✓ 口呼吸の癖を直したい
- ✓ 薬を飲み込みにくくなった

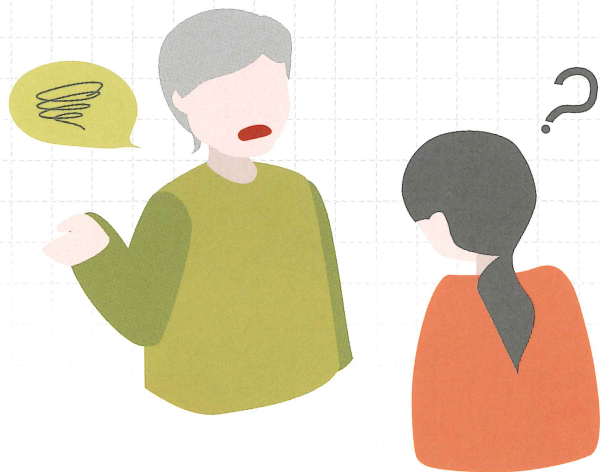

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
シャブリオ	歯科用口唇筋力固定装置 口腔・嚥下機能訓練器具	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000298

包装・価格

シャブリオ

【内容】

本体(フレンジ1、ニブル1、笛1、笛カバー1)、
取扱説明書1



ご使用の際は取扱説明書および電子添文等をよく読んでお使いください。

カタログに記載の価格は2025年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

仕様

型名	TDD-Y	
材質	フレンジ	シリコーンゴム
	ニブル	
	笛カバー	
	笛	アルミニウム、 ポリプロピレン
外形寸法 (組み立て時)	W58 × D70 × H40 (mm)	
質量	約 16g	
使用温湿度範囲	温度 -10 ~ 40℃、湿度 5 ~ 85%	
輸送・保管 温湿度範囲	温度 -10 ~ 50℃、 湿度 5 ~ 85%	

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

2508FCJSi-01