

干渉電流型低周波治療器

ジェントルスティム·EX

摂食嚥下リハビリテーションに新たな選択肢



Features

干渉電流による刺激療法で、上喉頭神経にアプローチ

痛みが少ない干渉電流

中周波領域の周波数を使用しているため、 皮膚抵抗値が小さく痛みが少ない電気刺激です。

干渉波刺激療法とは

干渉波刺激療法は中周波の刺激を適応しながら治療部 位には低周波数帯の干渉周波数を利用する刺激療法で 皮膚刺激が少なく効率的な電気刺激が可能となります。

干渉波イメージ 脂肪 50Hz干渉波 2種類の雷流が交叉し 神経を刺激



シンプルで簡単な操作性

·治療モードを選択し、出力を調整するだけで使用できます。 ·必要な情報はディスプレイで一目で確認できます。

ディスプレイの表示

- ·残り時間(*1)
- ·治療の設定時間(*2)
- ・見やすい電流レベル(*3)
- ·出力モード(*4)



安全機能

過電流保護機能

治療中に設定値を超える出力を制限し、ディスプレ イの表示とサイン音にてお知らせします。

パッド外れ検知

治療中に電極パッドが外れたとき、ディスプレイの 表示とサイン音にてお知らせします。

出力操作ロック機能 予期しない出力レベルアップを防止する「出力 アップロック」の機能があります。

複数の治療モードを搭載で、より広い電気刺激が可能に

複数の出力パターンから、治療目的や使用状況に適応した 出力パターン(治療モード)を選択できます。

モード	出力パターン	出力イメージ(出力値変化)
А	連続出力	← 刺激
В	変調(強弱) 出力	強刺激 弱刺激
С		

Specification

ジェントルスティム・EX

www.dental-plaza.com

出力電流 最大9mA(500Ω負荷抵抗) 治療タイマー 5、10、15、20、25、30分 外形寸法 65(W)×173(H)×30(D)mm

定格電源 DC 3.6V(内蔵リチウムイオン電池) DC 5V(ACアダプタ)

ACアダプタ 型番 UMVUU3012-050020SA 入力 100-240V 50/60Hz 最大出力 10VA(5V,2A) 出力電圧 5V

標準価格 本体セット 390,000円 202740002



標準付属品

ΔC アダプタ (UMVUU3012-050020SA)





別売品

ゲルパッド電極(CGD01) 3パック 2,880円 202740005



電極押さえシート(CGE51) 3パック 1,470円 202740010



ジェントルスティム·EX 一般的名称 干渉電流型低周波治療器 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)/特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 306AHBZX00044000