



歯科用咬合力計

口腔機能モニター Oramo2



住友理工

咬合力がその場でわかる
小児の咬合力測定にも

ポイント 1

リアルタイム表示

ディスプレイには、測定中の最大咬合力が表示されます。
即時フィードバックが可能です。

ポイント 2

軽量・ポータブル

乾電池式で、ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。
訪問診療にも活用できます。



注) センサーシート、
センサーカバーは別売です。



全歯の測定に加え、個歯の測定も可能になりました
小児や口の小さな方の検査にも適しています

※センサーシートの最大使用回数は50回です。ディスプレイに交換表示が出ましたら、新しいセンサーシートに交換してください。

SHOFU INC.

使用方法

簡単 3 STEP




1st
STEP



本体の電源を入れる

電源ボタンを2秒以上長押ししてください。


2nd
STEP

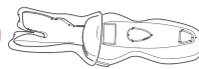

患者の口腔内へセンサーを挿入

センサーシート(Uタイプ)は、挿入の際、湾曲させても問題ありません。

3rd
STEP

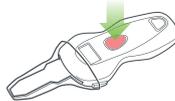

計測ボタンを押し、計測を開始

咬合力の最大値が表示されます。

製品仕様

■機器本体

名称	口腔機能モニター Oramo2
医療機器届出番号	23B2X10022000007
類別	機械器具 24 知覚検査または運動機能検査用器具
一般的名称	一般医療機器 歯科用咬合力計(JMDN コード70699000)
医療機器分類	クラスI 特定保守管理医療機器
測定内容	最大咬合力値
測定時間	約1秒～
表示範囲	Iタイプ:0~1300N Uタイプ:0~1999N (ただし計測精度保証範囲は100~500N)
測定精度	±10%(繰り返し性)
外形寸法	約245mm × 79mm × 40mm
本体重量	約160g(電池含む)



同梱物

- ・本体(1台)
- ・単4電池3本(1本予備付属)
- ・セミハードケース(1個)

センサーシート、センサーカバーは別売です

消耗品(別売)

(個歯用)



bf-センサーシート(Iタイプ)

入数: 1枚
最大使用回数: 50回
表示範囲: 0~1300N
精度保証範囲: 100~500N

(全歯用)



bf-センサーシート(Uタイプ)

入数: 1枚
最大使用回数: 50回
表示範囲: 0~1999N
精度保証範囲: 100~500N



bf-カバー(Iタイプ)

入数: 50袋



bf-カバー(Uタイプ)

入数: 50袋

※小児に使用する場合は、Iタイプセンサーを利用し、第二乳臼歯または第一大臼歯の一对で測定してください。

※「Oramo」、「オラモ」および「Oramo」ロゴは住友理工株式会社の商標または登録商標です。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店

 住友理工

〒485-8550 愛知県小牧市東三丁目1番地
TEL : (0568)77-2975 FAX : (0568)77-2976

製造販売元

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595