

口腔内装置洗浄剤

キラリ

／原寸大／



／くぼみがポイント
溶け残り改善！／

従来のパッケージより
36%コンパクトに
なりました！

高い洗浄力と
使いやすさはそのままに
パッケージが新しくなりました！

ヨゴレもニオイもスッキリ洗浄

キラリ錠剤は酸素系漂白剤の効果でヤニや茶渋などの着色汚れ、バイオフィルムによるヌメリや臭い、さらに二酸化チタンの効果でカンジダ菌を除菌・洗浄します。無香料タイプなので、洗浄後のお食事の邪魔にもならず、刺激臭が苦手な方にもお勧めできます。

しつこいヤニ汚れ等もしっかり洗浄!

40度程度のぬるま湯に30分以上浸けることで、綺麗で清潔な状態を保つことができます。一晩浸け置きすると、より洗浄効果が高まります。



洗浄前




洗浄中



洗浄後

カンジダバイオフィルムの除去効果

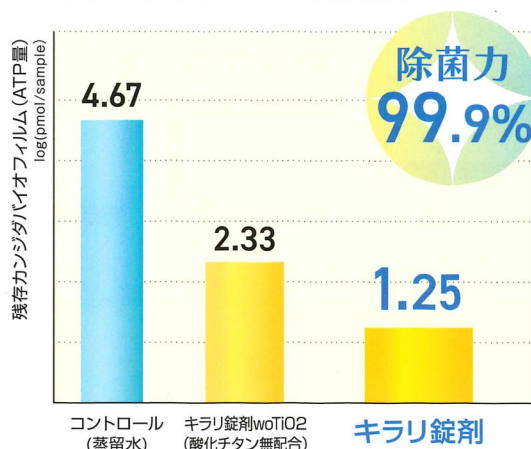

第52回日本歯科理工学会
「二酸化チタンを応用した義歯洗浄剤のカンジダバイオフィルムに対する除去効果」
(広島大学 二川浩樹ほか) より抜粋

中性タイプだから幅広い口腔内装置に対応!

使用可能口腔内装置

義歯




- ・総義歯
- ・金属床義歯
- ・3Dプリンター義歯



- ・部分床義歯
- ・ノンクラスプデンチャー

マウスピース

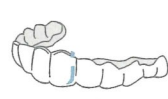

- ・マウスピース
- ・ナイトガード

矯正装置



- ・矯正用リテーナー
- ・アライナー

口腔内装置を痛めにくい中性タイプとなっているため、金属床義歯やチタン・パラジウム合金・矯正用リテーナーにも安心してお使いいただけます。

ティッシュコンディショナーにはお使いいただけません。

ティッシュコンディショナーの清掃には「キラリ 泡タイプ」がおすすめです。



口腔内装置洗浄剤

キラリ錠剤

30錠入(3g×30) セット包装: 6箱入

希望患者価格 980円(税抜き)

関連商品

口腔内装置洗浄剤 キラリ 泡タイプ

香 り: フルーツミントの香り
液 性: 弱酸性
内容量: 100mL
(125プッシュ分)

希望患者価格 1,180円(税抜き)

義歯洗浄容器 フィジオクリーン 入れ歯保温洗浄容器



外寸: W129×D94×H79mm(取手部含む)
内寸: φ83×H60mm

希望患者価格 1,170円(税抜き)

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2025年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の取扱説明を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社 ニッシン**

京都府亀岡市旭町樋ノ口88 〒621-0001
www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社 モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
お問合せ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用> TEL:0800-222-8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com