

Medience Infection Control Series  
**MEEB SPRAY**  
 ミーブ・スプレー

泡洗浄スプレー(酵素系)

MEEB SPRAY《ミーブ・スプレー》は  
 訪問診療など現場で洗浄できない時に  
 使用する泡タイプの予備洗浄剤

- 使用方法
- 【訪問診療】
    - 器材を蓋付容器に入れてムラのないようにスプレーします。
    - 蓋をしてから搬送して通常の洗浄を行います。  
 (スプレー後洗浄までの時間は問いません)
  - 【診療所】
    - スポンジやブラシに適量スプレーします。
    - 泡立てながら器材を洗浄または器材に直接スプレーして洗浄してください。

乾いてしまった汚れにも強い  
 ミーブ・スプレー(洗浄試験)

- 1 汚れ**  
 羊血を室温で30分乾燥させる。
- 2 スプレー**  
 乾燥させた器具にムラなくスプレーする。
- 3 洗浄**  
 スプレーを噴射した後、15分放置して器具を洗浄する。
- 4 すすぎ**  
 放置して洗浄した器具を十分にすすぐ。
- 5 綺麗**  
 タンパク質反応液(アミドブラック)で反応無し。予備洗浄は完了。  
 ※MEEB SPRAYをスプレーして搬送後、本洗浄を行ってください。



酵素系洗浄剤

【主成分】  
 界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤  
 (ほう酸)、金属腐食防止剤、トリエタノールアミン  
 内容量: 250ml・2L