



弱アルカリ酵素系洗浄剤

用手洗浄・浸漬洗浄・ブラッシング洗浄・
超音波洗浄器などに使える洗浄剤

MEEB WASH(ミーブ・ウォッシュ)は医療器材に付着した血液などタンパク質の汚れを落とすことが可能な弱アルカリ酵素系洗浄剤です。

MEEB WASH《ミーブ・ウォッシュ》は
医療器材の素材を選ばない
マルチ洗浄剤。
滅菌は洗浄の力から！

- 特徴
- 酵素と弱アルカリ性の相乗効果により高い洗浄力を発揮します。
 - 酵素本来の力が最大限活かせるよう酵素安定性を向上させています。
 - 医療器具の腐食を最小限に抑制します。
 - アルミニウム・銅・真鍮にも使用が可能です。

使用方法	推奨使用濃度	使用可能濃度	使用可能温度
用手 浸漬 ブラッシング 超音波	0.5% (10Lの水に 50ml)	0.3~2.0% (10Lの水に 30~200ml)	20~45℃ (推奨温度 45℃)

洗浄力試験

試験結果の比較

洗浄時間	ミーブウォッシュ	他社A	他社B
5分			
15分			

試験方法

被洗浄物: 血液汚染モデル(金属板に汚染モデルを塗布したもの)
試験液: ミーブ・ウォッシュ、他社品A、B
浸漬条件: 40℃の各試験液(各推奨の使用濃度)200mlに規定時間浸漬させ
汚れ落ちを評価。



弱アルカリ酵素系洗浄剤

滅菌は洗浄の力から！
医療器材の素材を選ばないマルチ洗浄剤

希釈率200倍!!

[使用方法] ●用手 ●浸漬 ●超音波

弱アルカリ性 1L

希釈率200倍!!

【主成分】
タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
内容量: 1L