

# クレンジシリーズ

口腔内装置洗浄剤総合カタログ

GC



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

ホイップクレンジ/タブレットクレンジ/ブラッシュクレンジ





## 汚れの状態や生活スタイルに合わせて 選べる2タイプ



### ホイップクレンズ

いつでも手軽にサッと使える

泡		
ブラッシング		
60秒		
毎食後のケアに	忙しい時のケアに	院内での洗浄に

### タブレットクレンズ

しっかり洗浄できる


錠剤		
浸けおき		
5分～一晩		
就寝中のケアに	しつこい汚れのケアに	カンジダ菌の除菌に

## 患者さんに合わせたお手入れ習慣を提案!

	マウスピース・矯正装置	義歯
口腔内装置の種類	<p>ナイトガード ホワイトニング用マウストレー スポーツ用マウスガード など</p>	<p>部分床義歯 総義歯 ノンメタルクラスプデンチャー</p>
汚れの特徴	<p>唾液や細菌など、目に見えない汚れ</p>	<p>デンチャープラークや着色など、目に見える汚れ</p>
おすすめのタイミング	使用後	食後 + 就寝前
	<p>ホイップクレンズ 60秒ブラッシング</p> <p>or</p> <p>タブレットクレンズ 5分浸けおき</p>	<p>ホイップクレンズ 60秒ブラッシング</p> <p>タブレットクレンズ 一晩浸けおき</p>

## 口腔内装置のお手入れは大切!

正しいお手入れをしないと


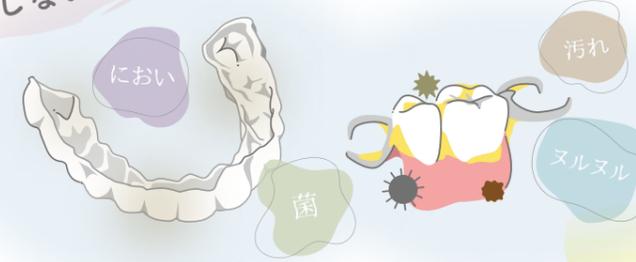


プラークや菌が堆積します


## 口腔内装置のお手入れの現状

Q 主なお手入れの方法をお答えください。 ※株式会社ジーシー調べ 2024年7月 対象:口腔内装置使用者(その他を除く) 2,403名

多くの方が何らかの洗浄剤を使ってお手入れをしているが...

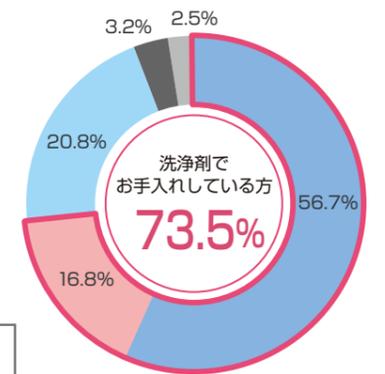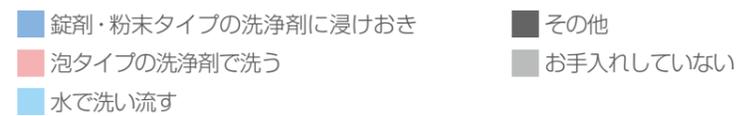


Q 入れ歯・マウスピース・リテーナー・マウスガードのお手入れで困っていることは? ※株式会社ジーシー調べ 2024年7月 複数回答、一部抜粋

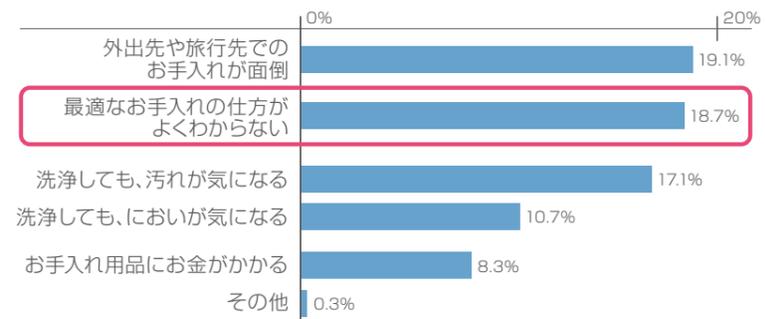

正しいお手入れ方法を知らない方も


## 誤ったお手入れをすると...

汚れが落としきれない

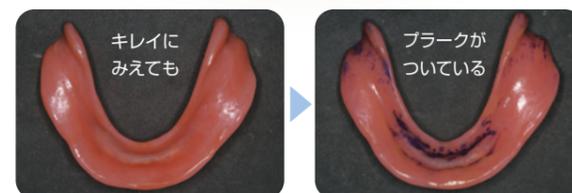

※プラークチェックジェル BRで染め出し

口腔内装置を傷つけてしまう

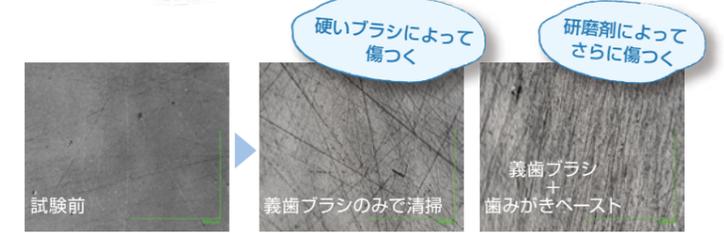

※株式会社ジーシー試験結果

# 手軽にサッと使える泡タイプ ホイップクレンズ



## 60秒のブラッシングでスピード除菌

口腔内装置に付着した、細菌・においの原因菌を99.9%除菌\*できます。

バイヨネラ菌

99.9%  
除菌

P.gingivalis菌

肺炎桿菌

\*全ての菌に効果があるわけではありません


## 汚れに密着するホイップ泡

きめ細かく垂れにくい泡が口腔内装置に  
しっかり留まります。



## 口腔内装置にやさしい

研磨剤無配合のため、口腔内装置を傷つけにくく、安心してお使いいただけます。

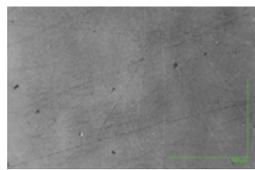


試験前



歯みがきペースト  
+  
義歯ブラシ

研磨剤によって  
傷つく

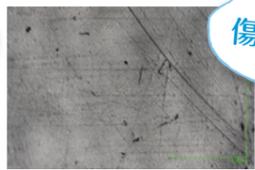

ホイップクレンズ  
+  
義歯ブラシ

傷が少ない

<試験方法>  
#2000で研磨したアクリルを200g圧で60秒間ブラッシング。  
前後の表面性状を光学顕微鏡にて確認。  
使用義歯ブラシ:プラティカデンチャーブラシ

## 使い方



1プッシュ▶マウスピース・部分床義歯  
2プッシュ▶総義歯

口腔内装置に泡をのせる。  
※必要に応じて量を調整してください



2 専用ブラシや大きめの歯ブラシが  
おすすめ

やわらかいブラシで60秒  
を目安に全体を磨く。



流水でしっかりすすぐ。

洗浄後すっきり!  
ミントの香り



使い方を  
動画で確認



洗浄後の爽快感を体験

院内での  
洗浄に

毎日の  
お手入れに

院内と同じケアをご自宅でも



泡の洗浄剤

### ホイップクレンズ

香り●ミント  
内容量●2種=180mL(約240プッシュ)  
990mL(約1000プッシュ)  
包装・希望患者価格●180mL:1本=¥1,200(税込)  
製造元 サラヤ株式会社  
大阪市東住吉区湯里 2-2-8

【歯科用】

【医院用】

# しっかり洗浄できる錠剤タイプ タブレットクレンズ



## 5分の浸けおきでスピード除菌

口腔内装置に付着した、細菌・カビの一種・においの原因菌  
を99.99%除菌\*できます。

バイヨネラ菌

カンジダ菌

泡タイプでは  
難しいカンジダ菌  
にも対応

肺炎桿菌


99.99%  
除菌

P.gingivalis菌

\*全ての菌に効果があるわけではありません

## マルチユース

防サビ剤を配合した弱アルカリ性で、金属パーツを含むリ  
テーナーや部分床義歯など幅広い口腔内装置にお使いいた  
できます。

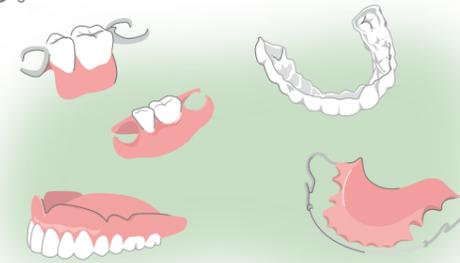

<使用できる材料>

- コバルトクロム合金
- 金銀パラジウム合金
- 純チタン
- チタン合金
- ステンレス
- 各種マウスピース用樹脂
- 義歯床用レジン
- ノンメタルクラスデンチャー用樹脂\*

\*指定の洗浄剤の使用を推奨している場合は、専用  
の洗浄剤をご使用下さい。

	コバルトクロム合金	純チタン	チタン合金
浸漬前			
タブレットクレンズ 浸漬後			

\*ごく一部の金属は変色することがありますので、その場合はすぐに使用を中止してください。  
全て株式会社ジーシー試験結果

## 隅々までしっかり洗浄

酵素&酸素系漂白剤を配合。  
酵素が食べかすなどのタンパク汚れを分解し、  
漂白剤が着色汚れをきれいに除去します。

	浸漬時間				
	5分	10分	15分	30分	60分
精製水 のみ					
精製水 + タブレット クレンズ					

<試験方法>

- ①150mLの精製水(30℃)に、タブレットクレンズを投入。
- ②完全に溶解させた後、5枚のソイルプレート\*を漬け込む。
- ③所定の時間ごとに1枚ずつ取り出し、精製水で軽くゆすぎ、風乾。
- ④目視で汚れの落ち具合を確認。

\*AM型ソイルプレート：タンパク質、茶渋汚れ(有機物汚れ)

## 使い方



1 泡タイプ洗浄剤を使用すると口腔  
内装置を傷つけにくい



2 40~50℃のぬるま湯がおすすめ

専用ブラシで目に見える  
汚れを落とす。

150~200mLのぬるま湯  
または水に1錠入れる。



3 特にひどい汚れの場合は一晩



口腔内装置を5分浸漬する。浸漬後は流水でよくすすぐ。



選べるデザイン

裏面は  
説明にも使える

義歯・マウスピース用錠剤タイプ洗浄剤【歯科用】

### タブレットクレンズ

香り●ミント  
液性●弱アルカリ性  
内容量●48錠  
包装・希望患者価格●1函=¥950(税込)

やさしく磨ける清掃ブラシ

# ブラッシュクレンズ

## 使いやすいツインヘッド

白い毛

<やわらかめ>



やわらかい先細の先端形状で、マウスピースの咬合面などの隅々まで磨きやすくなっています。



先端まで5列植毛



自社従来品



先端は1列植毛



ブラッシュクレンズ

適度な柔軟性で毛先がフィット

## 手にフィットするハンドル



くぼみをつけた形状と広めに配置したラバーにより、握りやすくなっています。

コシのあるコンパクトなタフト形状で、義歯のくぼみやクラスプ周囲などの細かい部分も磨きやすくなっています。

青い毛

<かため>



※ほぼ原寸大



義歯・マウスピース用清掃ブラシ 【歯科用】

ブラッシュクレンズ

色調●2種=ネイビー、オレンジ

包装・希望患者価格●1本=¥400(税込)

※掲載情報と価格は、2026年3月現在のものです。  
※希望医院価格には消費税は含まれておりません。  
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 **株式会社 ジーシー**

東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286

iPhoneも Androidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

