

業務用 歯科用吸引システムパウダー汚泥洗浄剤

塩素系

アルカリ性

液体

MedShine パウダークリーナー

分離機・配管の詰まり・
吸引力低下・臭い対策に



詰まりを予防

分離機詰まりの原因となる配管内・分離機内部の汚れを分解し、強力に除去。配管詰まりによるトラブルを未然に防ぎます。

※吸引力低下が配管内・分離機内の汚れに起因する場合、改善効果が期待されます


臭いを抑制

配管および分離機内に蓄積し、臭いの原因となりやすい汚れを除去することで、内部から発生する臭いを軽減します。

洗浄時間を短縮

受け網などユニット内部の汚れや染め出し液などの着色汚れが落としやすくなり、日常のお手入れや洗浄作業の時間短縮に貢献します。

洗浄力試験

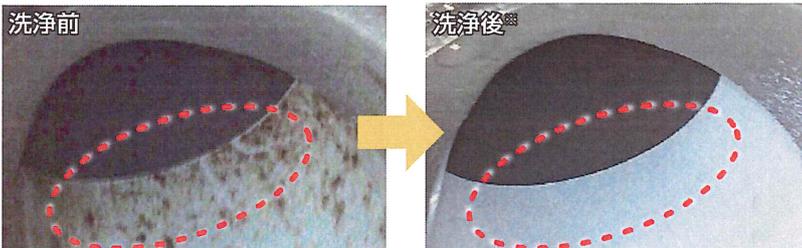

吸引システムの配管内に汚れが蓄積し、黒ずみが確認される。

※20倍希釈液を継続使用(1カ月後の画像) 黒ずみが除去されている。

使用方法

歯科用吸引システム・分離機の洗浄と消臭

- 使用量の目安：20倍希釈



毎日1~2回、診療終了後に、20倍希釈液(洗剤20mlを水400mlで希釈)をユニットの吸引管から吸引する。汚れの程度に応じて10~30分間放置し、その後すぐのため水を400ml吸引する。

商品データ

品名	メドシャイン パウダークリーナー 2.5L
荷姿	2.5L×6本/ケース
商品寸法*	105mm×141mm×272mm
ケース寸法*	442mm×233mm×278mm
積載可能段数	3段
商品コード	224963
JANコード	4975657436464
ITFコード	14975657436461

成分表示など

◆液性	アルカリ性
◆成分	カルボン酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、塩素系漂白剤

小分けツール(別売り)



品名: 出し口(バラ)
商品コード: 901209

※寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
※商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

お問い合わせは・・・



〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10
TEL-06-6395-2717