



CAD/CAM冠対応 レジンブロック 健保適用

松風ブロック HC シリーズ

インレーに適した色調・サイズの ラインアップが増えました NEW

透明度の高いHT系統色、エナメル色、無駄なく使えるSサイズを追加

SHOFU BLOCK HC SERIES



機能区分、サイズ、色調が豊富な CAD / CAM 用レジンブロック

SHOFU INC.

インレー用に、ラインアップを

インレー用に適した色調・サイズを追加し、ラインアップを強化しました。
さらに症例に合わせた材料選択が可能になりました。



インレーに適した 色調

透明度の高い
HT系統色・エナメル色の
ラインアップ充実!



└4 松風ブロック HC A3-HT



└6 松風ブロック HC スーパーハード A3-HT

インレーに適した サイズ

無駄なく使える
Sサイズを大幅に追加!


Sサイズは主にインレー、小臼歯用
M、Lサイズはクラウン用

[Sサイズ] D 10.0mm×W 12.0mm×H 16.0mm
[Mサイズ] D 12.0mm×W 14.0mm×H 18.0mm


症例に適したサイズを選択することで、
ブロックを無駄なくお使いいただけます。

インレーを
SサイズおよびMサイズに配置した場合の比較画像

Sサイズ

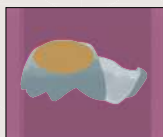

Mサイズ

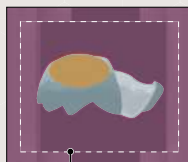

切削される部分

Sサイズ相当

※ インレーの大きさは症例により異なります。

CAD/CAMインレー用 窩洞形成のポイント

1 窩洞の形状

正確なスキャニングと加工
ができるよう丸みのある形
成が必要です。



2 窩洞壁のテーパ

歯軸に対して3~5°に設定
してください。



3 咬合面の厚み

小臼歯の場合、咬合面部
1.2mm以上。



充実させました。

松風独自の色調設計により、自然な仕上がりです。

色調解説

【LT色】

一般的な硬質レジン材料のボディー色に近似した透明性に設計されています。白歯部クラウンの作製に適しています。

【HT色】

LTよりも透明性が高く、インレー、前歯部クラウンの作製に適しています。

【59/OC (エナメル色)】

59: インサイザル、OC: オクルーザル。エナメル部の再現が主となる症例に適しています。



CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 健保適用

松風ブロック HC

小白歯
対応

曲げ強さ **117MPa**
(37℃水中浸漬7日後 代表値)

NEW 赤字が新規追加の色調・サイズです。

より天然歯に近い審美性・蛍光性を備えたレジンプロック

LT	A1 S.M	A2 S.M	A3 S.M	A3.5 S.M	W2 S.M	B3 S.M	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2 layers</div> <p>【色調】 A1 / A2 / A3 / A4 【サイズ】 S.M</p>
HT	A1 S.M	A2 S.M	A3 S.M	A3.5 S.M	OC S.M	59 S.M	

層比率

エナメル質と象牙質の2層をもち、より天然歯に近い印象を与えます。



※ 色調はイメージです。



CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 健保適用

松風ブロック HC ハード II

小白歯
対応

曲げ強さ **228MPa**
(37℃水中浸漬7日後 代表値)

NEW 赤字が新規追加の色調・サイズです。

曲げ強さにすぐれ、物性のバランスがとれたレジンプロック

LT	A1 S.M. L	A2 S.M.L	A3 S.M.L	A3.5 S.M.L	A4 S.M.L	HT	A1 S	A2 S	A3 S	A3.5 S	59 S
-----------	----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	-------------------------	----------------

※ 色調はイメージです。



CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) 健保適用

松風ブロック HC スーパーハード

大白歯
対応

曲げ強さ **288MPa**
(37℃水中浸漬7日後 代表値)

NEW 赤字が新規追加の色調・サイズです。

大白歯で使用できる高強度なレジンプロック

LT	A1 S.M	A2 S.M	A3 S.M	A3.5 S.M	A4 S.M	HT	A1 S	A2 S	A3 S	A3.5 S	59 S
-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

※ 色調はイメージです。

販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00070000
松風ブロック HC ハード II	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00035000
松風ブロック HC スーパーハード	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 231AKBZX00002000

包装・価格



松風ブロック HC

単層

【サイズ】2種類：S,M

【色調】LT6色：W2-LT、A1-LT、A2-LT、
A3-LT、A3.5-LT、B3-LT
HT4色：A1-HT、A2-HT、A3-HT、
A3.5-HT

エナメル2色：59、0C

※ A3.5-HTはSサイズのみです。

Sサイズ(5個入)

Mサイズ(5個入)

2レイヤー(2層)

【サイズ】2種類：S,M

【色調】4色：A1-2L、A2-2L、A3-2L、A3.5-2L

※ 2Lは2Layer(2層)を表しています。

Sサイズ(5個入)

Mサイズ(5個入)



S, Mサイズ



Lサイズ

松風ブロック HC ハード II

【サイズ】3種類：S,M,L

【色調】10色：A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT、
A1-HT、A2-HT、A3-HT、A3.5-HT、59

※ HT色、59はSサイズのみでの発売です。

Sサイズ(5個入)

Mサイズ(5個入)

Lサイズ(1個入)



松風ブロック HC スーパーハード

【サイズ】2種類：S,M

【色調】10色：A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT、
A1-HT、A2-HT、A3-HT、A3.5-HT、59

※ HT色、59はSサイズのみでの発売です。

Sサイズ(5個入)

Mサイズ(5個入)

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2026年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595