


Infection Control
Multi-Function Enzyme
For Manual Cleaning
For Ultrasonic Cleaning
For AER

多機能酵素洗剤

ENDOCEPT™

プレミアムな多機能酵素が
前洗浄クオリティに貢献する

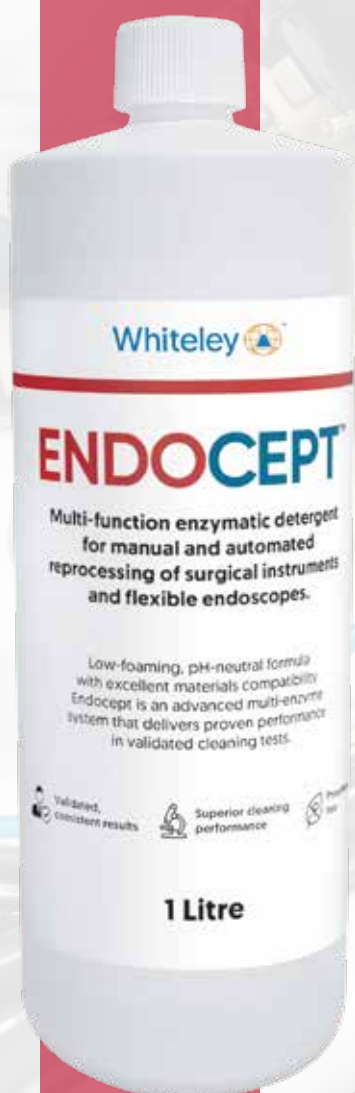

容量：1 リットル
低発泡性、中性 pH
標準価格 8,800 円 (税込)
Whiteley Corporation
(オーストラリア)

製品特徴 | Feature of Product



Superior cleaning performance

高速洗浄と洗浄クオリティは、
その後の消毒滅菌の生産性を高めます



Premium formulation

サブチリシンを配合した多機能酵素が、医療機器に付着する、
有機タンパク質・炭水化物・脂質を効果的に除去



Highly concentrated formula

濃縮された溶液は、165 倍で使用可。
日々のランニングコストを削減し、経済的に使用できます



Passes a range of commercially available soil tests

各種試験にて裏付けされた信頼性は、
幅広い前洗浄用途でご使用できます



Phosphate-free formula

リン酸塩フリーで、高い洗浄力とサステナブルに利用可能

販売元

株式会社ネクステラ - ライフサイエンスのパイオニア -

813-0034 福岡県福岡市東区多の津 4 丁目 7-5 KN センタービル 2F
TEL 092-402-2608 Fax 092-402-2609 www.next-era.co.jp

取扱店

エンドセプトは、サブチリシン*をプレミアム配合した多機能酵素洗浄剤で、再使用される医療機器の消毒滅菌工程における「前洗浄」において、内視鏡を含む、使用済み医療機器に付着する乾燥タンパク質、脂質、炭水化物の蓄積物などを効果的に分解・洗浄します。加えて、165倍希釈と経済的で、洗浄時間は2~5分、水温25~50℃で使用可能、すすぎ工程のストレスが少なく、生産性高く使用可能です。リン酸塩フリーで低発泡性、中性pHなので、用手・浸漬・超音波洗浄・WD・AERと様々な前洗浄プロセスが可能で、しかも器具を傷めません。また、配合された生分解性を持つ成分は、サステナブルな環境保全問題にも貢献します。 *製造元表記に基づいた表記

Key Benefit

<p>Superior cleaning performance Ensuring reliable results every time.</p>	<p>Premium formulation Removes organic proteins and carbohydrates delivering exceptional results.</p>	<p>Highly concentrated formula Means more uses per bottle – less waste, more value.</p>	<p>Passes a range of commercially available soil tests To ensure cleaning across a wide range of applications.</p>	<p>Phosphate-free formula Ensures powerful cleaning without compromising sustainability.</p>
25-50℃ 使用可	プレミアムな 多機能酵素	330-165倍 希釈	低発泡性 中性 pH	リン酸塩フリー
2-5min 短時間洗浄	<p>タンパク質 炭水化物 脂質</p>	高いコスト パフォーマンス	内視鏡洗浄 超音波洗浄 WD/AER 対応	パワフル洗浄 サステナブル 生産性向上

「洗浄の質が、滅菌の質に…」

米国 CDC ガイドラインでは、医療機器の再生処理において前処理（洗浄）は後続の消毒・滅菌工程に影響を与える重要な要素とされています。

無機物 / 有機物の残存がある場合、微生物の不活性化が妨げられ、消毒・滅菌工程に影響する可能性があることが報告されています。

また CDC は、器具を洗浄剤や酵素洗浄剤に速やかに浸漬することで乾燥を防ぎ、洗浄が行いやすくなると述べています。

つまり、**化学的洗浄 × 物理的洗浄** により

- 血液 タンパク
- 唾液 バイオフィル
- 切削片 無機質
- 微生物
- 脂質 炭水化物

などの汚れを除去し、適切な消毒・滅菌工程につながる前処理が推奨されています。



*これは一般的な手技に関する記述であり、特定製品の効果を示すものではありません。

TOSI™ Challenge Test Results

超音波洗浄



2 分間

5 分間



ENDOCEPT™ 165倍希釈 25℃での自社洗浄検証

使用法（浸漬 / 超音波洗浄）



* 浸漬 / 超音波 洗浄 *

165倍 3-6ml / リットル
8ℓの場合 … 約 50ml
16ℓの場合 … 約 100ml

JAN Code	製品名	規格	入数
4595985923278	エンドセプト	1リットル	12本入