

光重合型ラバーダム用ペースト

KP DAM ペースト

LIGHT CURED GINGIVAL BARRIER



01

操作性と視認性に優れたペースト

ラバーダム防湿時の隙間の封鎖に適した粘性です。
適用部位の識別がしやすい青色ペーストです。

02

光重合型

1.5～2mmの厚さで適用し、20秒間光照射を行う
ことにより、迅速に重合させることができます。

03

簡単除去

重合後は適度な弾性があり、スムーズに一塊で
除去することができます。


1.2g入

シリンジチップ(20G) 5本

歯科医院様参考価格 ¥1,200

幅広い症例に適応

ラバーダム防湿時の辺縁封鎖、アンダーカットのブロックアウト、オフィスホワイトニング時の歯肉保護、咬合面形態を再現する「スタンプテクニック(Stamp Technique)」の印象採得補助などに使用することができます。

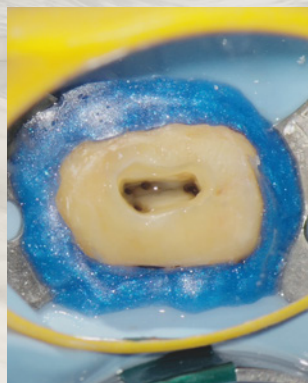

ラバーダムと歯との隙間を
封鎖するために使用する
ことができます。



歯肉を保護します。



修復形成の補助に



レジン修復におけるスタン
プテクニックの印象採得補
助に