

「スタンダードの域を越えるクオリティを、手に届く安心の価格で。」
日々の抜髄から再根管治療までを幅広くサポート



DIA PROSEAL 新発売

Root Canal Sealing Material



ダイアプロシールは、従来の加圧充填テクニックをそのまま活かせる、操作性に優れたエポキシレジンベースの根管充填シーラーです。水酸化カルシウムを配合することでレジン系特有の酸性化を抑え、安定した物性と緻密な封鎖性を実現。日々のスタンダードな抜髄症例から再根管治療まで、日常臨床を幅広くサポートします。

■加圧充填・再治療への適応と、優れた X 線造影性

側方加圧・垂直加圧充填のどちらのテクニックにも適応します。また、硬化後も専用溶剤等（クロロホルム、ユーゲノール等）で比較的容易に除去可能なため、リトリートメント（再根管治療）時のリスクと手間を軽減します。

■優れたX線造影性により視認が容易

※自社データ



■水酸化カルシウム配合による pH の安定化

■硬化後の pH 値の推移 (Day 14)

Dia-Proseal	pH~7.0 (中性維持)
A社	pH ~6.5 (弱酸性)
B社	pH~6.0 (弱酸性)

従来のエポキシレジン系シーラーで見られがちな弱酸性への傾きを抑制。硬化後も生体に優しい中性付近 (pH 約 7.0) を持続的に維持し、良好な予後をサポートします。


■寸法安定性に優れ、従来品と同等の「緊密な封鎖性」を実現

■硬化後の寸法変化率 (%)

Dia-Proseal	0.5%
A社	2.0%
B社	4.0%

出典: Restor Dent Endod. 2016;41(3):189-195

■各製品の微小漏洩量 平均値

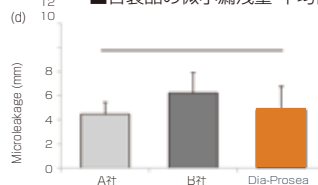

重合後の膨張や収縮が極めて少なく（寸法変化率約 0.5%）、根管へのクラックリスクを低減します。さらに、この優れた寸法安定性により根管壁との隙間が生じにくく、微小漏洩試験（色素侵入長）においても、従来のスタンダード製品（A 社）と遜色ない高い封鎖性を維持することが確認されています。

出典: Restor Dent Endod. 2016

臨床エビデンスはこちら⇒



■販売名：ダイアプロシール

■成分 ※エポキシレジン等に過敏症のある患者様には使用しないでください

A材 エポキシレジン 酸化ジルコニウム 水酸化カルシウム	B材 （キャリスト） タングステン酸カルシウム 酸化ジルコニウム 水酸化カルシウム
---------------------------------------	---

■物理学的データ

混合比	1:1
硬化時間	3~4時間以内
練和時間	10~20秒
作業時間	1時間

●歯科用根管充填シーラ ●認証番号: 308AKBZX00005000

毎日使うものだからこそ 経済性と品質を両立

商品コード	セット内容	入数	標準価格
7859	16g入りシリンジ1本(ベース6.5g+キャリスト9.5g) ミキシングパッド(50枚) スパチュラ×1	1箱	¥4,400 /箱 (税別)

チャームコアがオトクにお試しいただける「ダイアプロシール」新発売キャンペーンセット

「ダイアプロシール」と「チャームコア (A3) お試しパック」のセットが今なら
4400円 + 2300円 = 6700円 → 4400円

根管内の流し込みも、築盛も
できるデュアルキュア型
コア用 CR



チャームコア (A3) お試しパック
(A3) 10g シリンジ × 1
コア用ミキシングチップ × 10
コア用エンドチップ × 10

限定 **1000** セット 無くなり
次第終了!!

■物理学的データ

圧縮強度	300MPa
曲げ強度	123MPa
操作余裕時間	70 秒
光重合硬化時間	20 秒
化学重合硬化時間	4 分

キャンペーン期間: 2026.9.15 ~ 11.15迄

キャンペーン期間中は、新発売のダイアプロシールを1箱お買い求めいただけます。もちろんチャームコア (A3) お試しパックがセットになってお届けします。臨床現場で高く評価されている人気商品も、お得にまとめて導入いただける特別なセットとなっております。限定 1000 セット。期間中におさまっても無くなり次第終了致します。予めご了承ください。

BSA 人気商品

デュアルキュア型 支台歯隔適用コンボジットレジン チャームコア

●認証番号 227AKBZX00035000



商品コード	色調	セット内容	入数	標準価格
7803	A3	10gシリンジ×2 コア用ミキシングチップ×20	1箱	¥4,600 /箱 (税別)
7804	ブルー	コア用ミキシングチップ×20		
7840	ホワイト	コア用エンドチップ×20		