

トクヤマデンタルの コンポジットレジン研磨システム

歯科用ゴム製研磨材

エステポリッシャー

ESTEPOLISHER

歯科用研磨器材

エステブラシ

ESTEBRUSH

歯科用研磨器材

エステディスク

ESTEDISC

“こだわりのコンポジットレジン修復の
最終仕上げをサポート”

部位や形態に合わせて選べる多彩なラインナップ



エステポリッシャー

ESTEPOLISHER

推奨回転数: 3,000-8,000rpm
最大回転数: 20,000rpm

ダイヤモンド砥粒含有 
オートクレーブ滅菌可能: 134℃ (推奨5分)

使用方法

- カーバイドバー等で形態修正後、
注水下・推奨回転数・ソフトタッチで使します。



■ ダイヤモンド砥粒含有。コンポジットレジンを2ステップで高光沢に仕上げる研磨ポイントです。

中仕上げ用		最終仕上げ用
ミディアム medium		ファイン fine



前歯から臼歯咬合面までオールマイティーに使用可能



トルネード形状により広い面だけでなく、細部にも先端部分が届きやすく、効率的に研磨できます。



咬合面の小窩裂溝、隆線など



特殊形態で小窩裂溝にフィットするため、咬合面の研磨に特化しています。



細部、隣接面、歯頸部など



小型のポイント形状が隣接面や歯頸部にフィットします。



咬合面、前歯唇側面など



小型のカップ形状により、唇側の表面性状や咬合面の解剖学的形態を壊さずに滑沢化します。

歯科用研磨器材

エステブラシ

シリコンカーバイド粒子含有
オートクレーブ滅菌可能:134℃(推奨5分)

ESTEBRUSH

推奨回転数:5,000-7,000rpm
最大回転数:10,000rpm

使用方法
● 研磨ペースト不要。注水下・推奨回転数・ソフトタッチで使します。



カップ CUP



唇側面の仕上げや咬合面のツヤ出しに



フラット FLAT



咬合面や広い面などの研磨に



ポイント POINT



臼歯部の隣接面や小窩裂溝の研磨に



歯科用研磨器材

エステディスク

アルミナ粒子コーティング
ディスク:単回使用
マンドレル:オートクレーブ滅菌可能:134℃(推奨5分)

ESTEDISC

推奨回転数:7,000-10,000rpm
最大回転数:20,000rpm

使用方法
● コンポジットレジン等にディスクを押し当てて回転させ、
推奨回転数・ソフトタッチで使します。



コンポジットレジン充填後の平滑面や隣接面の最終仕上げまで行える研磨ディスクです。
薄く、柔軟性があるため、自然な形態を維持したまま研磨が可能です。

14mm

10mm

コース coarse



ミディアム medium



ファイン fine



エクストラファイン extra fine



切縁隅角の形態修正や
研磨に。



切縁の形態修正や
研磨に。



唇側平滑面の研磨に。
部位に合わせ表裏返して
使用が可能。



隣接面の研磨に。
部位に応じたサイズ
選択が可能。

※粒度は濃い色(荒目)から薄い色(細目)に色分けされています

エステディスク マンドレル RA(CA)

全長:25mm

※専用のマンドレルでご使用ください



製品ラインナップ


セット品



エステポリッシャー スターターキット

トルネード10 ミディアム、ファイン
サイクロン ミディアム、ファイン
ポイント ミディアム、ファイン
カップ ミディアム、ファイン 各1本

標準医院価格
¥10,000

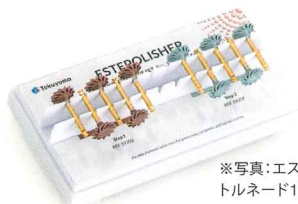

※写真: エステポリッシャー
トルネード10 バリューセット

エステポリッシャー トルネード14 バリューセット

ミディアム、ファイン 各5本

標準医院価格
¥19,000

エステポリッシャー トルネード10 バリューセット

ミディアム、ファイン 各5本

標準医院価格
¥17,000



※写真: エステディスク スターターキット 10mm

エステディスク スターターキット 14mm

コース、ミディアム、ファイン、エクストラファイン 各25枚
エステディスク マンドレル RA(CA) 1本

標準医院価格
¥10,000

エステディスク スターターキット 10mm

コース、ミディアム、ファイン、エクストラファイン 各25枚
エステディスク マンドレル RA(CA) 1本

標準医院価格
¥10,000

単品

エステポリッシャー

形状	粒度	入数	標準 医院価格
トルネード14	ミディアム	3本	¥6,300
	ファイン		
トルネード10	ミディアム		¥5,700
	ファイン		
サイクロン	ミディアム		¥4,500
	ファイン		
ポイント	ミディアム		¥2,500
	ファイン		
カップ	ミディアム		¥3,600
	ファイン		

エステブラシ

形状	入数	標準 医院価格
カップ	1本	¥1,200
	5本	¥5,700
フラット	1本	¥1,200
	5本	¥5,700
ポイント	1本	¥1,200
	5本	¥5,700

エステディスク

種類	粒度	入数	標準 医院価格
14mm	コース	100枚	¥9,000
	ミディアム		
	ファイン		
10mm	エクストラファイン	100枚	¥9,000
	コース		
	ミディアム		
マンドレル RA(CA)	ファイン	3本	¥4,500
	エクストラファイン		

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

価格は2026年8月現在のものです。消費税は含まれておりません。

ご使用の際は最新の注意事項等情報をお読みください。

エステポリッシャー 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 届出番号 08B2X00011000120
エステブラシ 一般医療機器 歯科用研磨器材 届出番号 08B2X00011000119
エステディスク 一般医療機器 歯科用研磨器材(歯科用マンドレル) 届出番号 08B2X00011000118

製造元 EVE Ernst Vetter GmbH(ドイツ連邦共和国)

エステライトEXクイック 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号 219AFBZX00101000
エステライトユニバーサルフロー 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号 228AFBZX00080000
エステライトアステリア 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号 225AFBZX00146000
オムニコロマフロー 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号 302AFBZX00087000

株式会社トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00(土日祝日を除く)

札幌(011) 812-5690 仙台(022) 717-6444 東京(03) 3835-7201
名古屋(052) 932-6851 大阪(06) 6386-0700 福岡(092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は